
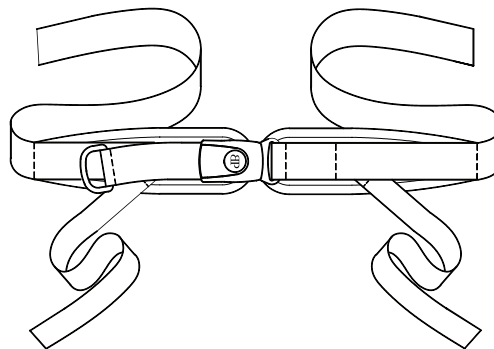


# Höftbälte Bruksanvisning

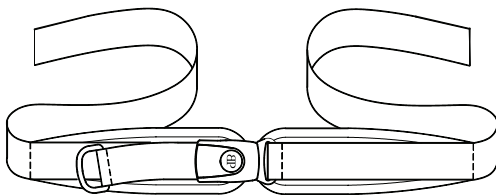

**Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla höftbälten från Bodypoint. Ge anvisningarna till användaren eller assistent/vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.**

**WARNING!** Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

## ANVÄNDNING

**WARNING!** Denna produkt får endast användas för att säkert placera en person i en rullstol eller arbetsstol. Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

**WARNING!** Höftbältet måste alltid vara ordentligt fäst över det nedre bäckenet och låren. Med ett för löst fastsatt bälte kan användaren glida ner och det kan finnas risk för strypning. Låt en fackman demonstrera korrekt justering och användning.

**OBS!** Fyrpunktsbältet kan säkert placeras över det övre bäckenet om de sekundära banden fästs så att de förhindrar lägesförändring.

**WARNING!** Om höftbältet frigörs av misstag kan användaren glida ner och falla ur rullstol eller arbetsstol. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigöring, måste en vårdare alltid vara närvarande när det används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

**WARNING!** Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära trycktytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, som t. ex. trycksår.

## UNDERHÅLL

Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, remmar och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person – hälsa och säkerhet står på spel!

## RENGÖRNING

Maskintvätt, 60°C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller dropptorka. Får ej strykas.  
Om produkten placeras i en tvättpåse under tvätten undviker man skador på produkten och på maskinen.

## SKROTNING/ KASSATION


Produkten lämnas till kommunal avfallshantering.

## GARANTI


Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga kunden. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden. Mer information om denna och andra produkter från Bodypoint finns på [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com) och [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


- Höftbälte
- Ändbeslag: Trekant & sölja (-B1) eller Bandlås med lock (-B2)

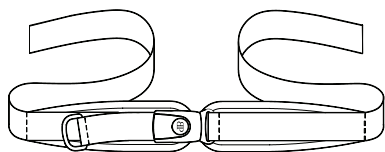


2-punktsbälte

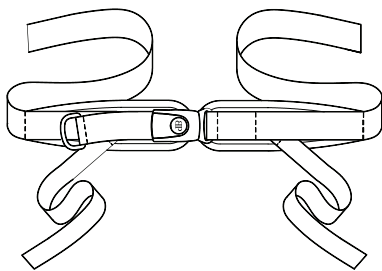


4-punktsbälte

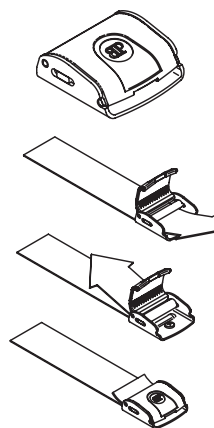

Bandlås med lock

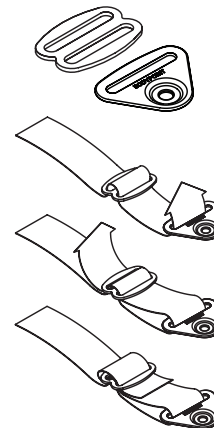


Trekant & Sölja

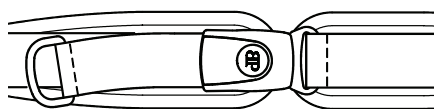


## INSTALLATION

För höftbälten med dynor, skall fästbanden dras åt så att dynorna ligger an. För höftbälten utan dynor, dra banden 12-15 cm genom bältets spänne.

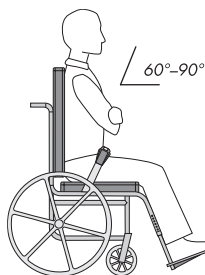


## TVÅPUNKTS HÖFTBÄLTEN

1. Bestäm önskad fästpunkt.
2. Sätt fast rörsvepet och bandläset i rullstolens ram.
3. Centraera höftbältet över bäckenet och dra bandens ändar genom bandläset.
4. Fäst banden ordentligt och stäng bandläset.

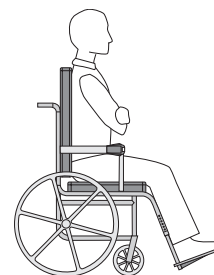


## FYRPUNKTS HÖFTBÄLTEN

1. Bestäm önskad fästpunkt.
2. Följ anvisningarna ovan för att rikta in de primära (bredaste) banden.
3. Sätt fast de sekundära banden i stolen så att de stöder de primära banden.
4. Dra åt de sekundära banden så att de hindrar de primära banden att glida upp eller ner.

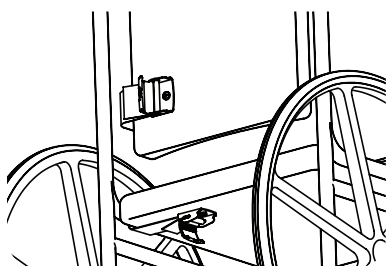


## MONTERING PÅ SITSPLATTAN

Fästbeslagen kan monteras på undersidan av en solid sits. Fästskruvarna måste klara minst 90 kg draghållfasthet. (Fästskruvar ingår inte.)

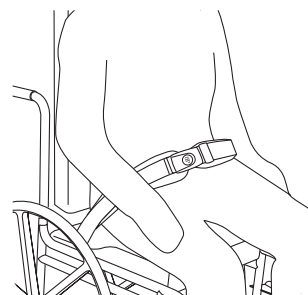

## JUSTERING

När höftbältet har justerats och dragits åt, skall det sitta väl och användarens bäcken ska vara stabiliserat. På bälten med dynor skall D-ringen dras åt tills dynorna under spännet möts. Om längden måste justeras för att få god passning, görs det med hjälp av ändbeslagen.

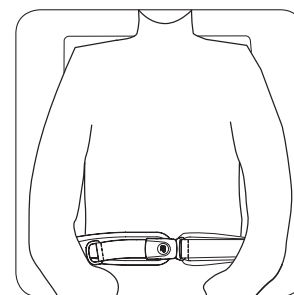

## SÄKERHETSKONTROLL

När användaren är korrekt placerad i rullstolen, kontrollera passningen genom att användaren lutar sig framåt och åt sidorna.

### Kontrollera:

1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komfort – sök efter områden som kan bli irriterade.
3. Position – Om bältet sitter för högt eller lågt, justera fästpunkterna.
4. Samverkan med annan utrustning – flytta fästpunkter vid behov.
5. Prova stolens alla rörelsemöjligheter fullt ut, inklusive ryggfällning, tiltning, hopfällning och körning. Sök besvärande moment.