


# Aeromesh Rapid-Dry Duschbälte med sidospännen

## Anvisningar för montering och bruk

Art. nr: BB111 & BB112

BP1094-sv 2015.5

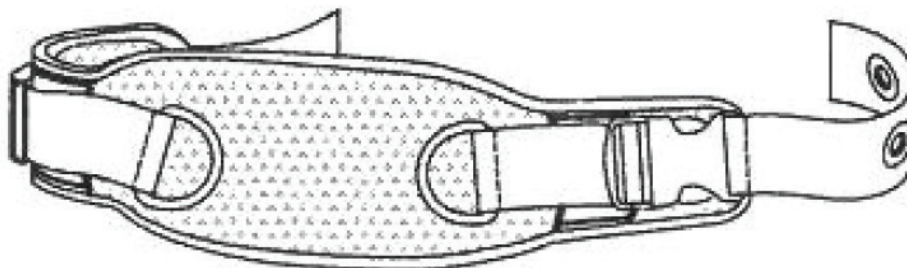

**Dessa anvisningar utgör viktig information för att säker användning och underhåll av alla Bodypoint Aeromesh Rapid-Dry Duschbälten. Ge dem till användaren eller vårdarna och kontrollera att de är förstådda.**

**Varning!** På grund av risk för kvävning är det farligt att använda ett bröstbälte utan att stabilisera bäckenet. Använd alltid med ett riktigt utprovat höftbälte eller lår/knäbälte.




### Användning

**Varning!** Används endast för att placera en person i en hygien-/duschstol. Använd inte denna produkt som en säkerhetsanordning vid transport, eller för fasthållning av en person eller på något annat sätt där felaktig användning kan leda till skada.




**Varning!** Om bältet oavsiktligt öppnas kan användaren glida av eller falla från hygienstolen. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig öppning måste en vårdare vara närvarande när bältet används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

**Underhåll:** Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, remmar och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person - hälsa och säkerhet står på spel!
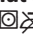
### Normal rengöring:

   Maskintvätta i vatten 60°C. Använd inte blekmedel. Hängtorka eller torktumla utan värme.



### Speciell rengöring:

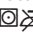   Maskintvätta i vatten 70°C. Använd inte blekmedel. Hängtorka eller torktumla utan värme.

**Garanti:** Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden.

*För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även på [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com) som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.*



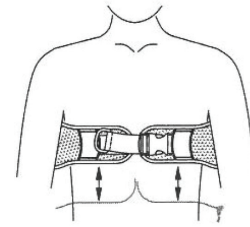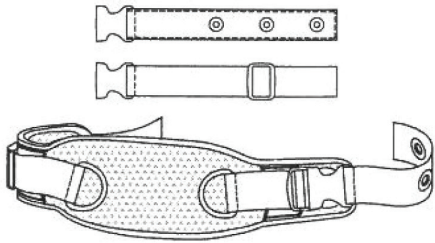

#### Förpackningen innehåller en eller flera av följande delar:


- Aeromesh Rapid-dry Duschbälte med sidospännen
- Fästband med öljetter eller..
- Fästband släta, med söljor

**Tillval:** Rörlämmor (Art.nr HW310), Rörsvep (Art.nr HW320)  
Låsraff (Art.nr FA812-BP)

#### Positionering


Placera användaren på dusch/toalettstolen och finn en god sittställning. Bestäm bältets placering. Tag hänsyn till andra tillbehör. För att undvika risk för strypning och bälnstabilitet skall bältet varken sitta för högt eller för lågt.

#### Monteringsförslag

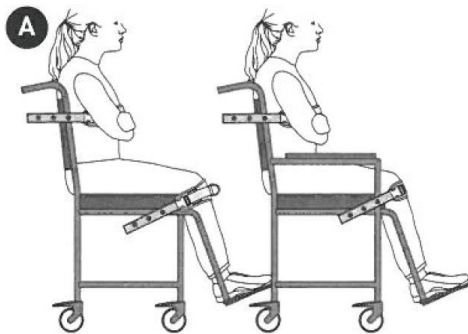

#### Över bröstkorgen, Vid knät (att föredraga)

Lokalisera ett passande monteringsställe på stolen med hänsyn till användarens behov. Bältet bör placeras enligt någon av de visade lägena.

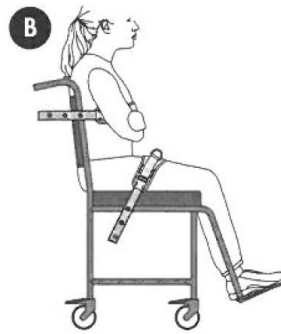


#### Över lår (Valfritt)



#### Stolar med sits som kan tippas


Bältet måste monteras på den övre ramen, ovanför vridpunkten. Bältet som monteras under vridpunkten kan orsaka störningar och få ändrad sträckning.

#### Installation

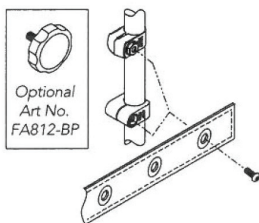


#### Rörlämmor eller Rörsvep av stål

Fäst klämmorna på stolen på valda platser och drag åt förbanden. Stick skruv nummer två genom en öljett på bältet och in i klämman. Drag åt väl.

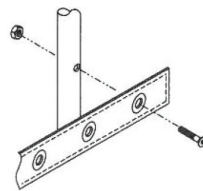


#### Montering med enbart skruv

Om bältet monteras direkt på stolens ram eller en fast sits/rygg skall 6mm skruv med flat eller kupad skalle användas. Skruven skall klara en belastning på minst 90kp. Är inte medlevererad.

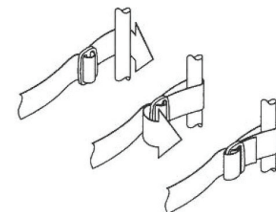

#### Montering med släta fästband och söljor

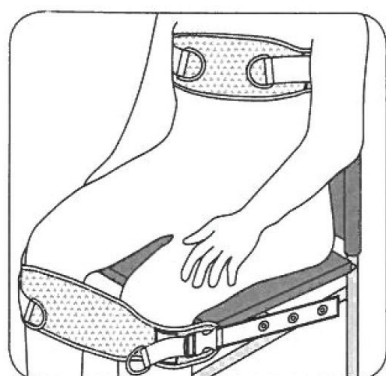

#### Justering

Kontrollera att bältet sitter bra när brukaren har rätt kroppsläge. Det skall vara ganska väl åtdraget så att användaren är säker. Små justeringar görs med åtdragsbanden som har D-ringar. Stora justeringar med fästbanden med öljetter.

#### Säkerhetskontroll

När användaren är korrekt placerad i stolen, låt denne luta sig framåt och åt sidorna. Kontrollera:

1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komforten - om skavning kan uppstå, placera om banden.
3. Placeringen - om det är för högt eller lågt, placera om banden.
4. Om det finns störningar i anslutningen till andra anordningar. Placera om banden efter behov
5. Utför alla möjliga omställningar av stolen, inklusive tiltning av sitsen, hopfällning och körning. Kontrollera att allt fungerar som avsett.