


Brösthälte Monoflex

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING



Art. nr: SH103XS, SH103S, SH103M, SH103L, SH103XL

BP1076 2009.2

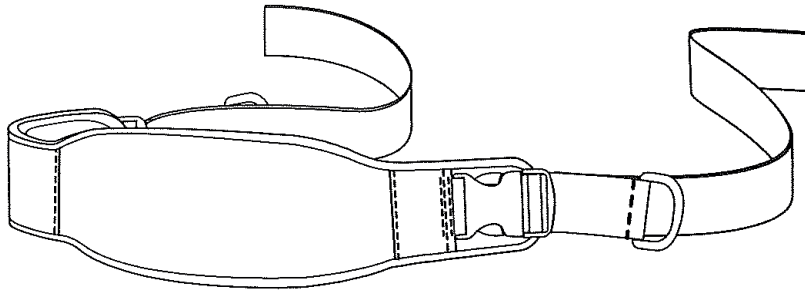

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 1x Monoflex
- 2x Monteringsplattor
- 2x Söljor
- 2x Självgående skruvar 10-32

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av ett elastiskt bröstbälte från Bodypoint. Ge anvisningarna till användaren eller assistenten/ vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.

WARNING! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

WARNING! På grund av risk för kvävning är det farligt att använda produkten utan att stabilisera bäckenet. Använd den alltid med ett riktigt utprovat bälte.

ANVÄNDNING:

WARNING! Denna produkt får endast användas för att säkert placera en person i rullstol. Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

WARNING! Om bältet oavsiktligt frigörs kan användaren falla framåt. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigöring, måste en vårdare alltid vara närvarande när den används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

WARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel kan produkten förändra sättet som personen sitter på. Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära tryckytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, t. ex trycksår.

UNDERHÅLL Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, band och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person - hälsa och säkerhet står på spel!

RENGÖRING:

Maskintvätt, 40°C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller droptorka. Får ej strykas. Om produkten placeras i en tvättpåse undviker man skador på produkten och maskinen.

GARANTI:

Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkningen och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga kunden. Kontakta din leverantör i garantiärenden.

För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även på www.bodypoint.com som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se



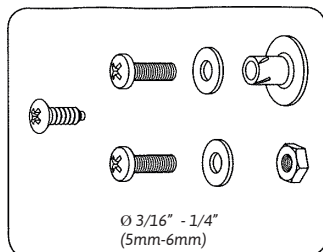


Fig. 1

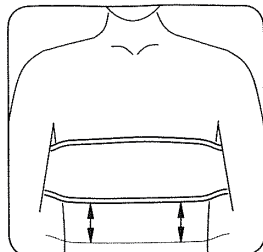


Fig. 2

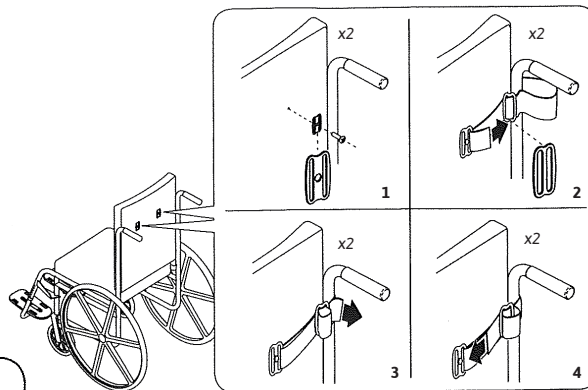


Fig. 4

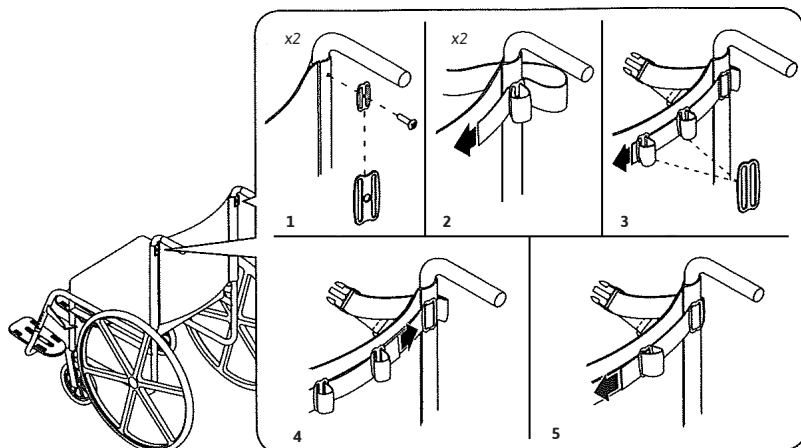


Fig. 3

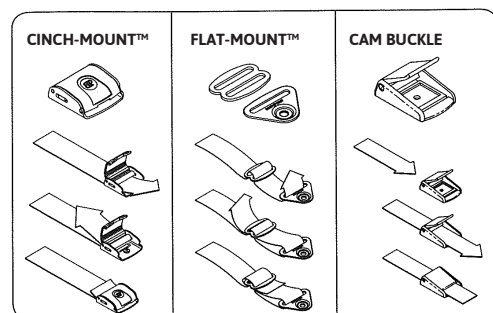


Fig. 5

INSTALLATIONSKRAV:

1. Philips stjärnskruvmejsel #2
2. 4 mm borrhål kan eventuellt behövas
3. Andra monteringskruvar med en dragstyrka på minst 90 kg. Medföljer inte i förpackningen. (Fig 1)

POSITIONERING:

1. Placera användaren i rullstolen i avsedd sittställning med ett höftbälte. Bestäm position för bröstbältet. (Fig 2) När selen har justerats och banden dragits åt ska den sitta väl och användarens bål ska vara stabiliserad. För att minimera risken för strypling och bålinstabilitet får inte selen sitta för högt eller för lågt. Ta hänsyn till andra anordningar när placering väljs.

INSTALLATION:

Rullstolar med mjukt ryggstöd: (Fig. 3)

1. Ta bort de övre klädselskruvarna från ryggramen och fäst monteringsplattorna eller borra nya hål genom klädseln mot ramrören och fäst monteringsplattorna med självgående skruvar.
2. Trä in banden genom monteringsplattorna på båda sidor. Låt 10 cm av banden vara fria för justering av fixspännet.
3. Placera båda söljorna på en bandända. Trä motsatt bandända genom båda söljorna.

Rullstolar med hårt ryggstöd: (Fig. 4)

1. Vira de nedre banden runt ryggstödet så att de inte är ivägen för något annat på rullstolen. Markera vald plats för skruvhålen.
2. Fäst monteringsplattorna på ryggstödet baksida med hjälp av självgående skruvar eller andra monteringskruvar som klarar en dragstyrka på minst 90 kg.
3. Trä banden genom monteringsplattorna.

(Alternativa monteringsbeslag som bandlås med lock, trekant och sälja eller bandlås i plast kan beställas från din leverantör) (Fig.5)

JUSTERINGAR:

Placera användaren i rullstolen och fäst höftbältet. Om det Monoflex bröstbältet sitter rätt och banden är åtdragna ska det sitta väl så att bålen är stabiliserad. Små justeringar görs med åtdragsbanden på sidan av fixspännet. En D-ring underlättar åtdraget. Om fler justeringar är nödvändiga för att bältet ska passa eller om man ska ta bort bältet kan detta göras med hjälp av söljorna.

SÄKERHETSKONTROLL:

När användaren är korrekt placerad i rullstolen, kontrollera passningen genom att låta användaren luta sig framåt och åt sidorna.

Kontrollera:

1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komforten - om skavning kan uppstå, placera om banden.
3. Placeringen - om det är för högt eller lågt, placera om banden.
4. Om det finns störningar i anslutning till andra anordningar. Placera om banden efter behov för att frigöra sittställningar, armstöd, extra dynor, ventrikelsönder m. m.