


Trimline Bröstsele

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Art. nr: SH230S, SH230M, SH230L, SH240S, SH240M, SH240L

ba_bp_trimline_1308

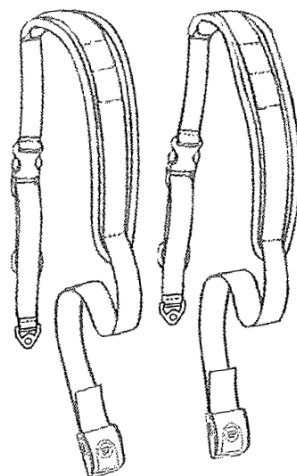

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Trimline Bröstsele
- Monteringsdelar: Bandlås med lock eller trekant och sölja

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla bröstselar från Bodypoint av modellerna Standard och Trimline. Ge anvisningarna till användaren eller assistenten/ vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.

WARNING! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

WARNING! På grund av risk för kvävning är det farligt att använda produkten utan att stabilisera bäckenet. Använd den alltid med ett riktigt utprovat bälte.

ANVÄNDNING:

WARNING! Denna produkt får endast användas för att säkert placera en person i rullstol. Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

WARNING! Om selen oavsiktligt frigörs kan användaren falla framåt. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigörning, måste en vårdare alltid vara närvarande när den används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur selen öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

WARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel kan produkten förändra sättet som personen sitter på. Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära trycktytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, t. ex trycksår.

UNDERHÅLL Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, band och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person - hälsa och säkerhet står på spel!

RENGÖRING: Maskintvätt, 40 °C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller dropptorka. Får ej strykas. Om produkten placeras i en tvättpåse undviker man skador på produkten och maskinen.

GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkningen och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör i garantiärenden.


För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.hea.se

HEA
Medical AB

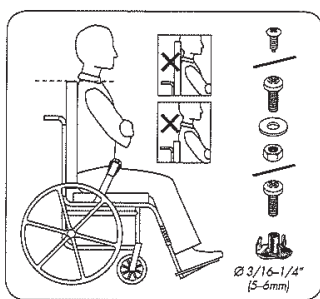

INSTALLATIONSKRAV:

1. Rullstol med stadigt ryggstöd i ungefärlig axelhöjd
2. Monteringskruvar med dragstyrka på minst 90 kg. Medföljer inte i förpackningen.

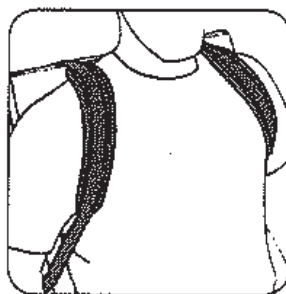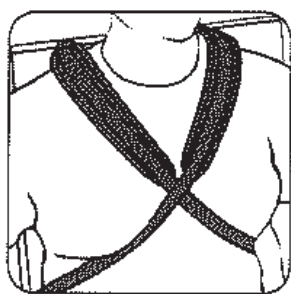


INSTALLATION

1. Placera användaren i rullstolen med ett höftbälte och bestäm korrekt sittposition.
2. Placera selen på användaren med de övre banden mellan hals och axelled.

Placera på följande sätt:


Kryssmontering: Korsbanden vid bröstbenets övre del. Dynorna skall inte överlappa.

Ryggsäcksmontering: Placera dynorna över användarens skuldror. De nedre ändarna på dynorna skall löpa längs armarna, med de nedre banden under armhålorna.

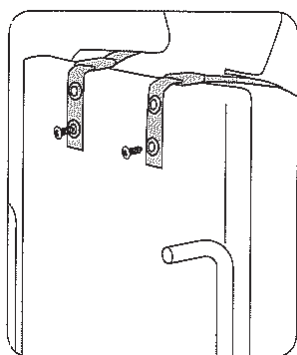


Åtdrag framifrån:

Fästbandens ändrar bör sitta cirka 50-200 mm isär.

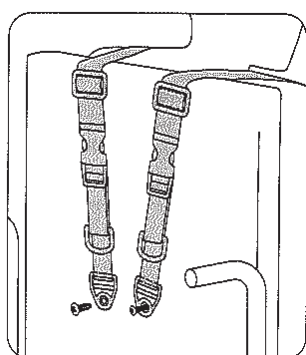


Åtdrag bakifrån:

Fästbandens ändrar bör sitta cirka 0-100 mm isär.

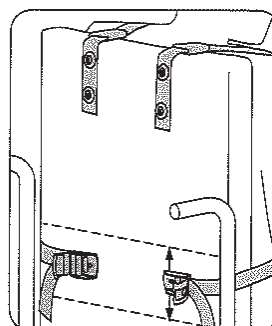

Nedre selband

Lägg de nedre banden runt ryggstödet och se till att de inte kommer i vägen för andra anordningar på stolen. Montera fästbeslagen högre än bäckenet, mellan mitten och nederdelen av ryggen. Montera på ryggstödet med lämpliga fästankordningar

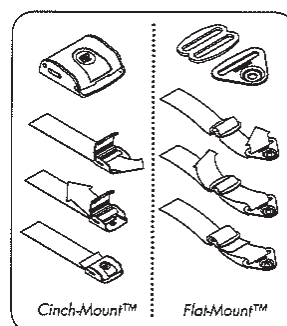

JUSTERING: När selen har justerats och banden dragits åt skall den sitta väl och användarens bål skall vara stabiliserad. För att minimera risken för strypning och bålinstabilitet får inte selen sitta för högt eller för lågt. Små justeringar görs med hjälp av de övre banden fästade vid rullstolens ryggstöd. D-ringar underlättar vid åttdragning. Om längden måste justeras för att få god passning eller samband med att rengöring görs det med hjälp av ändbeslagen.

SÄKERHETSKONTROLL: När användaren är korrekt placerad i rullstolen, kontrollera passningen genom att låta användaren luta sig framåt och åt sidorna.

Kontrollera:

1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komforten. Axelbanden får inte skava mot halsen.
3. Placeringen. Om selen sitter för högt eller lågt skall de nedre banden justeras.
4. Om det finns störningar i anslutning till andra anordningar. Placera om banden efter behov för att frigöra sittställningar, armstöd, extra dynor, ventrikelsönder m. m.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.hea.se

