

## Komponentförteckning



Nr	Art.nr	Benämning
1	37701	Bärarm för droppåse
2	377012	Självgående låsskruvar för bärarm
3	37702	Teleskåprör, längdställbart
4	377021	Plastplugg, svarvad
5	37703	Hylsa med öra och taggbricka, ogångad
6	37704	U-profilstycke med taggbricka gångad
7	HWH205	Ratt för höjdlås
8	HWH210	Låsspak med spärr
9	HW311	Snabblås Bodypoint
10	37602	Sidoplatta Cross

### Ingår Crossrygg 2


11	37602C1	Monteringsatts C1 (2st Skruv, mutter & bricka)
----	---------	--

### Ingår Crossrygg 3A

12	37602C3A	Monteringsatts C3A (2st Skruv, T-mutter & bricka)
----	----------	---

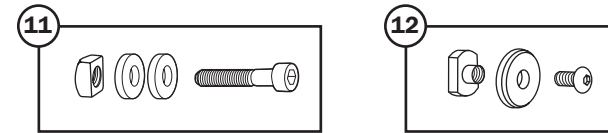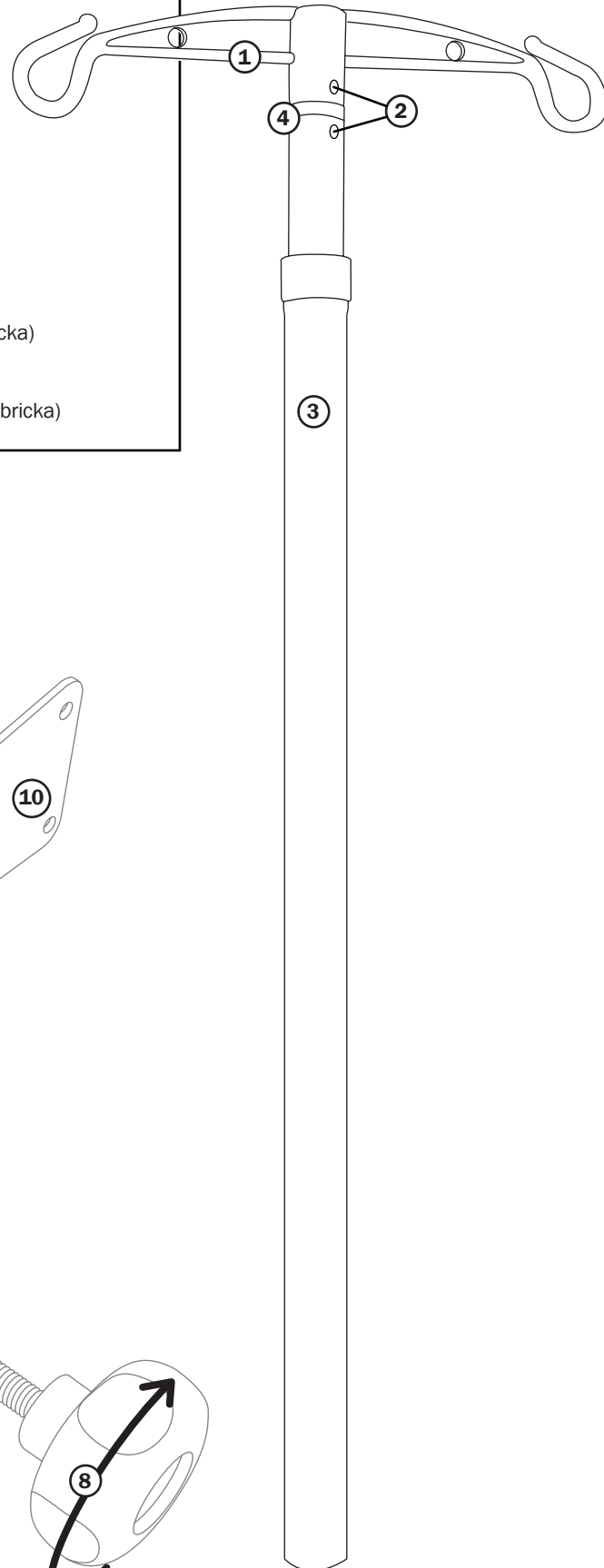

Monteras av och på med hjälp av ett snabblås.  
Snabblåset har ett säkerhetslås som normalt alltid skall vara i låst läge.

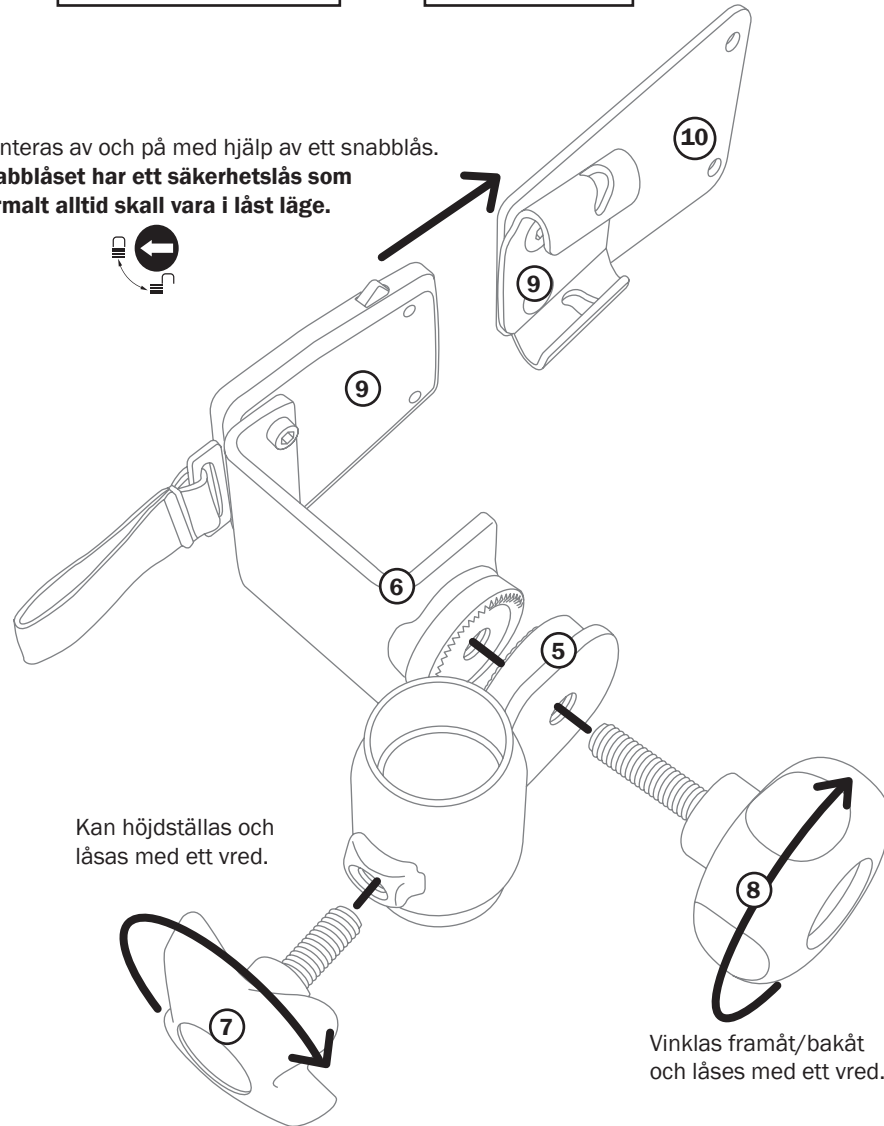

Kan höjdställas och låsas med ett vrid.


Vinklas framåt/bakåt och låses med ett vrid.

## Droppställning HEA för Etac Cross med rygg 2 och 3A

### Anvisningar för montering och bruk

Art. nr: 3770C1, 3770C3A

ba\_HEA\_droppställning\_Cross\_1506

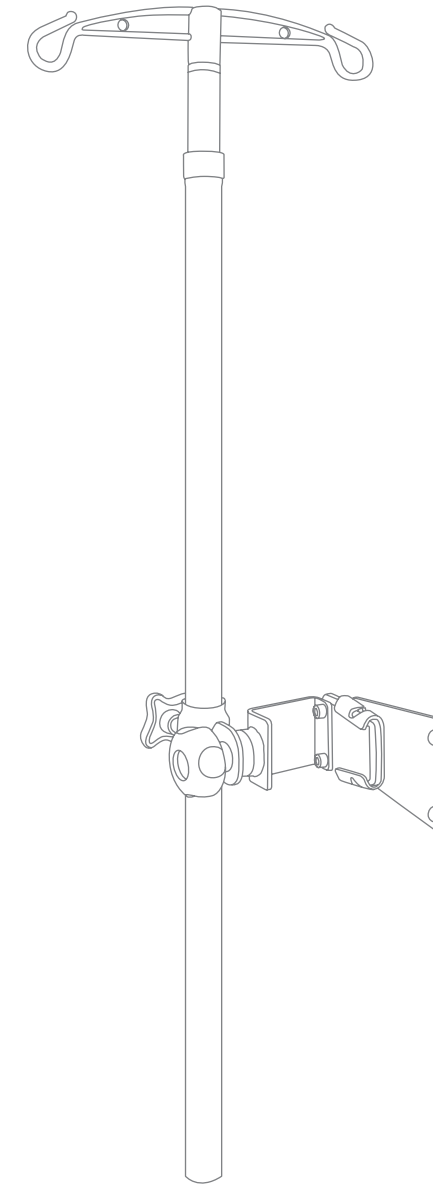


#### Specifikation

Max belastning:	4Kg
Mått kortast:	88cm
Mått längst:	164 cm
Ställbarhet:	76 cm
Vikt:	800 g

Droppställning HEA finns i olika utföranden avsedda att monteras på ryggsstödsrören på följande rullstolar:


Art.nr 3770C1	Droppställning HEA C1	Monteringsdetaljer medföljer för rullstol Etac Cross med rygg 2
Art.nr 3770C3A	Droppställning HEA C3A	Monteringsdetaljer medföljer för rullstol Etac Cross med rygg 3A

 Produkten är CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet. Om monteringen utförs enligt bruksanvisningen av en sakkunnig person och anvisningarna för bruk följs ansvarar Hea för kombinationen av rullstol och droppställning.


**HEA Medical AB**  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se

**HEA**  
Medical AB

### Montering på Etac Cross Med rygg 3A

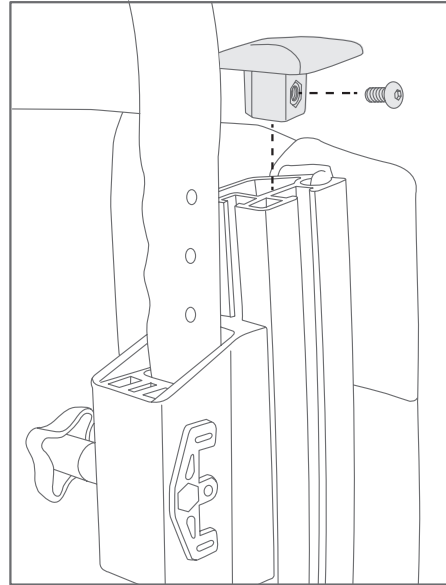


**1.** Ta av hatten från ramröret genom att först avlägsna skruven.

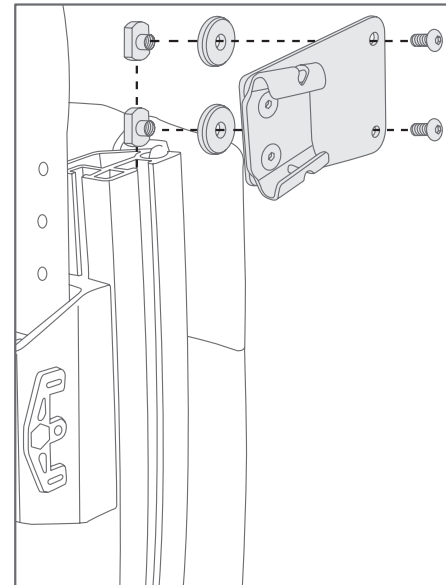


**2.** Dra skruvarna genom vinkelskenan därefter brickorna för att slutligen skruvas i T-muttrarna. Skjut ner T-muttrarna i stolsryggens profilskena. Dra åt skruvarna när vinkelskenan är i önskad höjd.

### Montering på Etac Cross med rygg 2

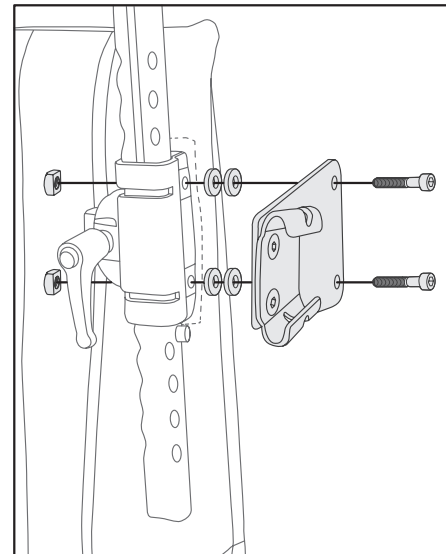


Dra skruvarna genom vinkelskenan och brickorna därefter handtagsfästet för att slutligen skruvas i muttrarna.

### Snabblåset

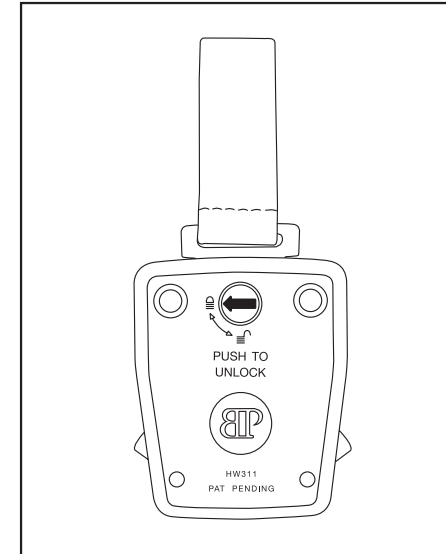


**OBS!** Försäkra er om att snabbfästet alltid är i låst läge under användning för att undvika oönskad öppning.

### Teleskåperande rör

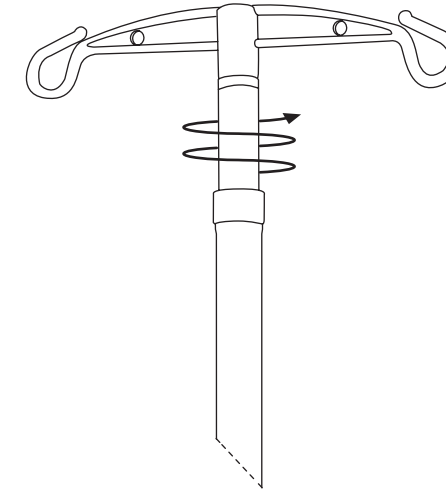


**OBS!** Dra åt det övre teleskåpsröret ordentligt genom att vrida det medsols.


### Inställningar

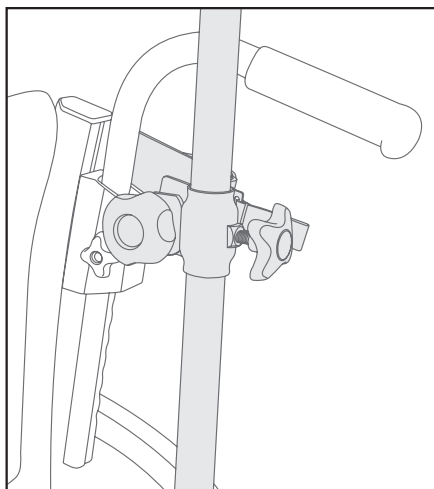

Droppställningen i lodrätt läge

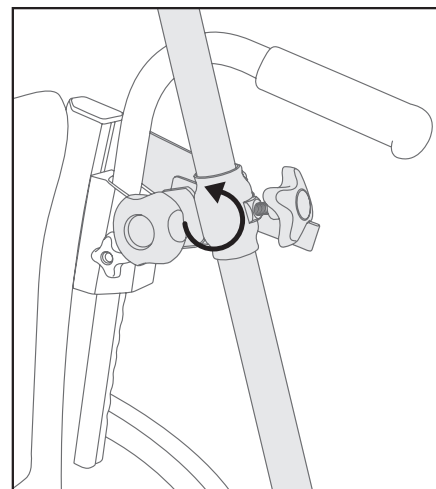


Droppställningen i framåtvinklat läge

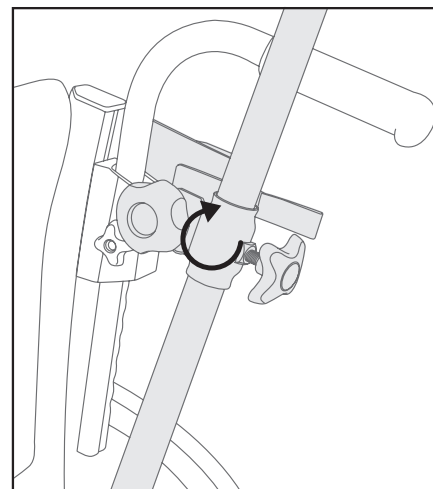


Droppställningen i bakåtvinklat läge

### Droppställningen kan monteras i fyra olika positioner

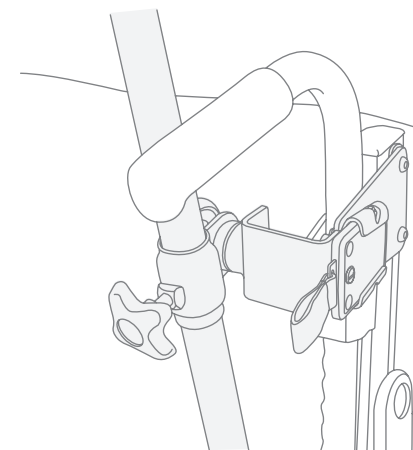

Droppställningen monterad på insidan.

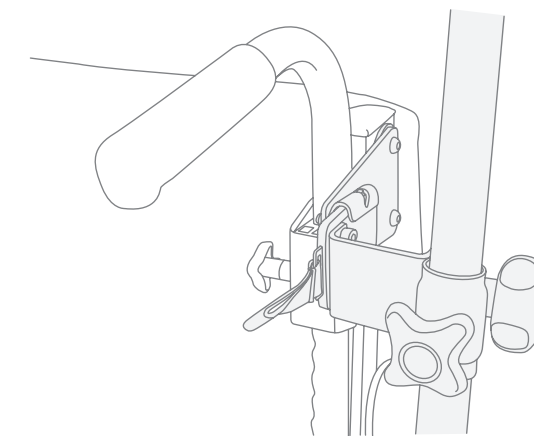

Droppställningen monterad på utsidan.

**Droppställningen kan monteras i fyra olika positioner** på stolens högra eller vänstra sida och i båda fallen med ställningen antingen på utsidan eller insidan av ryggröret/körhandtaget.