


Elastiskt Universalband Bruksanvisning



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

Art. nr: SP110S, SP110L, SP110XL, SP111S, SP111L, SP111XL

BPI095-sv 2015.5

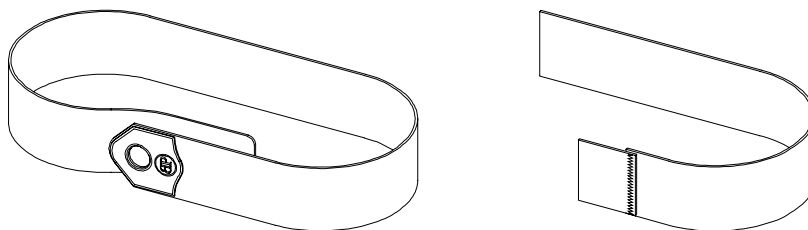

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla höftbälten från Bodypoint. Ge anvisningarna till användaren eller assistent/vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.

VARNING! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

VARNING! På grund av risk för kvävning är det farligt att använda produkten utan att stabilisera bäcken. Använd den alltid med ett riktigt utprovat höftbälte.

ANVÄNDNING:

VARNING! Denna produkt får endast användas för att säkert placera en person i en rullstol. Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

VARNING! Om bandetoavsiktligt öppnas kan användaren glida ner eller falla ur rullstolen. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigörning, måste en vårdare alltid vara närvarande när det används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

VARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära trycktytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, som t.ex. trycksår.

UNDERHÅLL:

Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, remmar och dynor. Ombetydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person - Hälsa och säkerhet står på spel!

RENGÖRING:

Maskintvätt, 40°C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller droptorka. Får ej strykas. Om produkten placeras i en tvättpåse undviker man skador på produkten och maskinen.

GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden. För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även på www.bodypoint.com som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

Förpackningen kan innehålla en av följande:

Elastiskt universalband (SP110S, SP110L, SP110XL)

Förlängning till elastiskt universalband (SP111S, SP111L, SP111XL)

a) Använd det elastiska förlängningsbandet för att förlänga det.

b) Klipp av bandet för önskad längd.

POSITIONERING


c) Elastiskt universalband är ett tillfälligt positioneringsstöd och är flexibelt att positionera över flera områden beroende på vad användaren kräver. För en mer långsiktig positionering rekommenderas ett av Bodypoints individanpassade produkter.

SÄKERHETSKONTROLL

När användaren är korrekt placerad i rullstolen, låt denne luta sig framåt och åt sidorna.

Kontrollera:

1. Komforten – om skavning kan uppstå, placera om banden.
2. Placeringen – om det är för högt eller lågt, placera om banden.
3. Om det finns störningar i anslutning till andra anordningar så placera om banden med hänsyn till armstöd, extra dynor, ventrikelsonder mm
4. Säkerställ funktion genom att prova stolens alla rörelsemöjligheter fullt ut, inklusive ryggfällning, tiltning, hopfällning och körning.

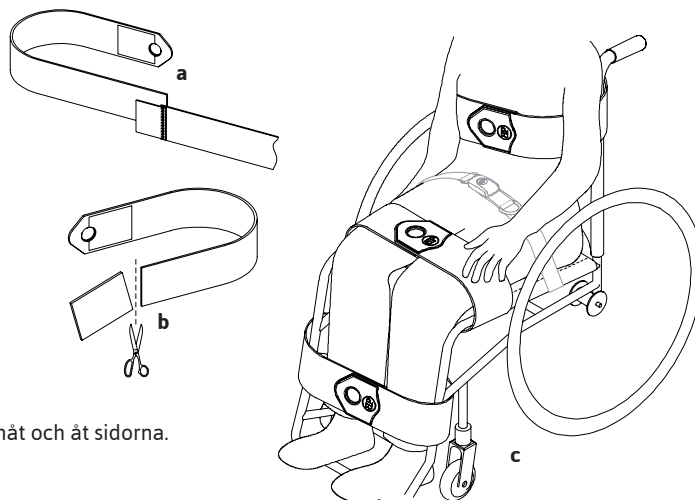

HEA Medical AB

Norra Ågatan 10

416 64 Göteborg

031-15 73 20

info@heamedical.se

www.heamedical.se

