


# Hensinger huvudstöd modell 6810

## INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING




Art. nr: 6810-XS, 6810-S, 6810-M, 6810-L, 6810-XS-UP, 6810-S-UP, 6810-M-UP, 6810-L-UP

dan\_6810\_1601

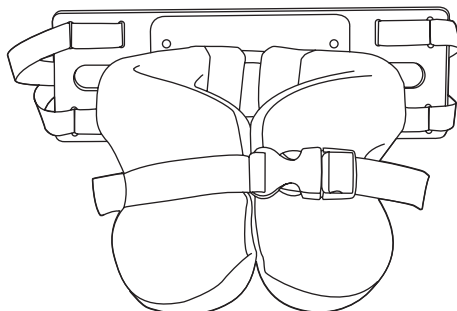

Obs! Hensinger huvudstöd får endast användas tillsammans med ett lämpligt stöd för bålen. Läs anvisningarna noga. Kragen är avsedd att varsamt stödja huvudet med stödytor i haka och nacke. Med snabbspännet på framsidan kan kragens sammanhållande band lätt öppnas - gör det lätt att komma i och ur. Klädseln är avtagbar och tvättbar.

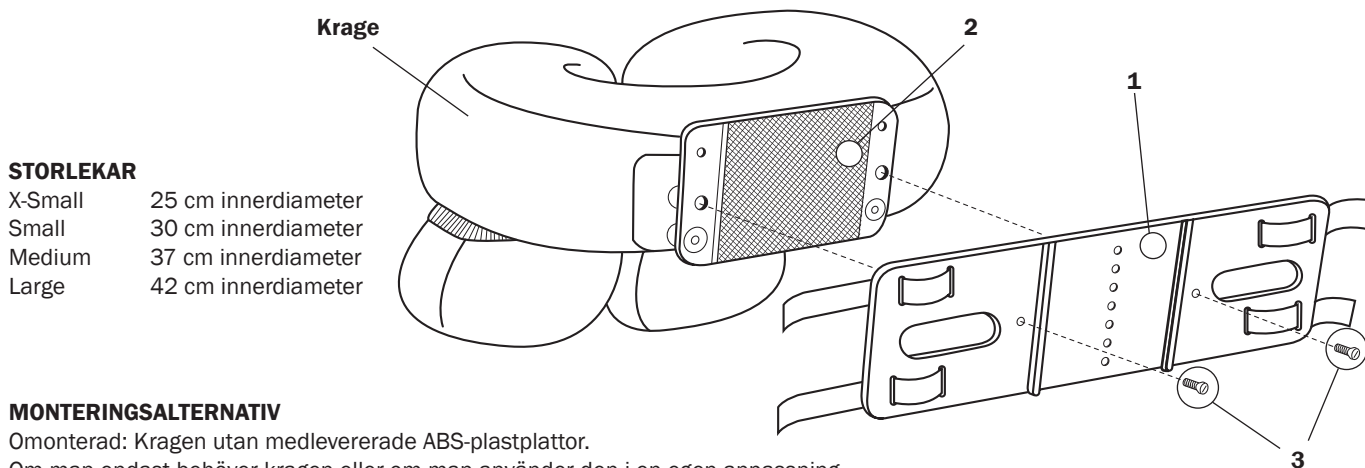

### STORLEKAR

X-Small	25 cm innerdiameter
Small	30 cm innerdiameter
Medium	37 cm innerdiameter
Large	42 cm innerdiameter

### MONTERINGSALTERNATIV

Omonterad: Kragen utan medlevererade ABS-plastplattor.

Om man endast behöver kragen eller om man använder den i en egen anpassning.

Monterad: Det medlevererade monteringsystemet bestående av (se bild ovan)

1. En större svart plastplatta (10x15 cm) med mjukt kardborrband och med fästband för stolen
2. En mindre platta (10x15 cm) med hårt kardborrband och monteringsdelar för kragen.
3. Två skruvar som håller samman de två plastplattorna enligt ovan.

### ANVISNINGAR

Om kragen snabbt skall skiljas från stolen använd inte de två fästskruvarna enligt punkt 3 ovan. Kragen hålls då endast fast mot den stora plastplattan och därmed stolens rygg med kardborrband. Detta är den rekommenderade användningen.

Fäst den stora plattan med banden runt stolsryggen.

### VARNING!

Fel i montering av Hensinger huvudstöd eller felfunktion kan ge upphov till allvarlig skada eller dödsfall. Följ anvisningarna noga, se till att vävband är rätt inställda, byt alltid ut slitna, skadade eller trasiga delar.

Huvudstödet är endast avsett som ett stödjande hjälpmedel. Det får inte användas för fastlåsning eller för att hindra normala rörelser. Kontrollera att kragen lossnar om användaren faller framåt eller frigör sig med kraft.



Tillverkad av Danmar Products, Inc. USA

HEA Medical AB  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se

