

# Danmar skyddshjälm - hårt skal


## Bruksanvisning



Tillverkad av Danmar Products, Inc. USA

Art. nr: 9825-XS, 9825-S, 9825-M, 9825-L, 9825-XL

ba\_danmar\_hjalm\_hs\_2015\_07

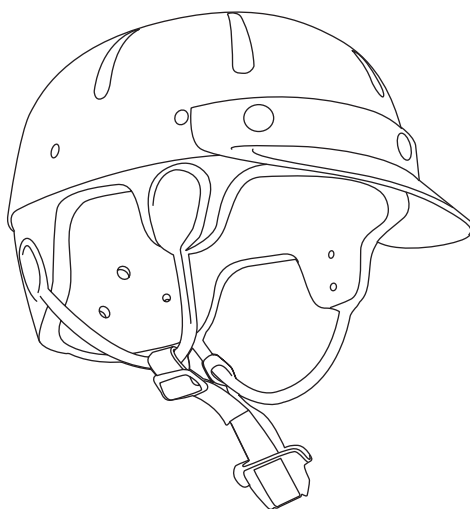

### Innehåll:

- 1 st. skyddshjälm
- 1 sats skumgummikuddar.

Hjälmen skall passa bekvämt utan att sitta för hårt eller för löst. Hjälmens framsida skall inte gå under ögonbrynen. Anpassa hakbandets längd med hjälp av plastspännet. Vid användning skall alltid hakbandet vara stängt.

En sats av skumgummikuddar medföljer för att man skall kunna anpassa storleken.

- 1) Prova först att placera kuddarna löst i hjälmen utan att ta bort skyddstejpen.
- 2) När valet är gjort tag bort skyddstejpen på kuddarna och fäst dem.

### Tvättråd

Tvätta ofta i varmt vatten med diskmedel. Kan doppas i vatten.  
Får ej autoklaveras.

### WARNING!

Fast vi anser att en hjälm väsentligt kan minska risken för huvudskador vill vi understryka att det inte finns någon känd metod att helt undvika skador. Endast ni som ordinator/vårdnadshavare kan utvärdera behoven i de olika fallen. Vi anser att det är viktigt att professionell expertis rådfrågas.

- XX-SMALL
- X-SMALL
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
- X-LARGE