

Danmar skyddshjälm - mjukt skal


Bruksanvisning



Tillverkad av Danmar Products, Inc. USA

Art. nr: 9820-XS, 9820-S, 9820-M, 9820-L, 9820-XL

107 ver.1710

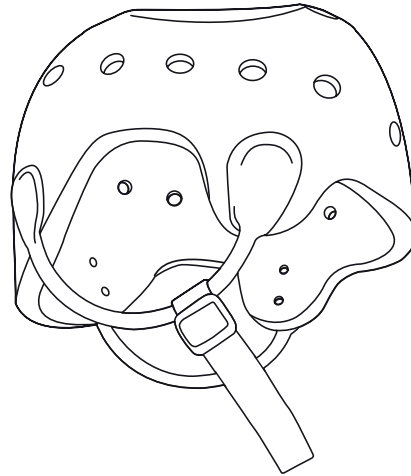

INNEHÅLL:

- 1 x Skyddshjälm med mjukt skal
- 1 x Sats skumgummikuddar.

Hjälmen skall passa bekvämt utan att sitta för hårt eller för löst. Hjälmens framsida skall inte gå under ögonbrynen. Anpassa hakbandets längd med hjälp av plastspännet. Vid användning skall alltid hakbandet vara stängt.

En sats av skumgummikuddar medföljer för att man skall kunna anpassa storleken.

- 1) Prova först att placera kuddarna löst i hjälmen utan att ta bort skyddstejpen.
- 2) När valet är gjort tag bort skyddstejpen på kuddarna och fäst dem.

TVÄTTRÅD

Twätta ofta i varmt vatten med diskmedel. Kan doppas i vatten. Lufttorkas. Får ej autoklaveras.

VARNING!

Fast vi anser att en hjälm väsentligt kan minska risken för huvudskador vill vi understryka att det inte finns någon känd metod att helt undvika skador. Endast ni som ordinator / vårdnadshavare etc kan utvärdera behoven i de olika fallen. Vi anser att det är viktigt att professionell expertis rådfrågas.

Underhåll

Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på materialet; skalet, mjuka delar och hakbandets sömmar. I samband med fall måste hjälmen kontrolleras. Om betydande slitage eller skada upptäcks på skalet skall hjälmen kasseras. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person – hälsa och säkerhet står på spel.

Skrotning/Kassation

Produkten lämnas till kommunal avfallshantering.

- X-SMALL
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
- X-LARGE

HEA Medical AB

Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

