

### Rengöring

Tvätta regelbundet i vatten med vanligt handdiskmedel.  
Använd inte diskmaskinen.

### Limning

Antihalkmaterialet kan limmas permanent med cyanoakrylatlim eller med ett neopenlim.

### Produkter

- Burk- och flasköppnare
- Gjutna underlägg cirka 3 mm tjocka
- Skurna underlägg cirka 2 mm tjocka
- Antihalkduk på rulle
- Laminerad antihalkduk på rulle
- Remsor

**OBS!** Dycem är inte effektivt i våta miljöer.  
Utsätt inte materialet för temperaturer över 50°C.

Marknadsförs i Sverige av:

**HEA Medical AB**  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se

Tillverkas av:

**Dycem Limited**  
Units 2-4  
Ashley Trading Estate  
Bristol, BS2 9BB  
ENGLAND



## Användningstips för Dycem antihalkmaterial

Dycem antihalkmaterial hjälper till att lösa många problem där det gäller att hålla fast eller stabilisera föremål. Bra i vården, terapin, i sjukgymnastiken och som ett hjälpmedel i hemmet. Materialet är ogiftigt, färgstabilit, luktfritt och lätt att rengöra.




ETT BÄTTRE LIV




ETT BÄTTRE LIV

# Antihalkmaterial för daglig aktivitet, träning & rehabilitering

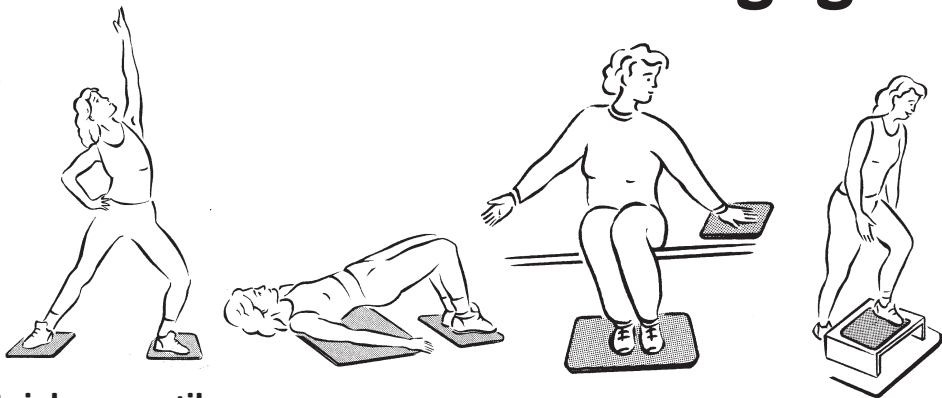


## I sjukgymnastiken

Sitt på en antihalkmatta och ha en under fötterna vid balansövningar och belastningsövningar.

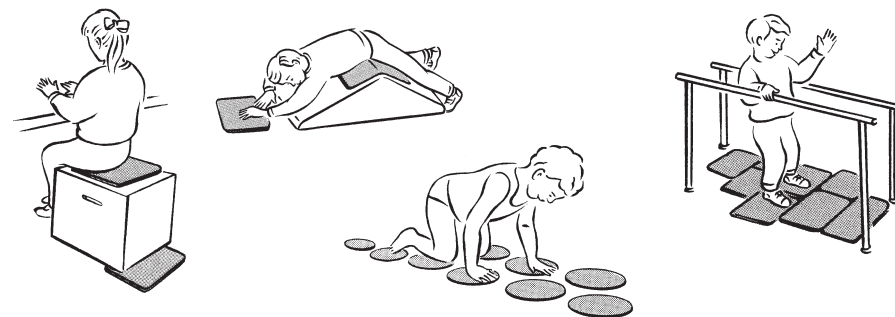


## Under rehabilitering

Materialet kan stabilisera både utrustningen och patienten. Läg ut underlägg som tränas blir tvungen att lyfta på fötterna från golvet.

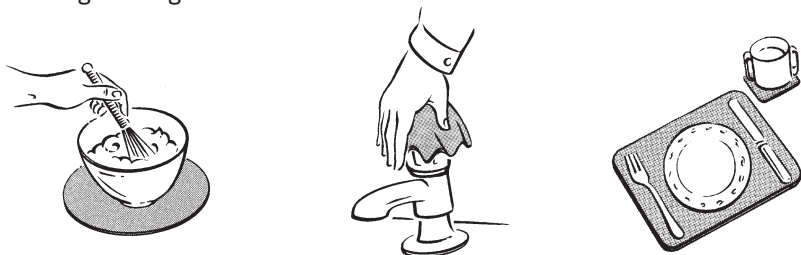

## I köket

En bit antihalkmaterial gör susen under skärbrädor och bunkar i köket. Även kärvande kranar och syltburkar kan öppnas utan större anstränging. Glas och tallrikar kan stå stadigt på matbordet.

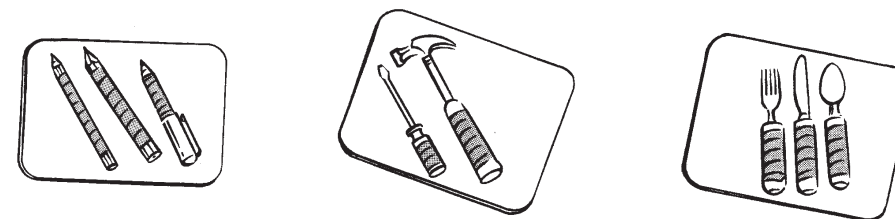


## Bättre grepp

Bestick och verktyg blir lättare att hålla om de viras några varv med remsor av antihalkduk. För det första så får man bättre friktion dessutom blir handtaget större och känslan i handen förstärks.



## På äldreboendet

En bit antihalk runt rollatorns, gångstödet eller kryckkäppens handtag bättrar på greppet avsevärt vilket gör förflyttningar säkrare.

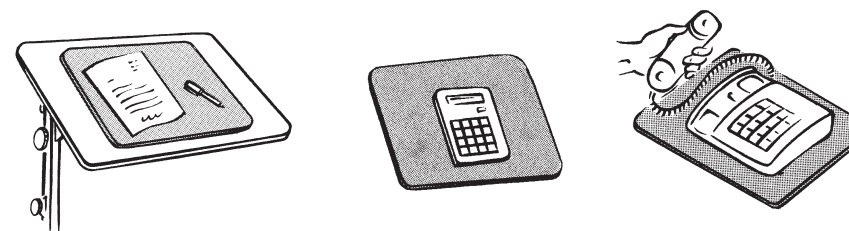

## På arbetsplatsen

Håller ordning och reda på skrivbordet och i hyllan. När man skriver eller ritat håller underlaget pappret på plats.