


HEA Monteringsset för bröstsele på Etac Cross

Anvisningar för montering och bruk för 3760A och 37612K

Art. nr: 3760A (Passar ETAC Cross), 37612K (Passar ETAC Cross, Panther)

ba_HEA_3760A_1609

Produktens syfte är att möjliggöra infästning av bröstselars axelband på rullstolar med låga ryggstöd eller som på annat sätt saknar lämpliga fästpunkter. Dessa anvisningar avser rullstolen Etac Cross, Cross Transit, Cross XL med ställbara körhandtag. För montering på Cross 5 som normalt har en T-profilskena som övre ryggstödsrör (Crossrygg 3A) används mutter med T-spår, bult M6x20 och bricka. Stolsbredden avgör artikelnumret för monteringssetsen.

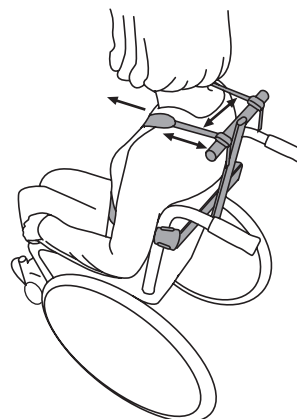

Stolsbredd	Crossrygg standard	För Crossrygg 3A
350 - 375 mm	Art.nr 3760A-32	
400 - 425 mm	Art.nr 3760A-37	
450 - 475 mm	Art.nr 3760A-42	Beställ Art.nr 37623 (nr 16 på sprängskissen)
500 - 525 mm	Art.nr 3760A-47	

Anvisningar för montering

Förteckning över delarna finns på nästa sida. Delarna är till stor del hopmonterade vid leverans. Slutmontering skall utföras av sakkunnig personal.

1. Kontrollera att stolens rygg är hel och rätt monterad.
2. Monteringsbeslagets sidoplattor fästs i reglagen för körhandtagen. Börja med att skruva ur den övre bulten och fäst sidoplattan med medföljande bult, bricka och mutter. Var noga med att brickorna kommer på utsidan av körhandtaget eftersom de fungerar som distanser. Skruva därefter ur den nedre bulten och slutmontera sidoplattan. Gör likadant på andra sidan. Se **bild 1**.
3. Fäst fast profilskenan med hjälp av snabblåsen. Se **bild 2**.
4. Sätt nackstödsstaget i fästet. Observera att nackstödsstaget inte ingår i satsen.
5. Montera horisontalröret på nackstödsstaget.
6. Kontrollera att alla skruvförband har dragits åt väl.
7. Kontrollera att produkten inte stör övriga funktioner.
8. Monteringsfästet är avtagbart med snabbåsen på varje sida. På snabblåset finns en rund låsknapp med ett korsande spår. Låsknappen kan vridas i två lägen, öppet och låst. Det görs med en liten mejsel eller liknande. Se **bild 3**.



I öppet läge kan monteringsfästet lossas genom att dra vävbandet bakåt.



I låst läge kan monteringsfästet lossas endast om låsknappen på båda sidorna trycks in samtidigt som vävbandet dras bakåt. Se **bild 4**.

WARNING: Låsknappen ska alltid lämnas i låst läge av säkerhetsskäl.

Anvisningar för anpassning

Utprovingen tillsammans med användaren skall göras av en fackutbildad person. Användaren skall vara bekant med stolen och ha sittdyna och eventuell ryggdyna som skall användas med bröstselen och monteringsfästet. Hea Monteringsfäste ger inte större belastning av ryggen än en annan montering av bröstsele eller nackstöd.

WARNING: Ett höftbälte skall alltid användas tillsammans med ett bröstbälte av säkerhetsskäl.

1. Välj förlängningsband (för åtdrag fram eller bak) och fäst dem i bröstselen.
2. Horisontalröret skall monteras så högt att förlängningsbanden löper i höjd med axlarna.
3. Horisontalröret ska vara så nära användarens rygg som möjligt – ju kortare band mellan skuldrans överdel och bandlåset på horisontalröret desto större stabilitet i sidled.
4. Avståndet mellan förlängningsbanden skall anpassas så att de dels inte skaver mot användarens hals, dels inte glider av axlarna.

WARNING: Av hållfasthetsskäl skall de medlevererade bandlåsen av metall inte ersättas med plastlås.

Bild 1



Crossrygg standard



Crossrygg 3A

Bild 2



Bild 3

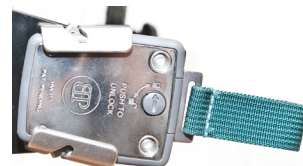


Bild 4



Förteckning över delar

ba_HEA_3760A_1609

Delarnas artikelnummer, benämning och ingående antal (styck). Endast en profilskena används.

Del	Art.nr	Benämning	Antal
1	37602	Sidoplatta för Cross-stol	2
2	HW311	Snabblås, låsblock och receiver	2
3	37606	Vinkelskena	2
4	37608-32	Profilskena 320 mm, för stolbredd 350 - 375 mm	x
5	37608-37	Profilskena 370 mm, för stolbredd 400 - 450 mm	x
6	37608-42	Profilskena 420 mm, för stolbredd 450 - 475 mm	x
7	37608-47	Profilskena 470 mm, för stolbredd 500 - 525 mm	x
8	37610	Fäste för stolpe 15x15mm, på profilskena, med ratt	1
9	37611	Bricka, tvåhåls för Stolpfäste	1
10	37612	Horisontalrör 22 mm, 15x15mm fäste, med ratt	1
11	HW303	Rörsvep 22 mm	2
12	FS134	Bandlås med lock	2
13	Q911	Förlängning övre band 50 cm, för Bodypoint bröstsele, åtdrag framifrån	2
14	37604	Stolpe 15x15cm, längd 45 cm	1
15	37621	Minnesring	1
16	37623	Monteringsset (4st T-mutter, brickor och M6x15 bult) för Etac Crossrygg 3A	1
17	37613	Bricka, tvåhåls, längd 50 mm c/c 30 mm	1




Art.nr Q911
För bröstselar med åtdrag framifrån. (Bröstselar med åtdrag bakifrån har släta bandändar som passar direkt i monteringssetet)


Art.nr 3760A-xx Monteringsset komplett för axelband

omfattar ovan listade delar förutom del 16 och som finns på bilden nedan. (xx står för längden på profilskenorna 4-7 i bilden).


Art.nr 37612K Monteringsset horisontalrör (För ETAC Cross och Panther)

Består av det övre horisontella röret med sina beslag och med förlängningsband (Q911). Delarna har nummer 10, 11, 12 och 13 på bilden. Det kan användas om man redan har en nackstödsstolpe (med eller utan nackstöd) som är fäst i stolen.

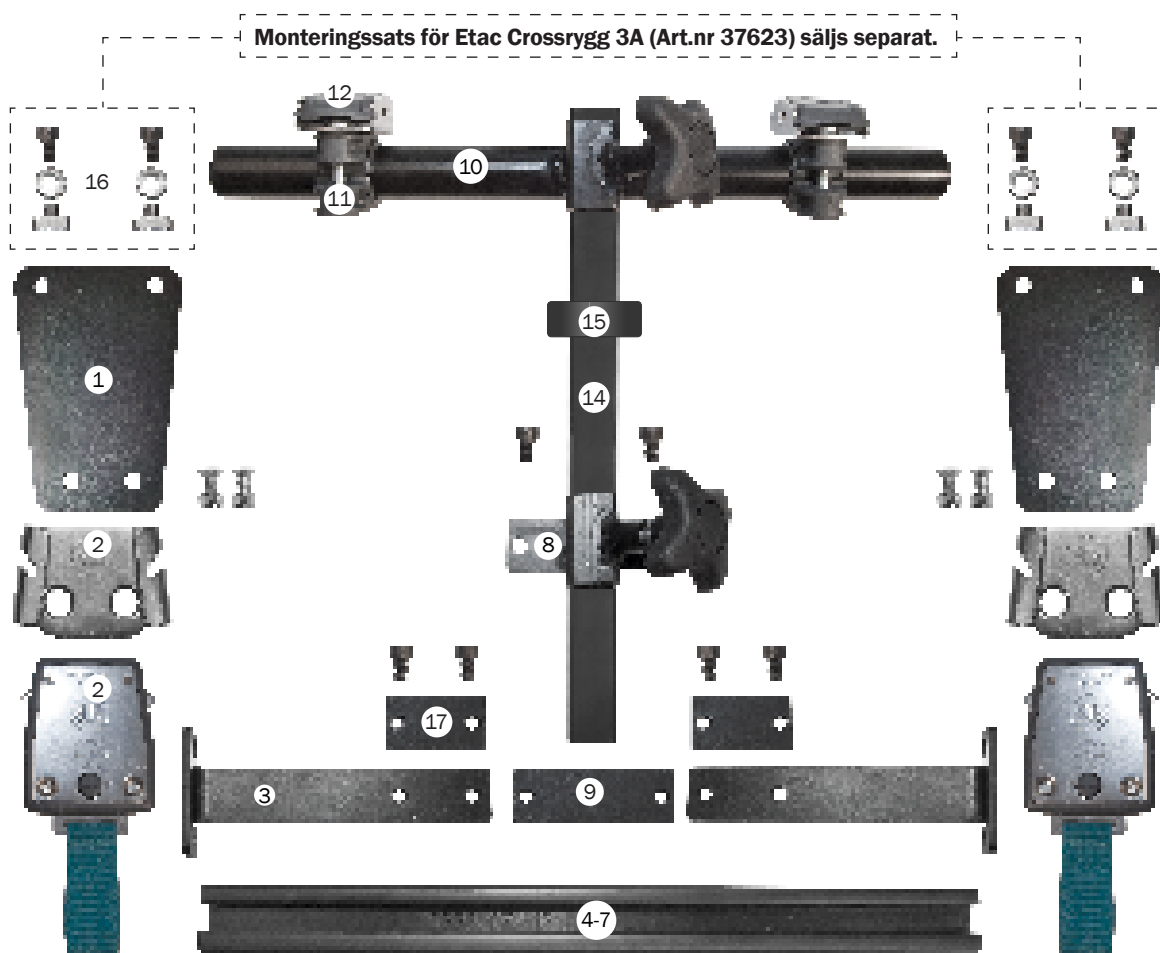

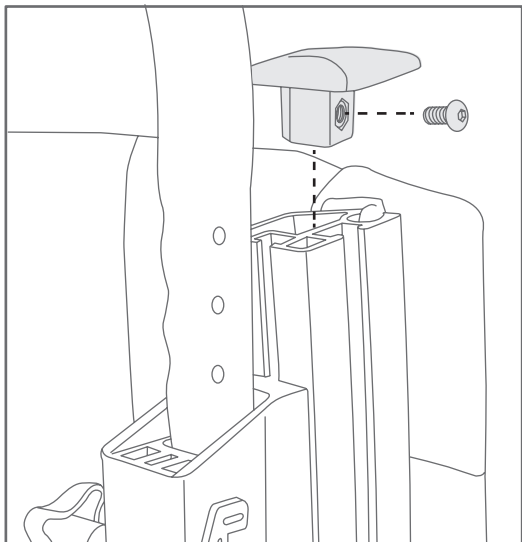

Ta av hatten från ramröret genom att först avlägsna skruven.

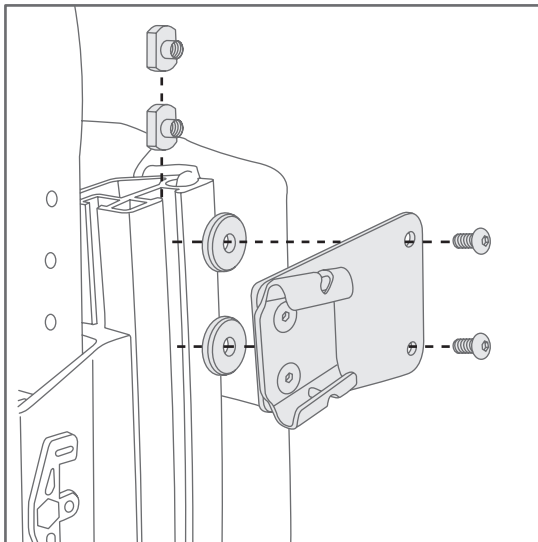

Dra skruvarna genom vinkelskenan därefter brickorna för att slutligen skruvas i T-muttrarna. Skjut ner T-muttrarna i stolsryggens profilskena. Dra åt skruvarna när vinkelskenan är i önskad höjd.

