

HEA Siesta läsbord

BRUKSANVISNING

ba_HEA_siesta_1401

Grundutförande:

En läsplatta, stativ och fotplatta.

Garanti


Tre år mot material- och tillverkningsfel.

Monteringsanvisning


- Lägg foten **A** på golvet.
- Ställ stativet **B** med den gängade tappen mot fotens hål.
- Skruva fast stativet medsols genom att använda ett dorn eller den medleverade spiken **C**. Dra åt hårt och ta bort spiken.
- Läsplattans **D** tapp trycks fast i tvärmens hål.

Som tillbehör finns stativförhöjare som skruvas in mellan mellan fotplatta och stativ och horisontalförlängare mellan stativet och läsplattan. Dessutom finns hjultillsatser som gör läsbordet lätt att flytta.

OBS! Bär inte läsbordet i den horisontella armen utan i det undre lodräta röret.

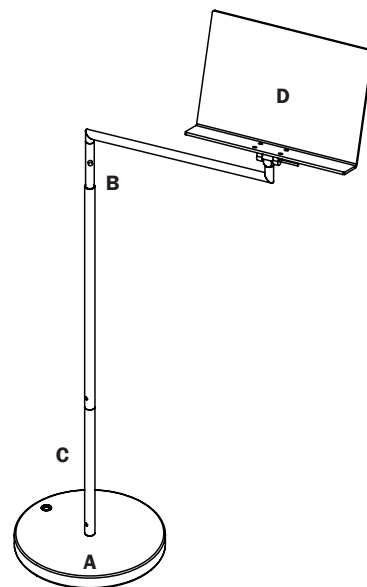

Så här använder du Siesta:

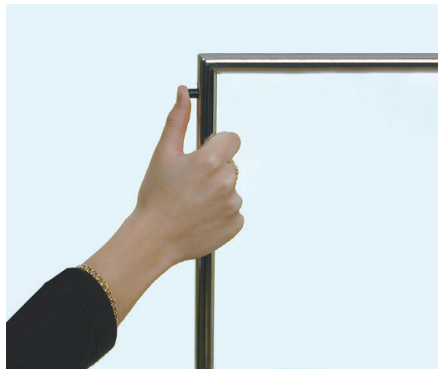

Ändra höjden med bara en hand:

Tryck på knappen, sänk eller höj, släpp knappen. Klart!



Ändra läsplattans lutning med en hand:

Tryck metallpinnen åt sidan (vilken sida som helst) - luta plattan till en ny vinkel - släpp pinnen - klart.



Bläddra lätt:

När man läser i sängen skall boken ligga med texten nedåt. Man läser alltså genom plexiglaskivan. För att bläddra lutar man boken bakåt med en hand och bläddrar fram ett blad med den andra handen.