

# E-rör, fäste för bröstsele med åtdrag framifrån på rullstol

## Anvisningar för montering och bruk för 37612K och 37619K

Art. nr: 37612K

Passar: ETAC Cross och ETAC Panther

Art. nr: 37619K

Passar: Rea: Azalea, Assist, Bellis, Comfort, Dahlia, Focus Spirea2 och Spirea4NG  
HD: Balance 16, Balance 24, 500, 600, 650, Humlan 500 & 650, 500 & 600 Barn  
Handicare: Emineo & Cirrus

ba\_HEA\_37612K\_37612K\_1609

Produktens syfte är att möjliggöra infästning av bröstselars axelband på rullstolar med låga ryggstöd eller som på annat sätt saknar lämpliga fästpunkter.

### Delar som ingår i E-rör 37612K



Del	Art.nr	Benämning	Antal
1	37612	Horisontalrör 22 mm, 15x15 mm stolpfäste med ratt	1
2	HW303	Rörsvep 22 mm	2
3	FS134	Bandlås med lock	2

### Delar som ingår i E-rör 37619K



Del	Art.nr	Benämning	Antal
1	37619	Horisontalrör 22 mm, plattovalt stolpfäste med ratt	1
2	HW303	Rörsvep 22 mm	2
3	FS134	Bandlås med lock	2

### Anvisningar för montering


Delarna är hopmonterade vid leverans. Slutmontering skall utföras av sakkunnig personal.

1. Kontrollera att stolens rygg är hel och rätt monterad.
2. Montera e-röret på nackstödsstolpen
3. Kontrollera att alla skruvförband har dragits åt väl.
4. Kontrollera att produkten inte stör övriga funktioner.

### Anvisningar för anpassning

Utprovningen tillsammans med användaren skall göras av en fackutbildad person. Användaren skall vara bekant med stolen och ha sittdyna och eventuell ryggdyna som skall användas med bröstselen och e-röret.

1. E-röret skall monteras så högt att selbanden löper i höjd med axlarna.
2. E-röret ska vara så nära användarens rygg som möjligt. – ju kortare band mellan skuldrans överdel och bandlåset på E-röret desto större stabilitet i sidled.
3. Avståndet mellan förlängningsbanden skall anpassas så att de varken skaver mot användarens hals eller glider av axlarna.

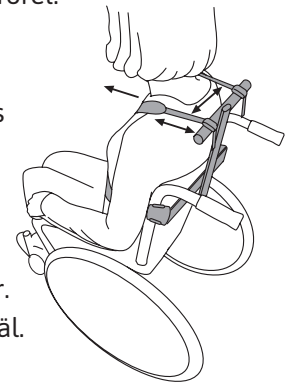

**WARNING!** De medlevererade bandlåsen av metall får inte ersättas med plastlås, fixklämmor.

**WARNING!** Ett höftbälte skall alltid användas tillsammans med ett bröstbälte av säkerhetsskäl.

### OBS! Stolpe ingår ej

Använd den plattovala nackstödsstolpen (Rea: Azalea, Assist, Bellis, Comfort, Dahlia, Focus Spirea2 och Spirea4NG. HD: Balance 16, Balance 24, 500, 600, 650, Humlan 500 & 650, 500 & 600 Barn. Handicare: Emineo & Cirrus)

Använd nackstödsstolpen, 15x15 mm (ETAC Cross och ETAC Panther).



Tillverkare: HEA Medical AB

HEA Medical AB

Norra Ågatan 10

416 64 Göteborg

031-15 73 20

info@heamedical.se

www.heamedical.se



ETT BÄTTRE LIV