


Handtag för manöverboxar

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Art. nr: PC101-, PC102-, PC103-, PC104-, PC107-, PC108- & PC109-

BP1025 2012.1

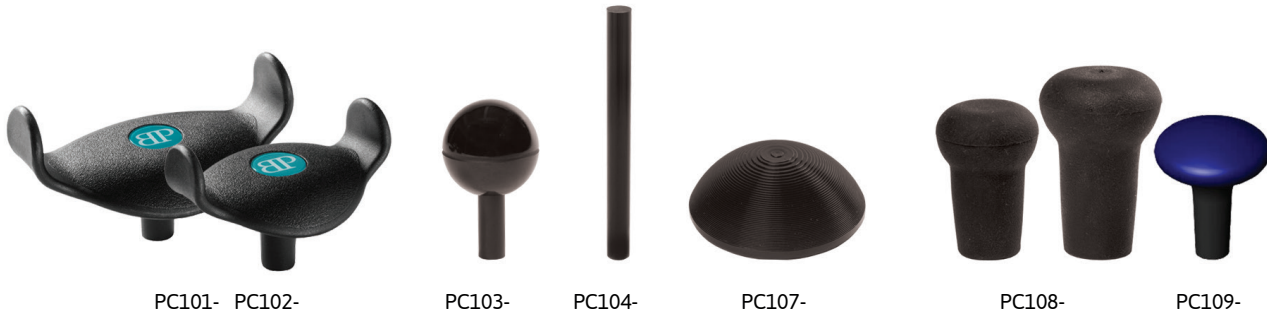

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 1 st Joystickhandtag

Handtagen från Bodypoint är böjbara (lätt fjädrande) och lossnar från manöverboxens handtagsaxel (boxens metallpinne) om de dras uppåt med för stor kraft. Det U-formade (Klykan) handtaget kan också rotera. Dessa egenskaper är till för att undvika skador på körboxen och vi rekommenderar att de inte ändras.

Alla handtag finns för två diametrar på körboxens stålpinne: 5 mm och 6 mm

Monteringsanvisning:

1. Rengör manöverboxens axel från smuts och olja.
2. Fukta axeln för att underlätta monteringen av handtaget.
3. Håll fast körboxens axel vid dess bas med en tång så att den inte kan tryckas ner i körboxens känsliga delar.
4. Tryck fast körhandtaget på spaken med en roterande rörelse.

Garanti

Alla Bodypoints produkter har en villkorslös garanti mot fel i tillverkning och material. Varor som visat sig vara undermåliga repareras eller ersätts med nya enligt Bodypoints val.



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

