


Fästordning för tröskelramper

Bruksanvisning



Art. nr: 306910

ba_HEA_fästordning_för_tröskelramp_1702

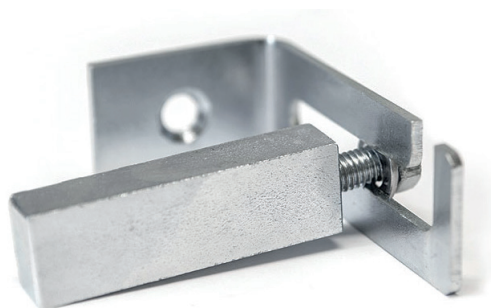

Förpackningens innehåll

2 st Monteringsfästen
2 st Bultar

Användning

Fixera ramper utan att använda lim genom att skruva fast ett monteringsfäste i tröskeln med en skruv. Fästen består av monteringsfäste och bultar som passar till tröskelramper med höjd 28-48 mm.



1. Skruva fast fästet i tröskeln med en träskruv.
2. Haka på bulten i fästet och dra åt bulten.