

Säkerhetsband till HEA Sittsele

BRUKSANVISNING

Art. nr: 3754

ba_he_a_säkbandsits_1312



Är avsedd för →




Säkerhetsband till Sittsele består av två lika band, ett märkt med HEAs logotype och med artikelnumret 3754.


Banden används för att förhindra att användaren öppnar Sittselen och reser sig från stolen, som får vara en rullstol eller fåtölj. Säkerhetsbanden är CE-märkta för användning tillsammans med HEA Sittsele, art nr 3750.

Montering

HEA Sittsele skall först vara korrekt monterad. Därefter träs banden genom slejfnas öglor, se bild!
Drag säkerhetsbanden bakom ryggen på den sittande.

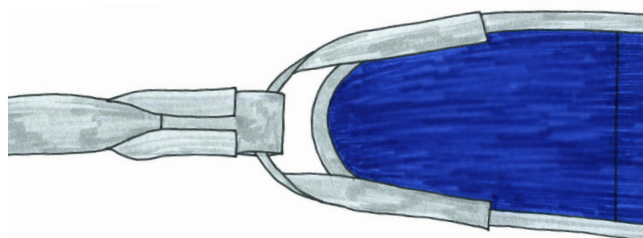

VIKTIGT! De skall dras lågt och de skall inte kunna glida upp. De bör passera ut bakom stolen nära det ställe där sitsyta och ryggyta möts. Lås ihop banden med det monterade sticklåset. Kontrollera att banden är väl sträckta.

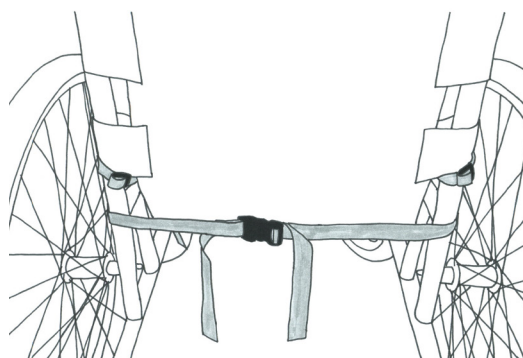

CE