


Pivotfit Bröstsele med åtdrag framifrån

ANVISNINGAR FÖR MONTERING OCH BRUK

Art.nr SH250 & SH270

BP1099-sv 2015.2

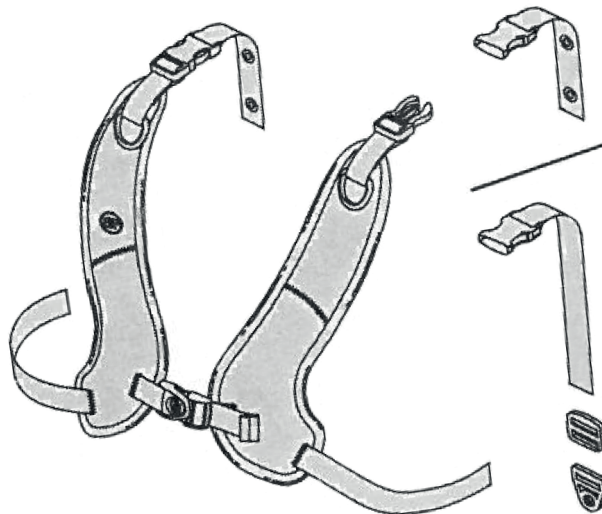

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

- Pivotfit Bröstsele med åtdrag framifrån
- Övre band med öljetter, eller Övre band med sölja och trekant
- Monteringsdelar: Bandlås med lock eller Trekant och sölja.
- Bandlås av plast - endast för selar med åtdrag bakifrån (art.nr FS032)

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla Bodypoint Pivotfit Bröstselar. Ge dem till användaren eller vårdarna och kontrollera att de är förstådda.

WARNING! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

WARNING! På grund av risk för kvävning är det farligt att använda produkten utan att stabilisera bäckenet. Använd den alltid med ett riktigt utprovat höftbälte.

ANVÄNDNING

WARNING! Denna produkten får endast användas för att säkert placera en person i en rullstol. Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

WARNING! Om Bröstselen öppnas av misstag kan brukaren falla framåt. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till att selen öppnas oavsiktligt måste en vårdare alltid vara närvarande när selen används. Kontrollera att all vårdpersonal vet hur selen öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.


WARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära trycktytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, som t. ex. trycksår.

UNDERHÅLL: Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, remmar och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person - hälsa och säkerhet står på spel!

RENGÖRING: Maskintvätt, 40°C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller droptorka. Får ej strykas. Om produkten placeras i en tvättpåse undviker man skador på produkten och maskinen.


GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkningen och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör i garantiärenden.

För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även på www.bodypoint.com som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.

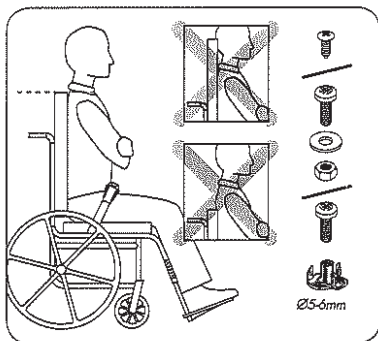

Installationskrav


1. Rullstol med ett stadigt ryggstöd i unge-färlig axelhöjd.
2. Monteringskruvar med en dragstyrka på minst 90kg. Medföljer inte i förpackningen

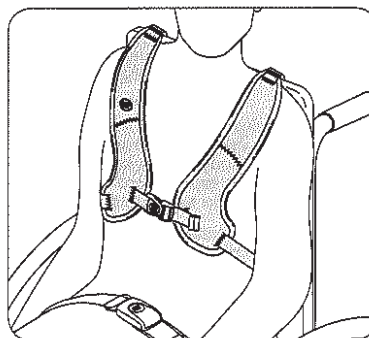

Montering


Placera brukaren i stolen och finn en bra sittställning med användning av ett höftbälte. Läggt Pivotfit Bröstselen över kroppen och drag de övre banden mot ryggstödet.

OBS! Det tvärgående bröstbandet skall aldrig vara över användarens bröstben

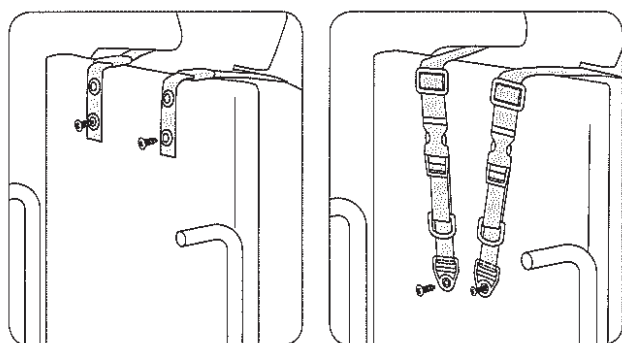


Axelbanden

1. Justera varje axelband så att brukaren finner det bekvämt med hänsyn till axelbredd och sittställning. Märk upp skruvarnas placering för att bibehålla den valda sittställningen.
2. Fäst banden på ryggstödet eller motsvarande med lämpliga beslag

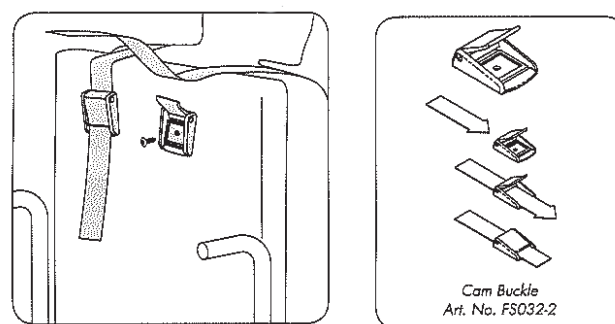


Direktmontering

Gäller endast selar med åtdrag bakifrån. Ta bort de övre banden vid fix-spännena. Befria selbandet från plastspännnet. Montera bandlåsen av plast på ryggstödet med lämpliga fästansordningar. Trä banden genom låsen. Lämpligt för personvikt upp till 75kg.

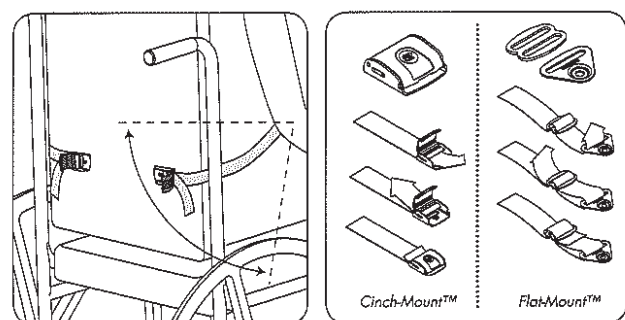

Nedre selband

Lägg de nedre banden runt ryggstödet och se till att de inte kommer ivägen för andra anordningar på stolen. Montera fästbeslagen mellan bäckenets övre del och sitsen. Använd lämpliga fästansordningar.

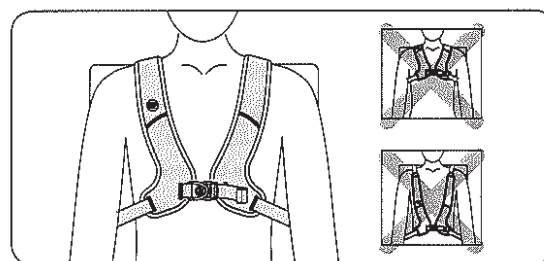

Säkerhetskontroll

När användaren är korrekt placerad i rullstolen, kontrollera passningen genom att låta användaren luta sig framåt och åt sidorna.

Kontrollera:

1. Att spännnet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komforten. Axelbanden får inte skava mot halsen.
3. Placeringen. Omdet finns störningar i anslutning till andra anordningar. Placera om banden efter behov för att frigöra sitsinställningar, armstöd, extra dynor, ventrikelsonder m.m.



MOSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany