

Levabo heelup Bruksanvisning


Art. nr: 277001, 277002, 277003

ba_heelupp 2017_4

Manuell uppblåsning



Öppna ventilen.

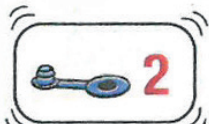

Blås upp kudden till 3/4.




Stäng ventilen.

Viktigt!



Kudden får inte vara för hårt eller för löst uppumpad. Den måste vara mjuk och eftergivande för optimal positionering.

Uppblåsning med handpump (Art.nr 277101)

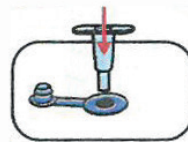

Sätt i adapter i ventilöppning. Vrid och pressa ned adaptern i ventilen tills den sitter fast. Pressa endast adapterns yttersta "rör" ned i ventilen!



Pumpa upp kudden till 3/4. För bort adaptern ur ventilen.



Stäng ventilen.

Justering med handpump



Ta ur luft till lagom höjd med adaptern.

Användning

Kan användas av en patient i upp till fyra veckor.

Rengöring

Maskintvätt, 40°C. Kan spritas. Torktumla ej.