



# TIPS & TRICKS TRÖSKELRAMPER




För att kapa en gummiramp. Använd lite pumptvål eller diskmedel på knivbladet. Du kan skära med en vanlig brytbladskniv.

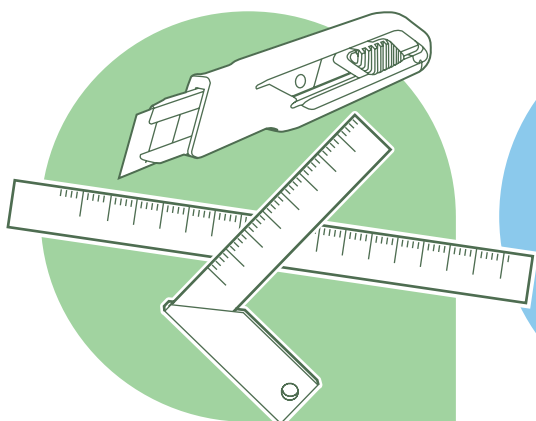

För ett rakt snitt, använd en brytbladskniv, vinkelhake eller en ställinjal mot hårt underlag, som en skärbräda. Använd handskar för att undvika skador.

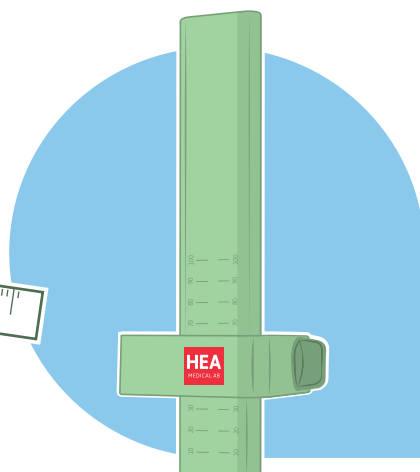


Vi har ett mätverktyg för trösklar. Ett tips i gamla hus är att mäta tröskeln både i mitten och på sidorna för att välja bästa höjd på rampen.

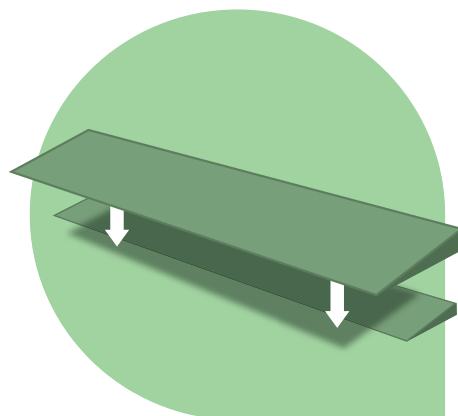


Lägg den tunnaste gummirampen underst när du önskar bygga upp nivån med två ramper.



Lätt att ta bort, rengöra och återanvända. Alltså en smart och billig problemlösare. Faktiskt det enklaste sättet att jämna ut hinder i hemmet.

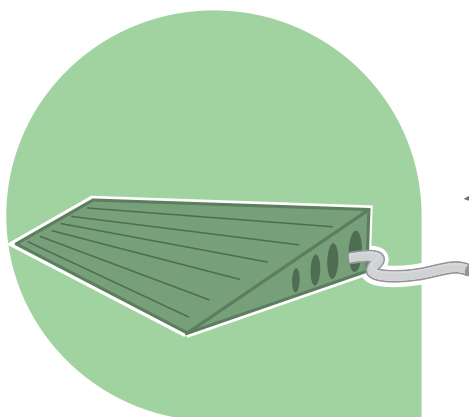

Från 28 mm hög ramp kan du dra datasladdar, el- och högtalarkablar genom gummirampens kanaler.

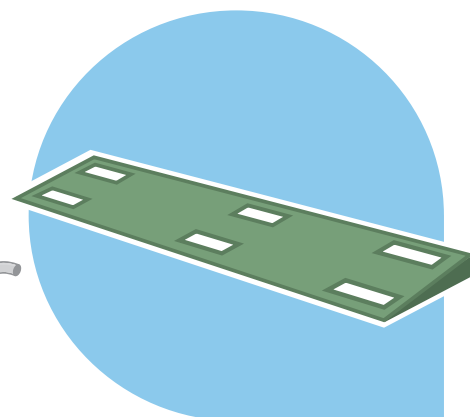

Ramperna finns både med och utan tejpbacksida. Tejp kan beställas separat i bitar om 4 eller 8 tejpbitar eller som rulle. Det räcker med en bit tejp vid varje 15-20 cm. Rengör både rampen och underlaget innan du tejpjar.