
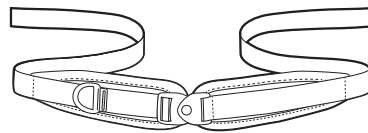


Höftbälte

BRUKSANVISNING, INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Art. nr: HB2-, HB4-, LB2-, LB4-, NB2-, NB4-, SB2-

BPI005-sv 2021.11

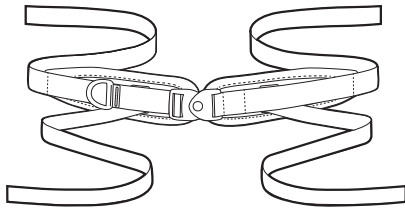

Denna bruksanvisning innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla höftbälten från Bodypoint. Ge anvisningarna till användaren eller assistent/vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.

WARNING! Produkten ska installeras och provas ut av kvalificerad personal.

Vid installation ska produkten monteras med något av följande:

- Flat-Mount™ (Trekant & sölja)-ändbeslag
- Cinch-Mount™ (Bandlås med lock)-ändbeslag
- Bandlås plast (1" lämpligt för användare upp till 75 kg, 1-1/2" och 2" lämpligt för alla användare)

Alternativ utrustning för montering av bälten och selar från Bodypoint kan också användas för montering på rullstolar och sittsystem.

ANVÄNDNING:

WARNING! Den här produkten får endast användas för att säkert placera en person i en rullstol eller arbetsstol. Den är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

WARNING! Höftbältet måste alltid vara ordentligt fäst över bäckenet eller lären. Låt en fackman demonstrera korrekt justering och användning.

- Med ett för löst fastsatt bälte kan användaren glida ner och det kan innebära risk för strypning.
- Om höftbältet frigörs av misstag kan användaren glida ner eller falla ur rullstolen.
- Om användaren inte kan ta sig loss på egen hand kan det vara farligt om användaren glider ner eller sitter fast i stolen vid en nödsituation

Om användarens fysiska eller kognitiva förmåga förhindrar hen från att använda bältet måste en vårdgivare alltid vara närvarande när bältet används. Säkerställ att all vårdpersonal vet hur man korrekt drar åt och lossar produkten.

WARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära trycktytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, som t. ex. trycksår.

REGELBUNDNA SÄKERHETS- OCH FUNKTIONSKONTROLLER:

För att säkerställa användarens säkerhet måste produkten kontrolleras regelbundet avseende funktion och tecken på slitage. Om produkten inte fungerar korrekt eller om avsevärt slitage upptäcks på spännen, fästpunkter, remmar, dynor eller sömmar ska du sluta använda produkten och kontakta din återförsäljare för att låta Bodypoint utföra kvalificerade reparationer eller byten. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person — hälsa och säkerhet står på spel!

RENGÖRING: Maskintvätt, 60 °C. Blek inte. Torktumla vid låg temperatur eller dropptorka. Får ej strykas. (Om produkten placeras i en tvättpåse under tvätten undviker man skador på produkten och på maskinen.)

SKROTNING/KASSERING: Produkten lämnas til kommunal avfallshantering.

GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din återförsäljare eller Bodypoint i garantiärenden.

Mer information om Bodypoints produkter och en lista med distributörer utanför USA finns på www.bodypoint.com.




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany




HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se



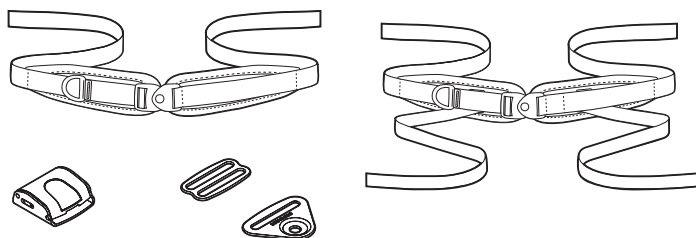


FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Tvåpunkts- eller fyrapunkts höftbälte
- Sats med ändbeslag: Flat-Mount™ (Trekant & sölja) eller Cinch-Mount™ (Bandlås med lock)
- FrameSaver™ (Rörsvep)-(tillval)

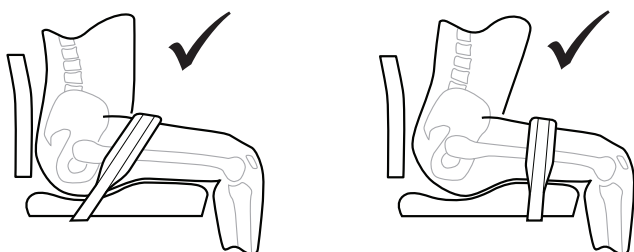


INSTALLATION: TVÅPUNKTSHÖFTBÄLTEN

1. Fastställ den effektivaste positionen och vinkeln för bältet utifrån kliniska mål. Bestäm om det är bäst för användaren att sätta åtdraget åt vänster eller höger.
2. Lokalisera önskade monteringspunkter på sittsystemet eller rullstolsramen.
3. Fäst ändbeslagen i rullstolsramen eller i stolens sits. Eller använd fästdetaljer som Bodypoint erbjuder som tillbehör.
4. Centra bältet på användaren, trä ändarna på banden genom ändbeslagen och justera till önskad längd.
5. Dra åt bältet tills det sitter åt ordentligt.

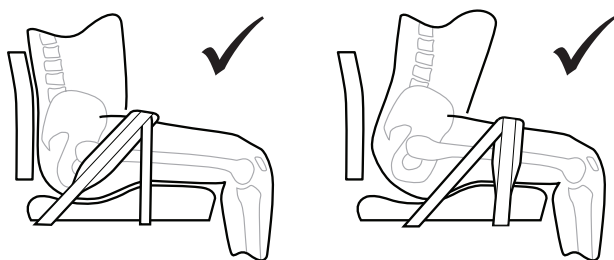


INSTALLATION: FYRAPUNKTSHÖFTBÄLTEN

1. Följ anvisningarna ovan för att montera och installera bältet som ger användaren en stabil och bra positionering.
2. Fäst de sekundära banden i rullstolen för att förhindra att bältet flyttar på sig.

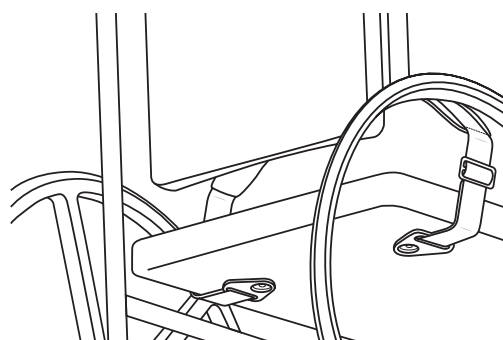


MONTERING SITSPLATTA ALTERNATIV

Ändbeslag kan monteras direkt på fasta stolsytor. Monteringskruvarna skall ha en dragstyrka på minst 90 kg/200 lbs. (Medföljer inte i förpackningen.)

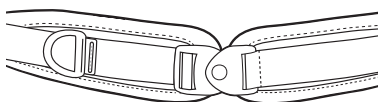

JUSTERING

När bältet är ordentligt justerat och åtdraget, ska det sitta tight, utan slack, så att användaren sitter säkert. Använd åtdraget för att göra dagliga justeringar, till exempel för att passa olika kläder. Om längden behöver justeras ytterligare för att få god passform, eller om bältet behöver tas bort för att rengöras, kan detta göras med hjälp av ändbeslagen.

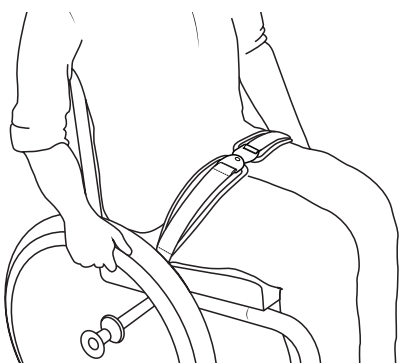

SÄKERHETSKONTROLL

När användaren är korrekt placerad i rullstolen ska du kontrollera passformen genom att låta användaren luta sig framåt och åt sidorna. Kontrollera:

1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komfort – sök efter områden som kan bli irriterade.
3. Position – om bältet sitter för högt eller lågt, justera fästpunkterna.
4. Prova stolens alla rörelsemöjligheter fullt ut, inklusive ryggfällning, tiltning, hopfällning och körning. Kontrollera om något sitter i vägen och flytta fästpunkterna vid behov.

