


Aeromesh® Rapid-Dry Duschbälte med Sidospännen

ANVISNINGAR FÖR MONTERING OCH BRUK

ART NOS. BB111 & BB112

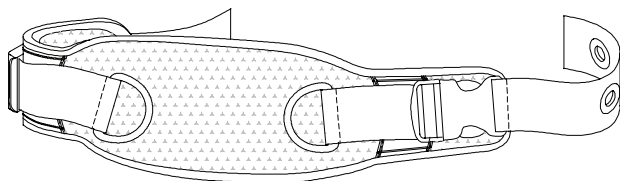

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla Bodypoint Aeromesh® Rapid-Dry Duschbälten med sidospännen. Ge dem till användaren eller vårdarna och kontrollera att de är förstådda.

⚠️ WARNING! På grund av risk för kvävning är det farligt att använda ett bröstbälte utan att stabilisera bäckenet. Använd alltid med ett riktigt utprovat höftbälte eller lår/knåbälte.

Ytterligare fästmetoder kan användas. Produkten ska installeras av kvalificerad personal.

AVSEDD ANVÄNDNING:

⚠️ WARNING! Används endast för att placera en person i en hygien/duschstol. Använd INTE denna produkt som en säkerhetsanordning vid transport, eller för fasthållning av en person eller på något annat sätt där felaktig användning kan leda till skada.

⚠️ WARNING! Detta positioneringsbälte måste sitta korrekt för att hålla upp användarens kropp utan att orsaka skada. Låt en fackman demonstrera korrekt justering och användning.

- Om det sitter för hårt kan det påverka andningen och öka trycket.
- Om det sitter för löst kan användaren glida ned och det kan finnas risk för strypning.
- Om produkten öppnas oavsiktligt kan användaren falla framåt eller falla ner från dusch-/toalettstolen.
- Om användaren inte kan ta sig loss på egen hand kan det vara farligt om användaren glider ner eller sitter fast i dusch-/toalettstolen vid en nödsituation.

Om användarens fysiska eller kognitiva förmåga kan förhindra hen från att använda produkten måste en vårdgivare alltid vara närvarande när den används. Säkerställ att alla vårdgivare vet hur produkten justeras och lossas korrekt.

⚠️ WARNING! Om en allvarlig incident inträffar i samband med användningen av denna produkt ska den rapporteras till tillverkaren (Bodypoint, Inc.) och den lokala tillsynsmyndigheten.

REGLBUNDNA SÄKERHETS- OCH FUNKTIONS-

KONTROLLER: För att säkerställa användarens säkerhet måste produkten kontrolleras regelbundet avseende funktion och tecken på slitage. Om produkten inte fungerar korrekt eller om avsevärt slitage upptäcks på spännen, fästpunkter, remmar, dynor eller sömmar ska du sluta använda produkten och kontakta din återförsäljare för att låta Bodypoint utföra kvalificerade reparationer eller byten. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person — hälsa och säkerhet står på spel!

🧺🧼🧴🧻 NORMAL RENGÖRING: Maskintvätta i vatten 60°C (140°F). Använd inte blekmedel. Häng-torka eller torktumla utan värme.

SKROTNING/KASSERING: Produkten är tillverkad av material som kan kasseras på ett säkert sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder i slutet av dess livslängd.



GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantirendens.

För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även på www.bodypoint.com som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands



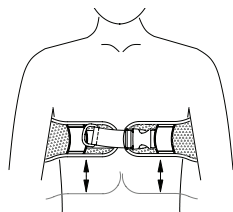
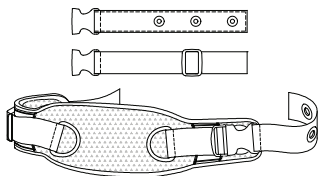


FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER EN ELLER FLERA AV FÖLJANDE DELAR:

- Aeromesh® Rapid-Dry Duschbälte med sidospännen
- Fästband med öljetter eller
- Fästband släta, med söljor
- Tillval: Rörlämmor (Art. No. HW310), Rörsvep (Art. No. HW320), Låsraff (Art. No. FA812-BP)

POSITIONERING

Placera användaren på dusch/toalettstolen och finn en god sittställning. Bestäm bältets placering. Tag hänsyn till andra tillbehör. För att undvika risk för strypling och bälinstabilitet skall bältet varken sitta för högt eller för lågt.

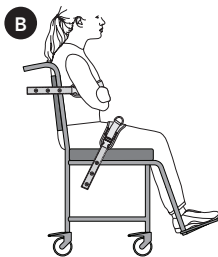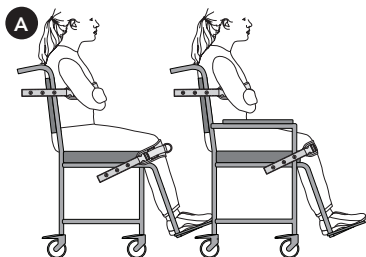

MONTERINGSFÖRSLAG




A Över bröstkorgen, Vid knä (att föredraga)

Lokalisera ett passande monteringsställe på stolen med hänsyn till användarens behov. Bältet bör placeras enligt någon av de visade lägena.

B Över lår (Valfritt)

C Stolar med sits som kan tipsas

Bältet måste monteras på den övre ramen, ovanför vridpunkten. Bälte som monteras under vridpunkten kan orsaka störningar och få ändrad sträckning.

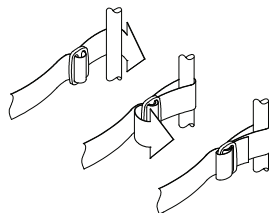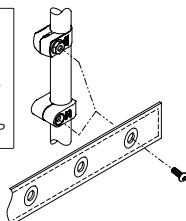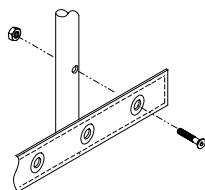

INSTALLATION


Montering enbart med skruv

Om bältet monteras direkt på stolens ram eller en fast sits/rygg skall 6mm (1/4-20) skruv med flat eller kupad skalle användas. Skruven skall klara en belastning på minst 90kg (200lbs). Är inte medlevererad.

Rörlämmor eller Rörsvep stål

Fäst klämmorna på stolen på valda platser och drag åt förbanden. Stick skruv nummer två genom en öljett på bältet och in i klämma. Drag åt väl.

Montering med släta fästband och söljor

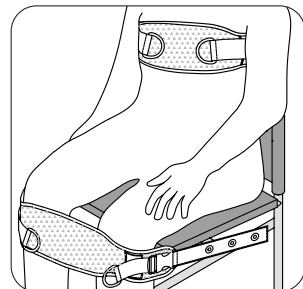

JUSTERING

Kontrollera att bältet sitter bra när brukaren har rätt kroppsåläge. Det skall vara ganska väl åtdraget så att användaren är säker. Små justeringar görs med åtdragsbanden som har D-ringar. Stora justeringar görs med fästbanden med öljetter.

SÄKERHETSKONTROLL:

När användaren är korrekt placerad i stolen, lät denne luta sig framåt och åt sidorna. Kontrollera:

1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komforten – om skavning kan uppstå, placera om banden.
3. Placeringen – om det är för högt eller lågt, placera om banden.
4. Om det finns störningar i anslutning till andra anordningar. Placera om banden efter behov.
5. Utför alla möjliga omställningar av stolen, inklusive tiltning av sitsen, hopfällning och körning. Kontrollera att allt fungerar som avsett.