


Höftbälte Evoflex BRUKSANVISNING

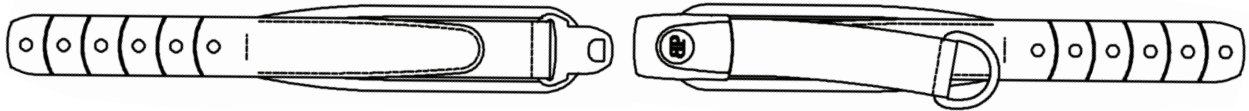

Art. nr: EB205, EB225, EB235

ba_bp_evoflex_1204



Förpackningens Innehåll:

- Bälte Evoflex
- M6x8 skruv
- M6 mutter med låg profil

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av Bodypoints höftbälte Evoflex. Ge anvisningarna till användaren eller assistent/vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.

Varning! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

ANVÄNDNING

Varning! Denna produkt får endast användas för att säkert placera en person i en rullstol. Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

Varning! Detta höftbälte skall alltid användas väl åtdraget över bäckenets nedre del eller över låren. Ett för löst bälte kan medföra att brukaren glider nedåt i stolen som kan ge risk för strypning. Låt en sittspecialist visa hur bältet anpassas och används.


Varning! Om höftbältet frigörs av misstag kan användaren glida ner och falla ur rullstolen. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigörning, måste en vårdare alltid vara närvarande när det används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

Varning! Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användare måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära tryckytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, som trycksår.

Underhåll: Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, remmar och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person – hälsa och säkerhet står på spel!

Rengöring: Maskintvätt, 60°C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller droptorka. Får ej strykas. (Om produkten placeras i en tvättpåse under tvätten undviker man skador på produkten och på maskinen.)


Garanti: Produkten har en livtidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden. Mer information om denna och andra

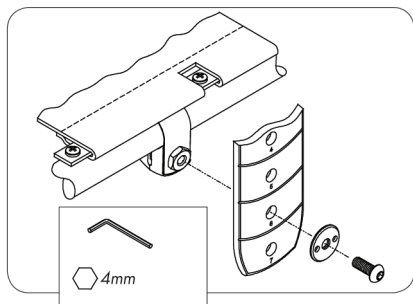

Montering med bandklämmor


(Kräver Art.nr HW320)

Fäst bandklämman på sitsröret med hjälp av den M6x12 skruv som medföljer HW320.

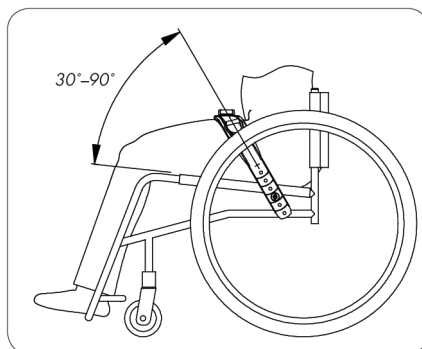


Bältets position

Bältets vinkel bör vara mellan 30°-90° från sitsen beroende på användarens behov. Bestäm med bältet helt åtdraget den bästa bältesplaceringen. Märk ut önskade fästpunkter och välj någon av följande fästmetoder.

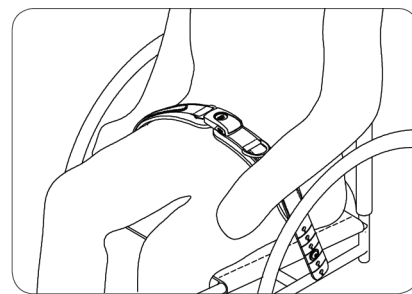


Justering

När bältet är korrekt inställt och fullt åtdraget ska det sitta väl åtdraget och säkra bäckenet. Dra i D-ringen så att dynorna under spännet kommer i kontakt med varandra. Längdjustering i efterhand eller borttagning av bälte (för rengöring) görs vid bältets fästpunkter.

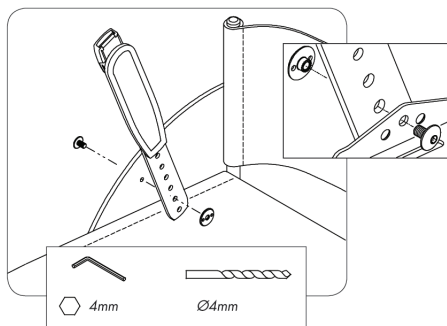

Montering på sidoskydd

Borra 6mm hål eller använd befintligt hål / slits för att fästa bältet med medföljande fästdetaljer.

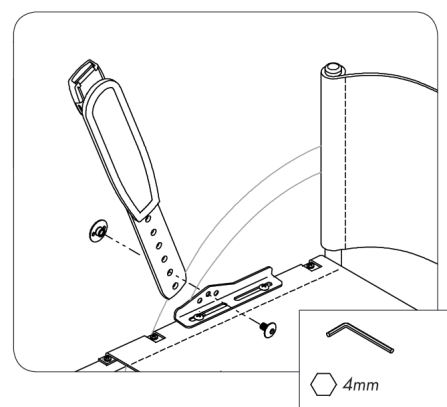

Montering på sitsrör

(Kräver Art.nr HW312-KIT)

Fäst monteringsbeslaget på rullstolsröret. Montera bältet med fästarrordning genom det mittersta hålet i HW312.

Säkerhetskontroll

När användaren är korrekt placerad i rullstolen, kontrollera passningen genom att användaren lutar sig framåt och åt sidorna.

Kontrollera:

1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komfort - Sök efter områden som kan bli irriterade.
3. Position - Om bältet sitter för högt eller lågt, justera fästpunkterna.
4. Samverkan med annan utrustning
Flytta fästpunkter vid behov.
5. Prova stolens alla rörelsemöjligheter fullt ut, inklusive ryggfällning, tiltning, hopfällning och körning. Sök besvärande moment.

HEA Medical AB

Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

