

# Action rullstolsdynor & sängdynor Bruksanvisning

Art.nr A51-, A52-, A541818, A561818, A6100, A6400, A68-, A85-, A90-, ACU-, ACOM-, AXC-, AXS-

ba-action-2021\_06

## Allmän bruksanvisning för produkten

Viktigt! Läs denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.

- Produkten bör inte lämnas oskyddad i solljus
- Undvik vassa föremål som kan skada produktens filmyta
- Rengör i enlighet med rengöringsinstruktionerna, se "Rengöring"
- Action®-produkterna är latexfria.
- Ingredienserna i Akton kan avge en doft som är ofarlig.

## Riskbedömning

Med Action® underlag och god omvårdnad (såsom regelbunden vändning av patienten) kan man avsevärt minska risker för trycksador hos en patient som inte har förmåga att röra sig, t.ex. i samband med en operation. Att en patient blir utsatt för tryck kan bero på många olika saker, t.ex. allmänkondition, blodcirkulation, diabetes, ålder, vikt, medicinering osv. Rådfråga en läkare, sjukgymnast eller hälsorådgivare om åtgärder för minskande av trycksårsrisk.

Alla överdrag är godkända enligt ISO 7176-16:1997 och även enligt California Technical Bulletin 133 (Cal TB 133).

## INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK

- Tag ut dynan ur förpackningen.
- Läs denna bruksanvisning noggrant.
- Rengör dynan innan den tas i bruk, se "Rengöring"

## ALLMÄNT OM PRODUKTENS ANVÄNDANDE

Alla Actionprodukter

- Förvara och använd Action® produkter vågrätt, utan att vika dem. Större dynor kan förvaras hoprullade.
- Lyft inte dynorna vid hörnen eller kanterna.
- Transportera dynorna hoprullade eller löst vikta. På detta sätt undviks tånjning och andra skador på ytfilmen.
- Då dynorna inte är i bruk bör de förvaras torrt, skyddade för solljus, vågrätt och ovikta.
- Se till att det i förvaringsutrymmet inte finns vassa föremål som kan skada dynans ytfilm.

## Action sängdynor

- Vi rekommenderar att användaren ligger direkt på dynan varvid det bästa resultatet uppnås.
- Patienter med utpräglad svettning kan använda ett 100% bomullslakan som är ostärkt.
- Placera lakanet löst på dynan. Jämna ut eventuella skrynklor och veck innan patienten placeras på dynan.
- Dynor med kardborrefästen skall sättas vid sängen innan dynan tas i bruk.

## Överdrag (Standard (Basic) och Inkontinensöverdrag)

- Avlägsna inte rullstolsdynans plastskydd som omsluter dynor med skumgummi och Akton®.
- Standardöverdrag och inkontinensöverdrag tvättas i vatten 60°C och torktumlas på medelvärme. Vid särskilt behov kan överdrag tvättas i 90°C. Använd vanliga tvättmedel eller desinfektionsmedel. Blekmedel 1:10 får användas \*).

- Avlägsna överdragen varsamt. Akta ytfilmen så att den inte skadas av dragkedjan.
- Skölj och torka alltid överdrag och skydd noggrant före användandet för att minimera risken för hudirritation för användaren. Inkontinensskydden skall lufttorkas eller torkas med trasa in- och utvändigt innan de tas i bruk.

## Rengöring sittdynor och Mjuktoasits hygienstol

- Avlägsna överdragen varsamt innan underlaget rengörs. Akta ytfilmen så att den inte skadas av dragkedjan.
- Vi rekommenderar att dynorna rengörs med vatten och blekmedel (klorin) 1:10.
- Skölj alltid av dynan noggrant före användandet för att minimera risken för hudirritation för användaren.
- Alkoholhaltiga rengöringsmedel och starka desinficeringsmedel bör användas med försiktighet eftersom de långsamt torkar ut gelen och kan förstöra ytfilmen.
- Alltför starka lösningar kan fläcka dynans ytfilm eller göra ytan hård.
- Vi rekommenderar INTE gassterilisering eller autoklavering.\*) Blekmedel: 5-10% Hypoklorit

## Max brukarvikt

300 kg

## Reparation & rekonditionering

Använd Reparationssats AKIT003: 10x90 cm

- Ytan som skall repareras skall vara ren och torr när reparations-tejp används.
- Om det skadade området har klabbigt material vid kanterna är det lättast att avlägsna detta med en tygtrasa doppad i mineralolja eller genom talkning. Rester av mineralolja avlägsnas med vatten och tvål varefter det skadade området torkas med en trasa.
- Mät det skadade området och klipp ut en bit reparations-tejp i rätt storlek så att tejpens ränder räcker 0,5-1 cm utanför skadan i alla riktningar. Lösgör försiktigt ungefär hälften av det bruna pappret bakom tejpens.
- Placera reparations-tejpen försiktigt på den skadade ytan och avlägsna långsamt resten av det bruna pappret.
- Om luftbubblor blir kvar under tejpens skall luften tryckas bort under tejpkanterna innan dynan tas i bruk.

## Garanti

Action® rullstols- och sängdynor har en garanti som täcker material- och framställningsfel. Våra produkter levereras felfria och har en garantiperiod på tre år från inköpsdatum. Missbruk eller försumlighet annullerar garantin. Tilläggsutrustningens produktgaranti gäller endast vid köptillfället.

## EU-representant:

Tollef Bredal A/S, Semsveien 150, 1384 Asker, Norge  
Tel: +47 66 90 56 10 Fax: +47 66 90 56 11



## Tillverkare:

Action Products, Inc., 22 North Mulberry St., Hagerstown, MD 21740 U.S.A.

Detta märke identifierar Action Products, Inc:s produkter. Action Products, Inc. är den ursprungliga tillverkaren av viskoelastiska polymerprodukter. Varumärket är en garanti för äkta, ursprungliga Action® produkter. ACTION och AKTON är Action Products, Inc:s registrerade varumärken.

## HEA Medical AB

Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se

