

HEA Monteringsset för bröstsele på Panthera


Anvisningar för montering och bruk

Art. nr: 3760P

ba_HEA_3760P_2020_03

Produktens syfte är att möjliggöra infästning av bröstsele-axelband på rullstolar med låga ryggstöd eller som på annat sätt saknar lämpliga fästpunkter. Dessa anvisningar avser rullstolar från Panthera. Stolsbredden avgör artikelnumret för monteringsseten.

Stolsbredd	Art.Nr	
3760P-32	Panthera S2 & U2	27-30 cm
3760P-37	Panthera S2 & U2	33-36 cm
3760P-42	Panthera S2 & U2	39-42 cm
3760P-47	Panthera S2 & U2	45-48 cm
3760PS3-32	Panthera S3 & U3	27-30 cm
3760PS3-37	Panthera S3 & U3	33-36 cm
3760PS3-42	Panthera S3 & U3	39-42 cm
3760PS3-47	Panthera S3 & U3	45-48 cm

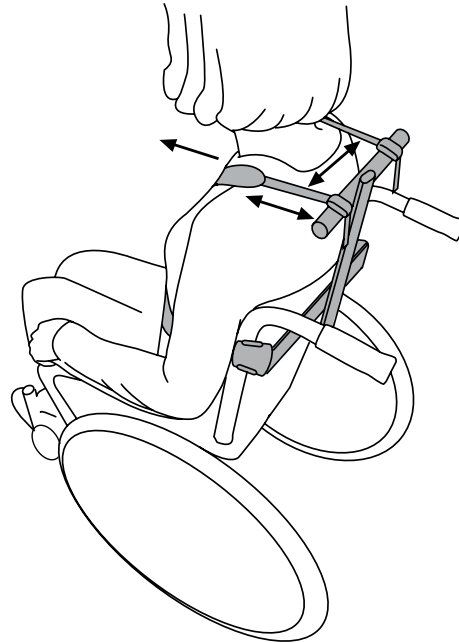

Anvisningar för montering

Förteckning över delarna finns på nästa sida. Delarna är till stor del hopmonterade vid leverans. Slutmontering skall utföras av sakkunnig personal.

1. Kontrollera att stolens rygg är hel och rätt monterad.
2. Sätt nackstödsstaget i fästet.
3. Montera horisontalröret på nackstödsstaget.
4. Kontrollera att alla skruvförband har dragits åt väl.
5. Kontrollera att produkten inte stör övriga funktioner.

Anvisningar för anpassning

Utprovningen tillsammans med användaren skall göras av en fackutbildad person. Användaren skall vara bekant med stolen och ha sittdyna och eventuell ryggdyna som skall användas med bröstsele och monteringsfästet. Hea Monteringsfäste ger inte större belastning av ryggen än en annan montering av bröstsele eller nackstöd.

VARNING: Ett höftbälte skall alltid användas tillsammans med ett bröstbälte av säkerhetsskäl.

VARNING: Av hållfasthetsskäl skall de medlevererade bandlåsen av metall inte ersättas med plastlås.


- 1 Välj förlängningsband (för åtdrag fram eller bak) och fäst dem i bröstsele.
- 2 Horisontalröret skall monteras så högt att förlängningsbanden löper i höjd med axlarna.
- 3 Horisontalröret ska vara så nära användarens rygg som möjligt – ju kortare band mellan skuldrans överdel och bandlåset på horisontalröret desto större stabilitet i sidled.
- 4 Avståndet mellan förlängningsbanden skall anpassas så att de dels inte skaver mot användarens hals, dels inte glider av axlarna.

Anvisningar för montering

Monteringssettet leverans i fyra delar. Slutmontering skall utföras av sakkunnig personal.

1. Skjut in vinkelskenorna i profilskenan, brickan ska vara på profilskenans utsida.

1. Kontrollera att stolens rygg är hel och rätt monterad.
2. Sätt nackstödsstaget i fästet.
3. Montera horisontalröret på nackstödsstaget.
4. Kontrollera att alla skruvförband har dragits åt väl.
5. Kontrollera att produkten inte stör övriga funktioner.

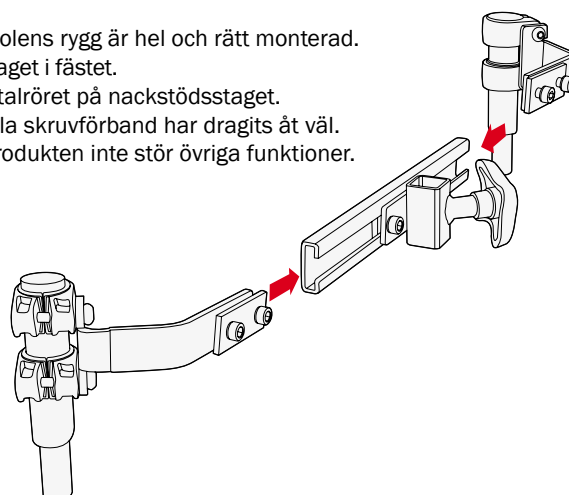


Art.nr 37612K Monteringsset horisontalrör (För ETAC Cross och Panther)

Består av det övre horisontella röret med sina beslag och med förlängningsband (Q911). Delarna har nummer 10, 11, 12 och 13 på bilden.

2. Montera sidostolparna på rullstolen.


Justera och dra åt skruvarna i nackstödsstolpe (med eller utan nackstöd) som är fäst i stolen.

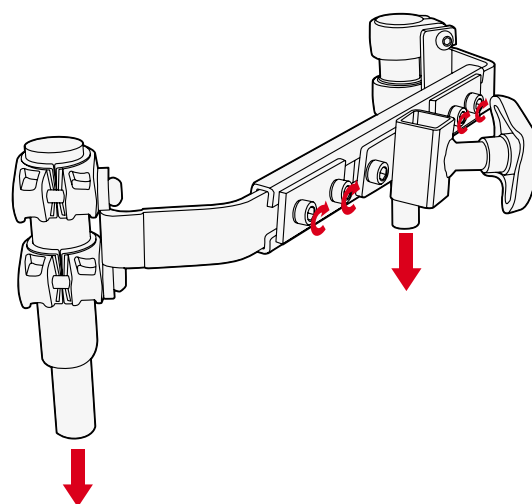

Delarnas artikelnummer, benämning och ingående antal (styck). Endast en profilskena används. Observera att den stående stolpen, nackstödsstolpen

(xx står för längden på profilskenorna 4-7 i bilden). inte ingår i satsen.

3. Montera horisontalröret på nackstödsstaget.

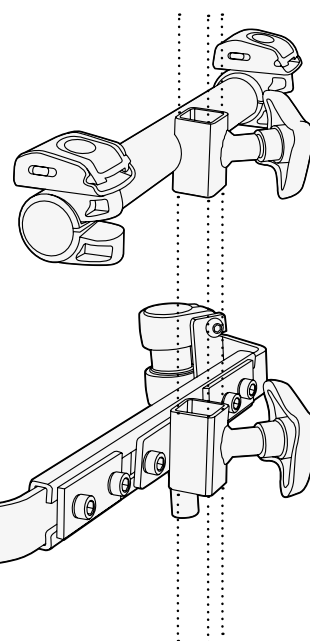


4. Montera nackstödsstaget på profilskenan.

Förteckning över delar

Art.nr 3760A-XX Monteringsset komplett för axelband omfattar nedan listade delar.

Del	Art.nr	Benämning	Antal
1	37630	Sidostolpe för Panthera med bricka och skruv	2
2	37611	Bricka, 2-håls för vinkelskena	2
3	37632	Vinkelskena	2
4	37608-32	Profilskena 320 mm, för stolbredd 350 - 375 mm	x
5	37608-37	Profilskena 370 mm, för stolbredd 400 - 450 mm	x
6	37608-42	Profilskena 420 mm, för stolbredd 450 - 475 mm	x
7	37608-47	Profilskena 470 mm, för stolbredd 500 - 525 mm	x
8	37610	Stolpfäste 15x15 mm, på profilskena, med ratt	1
9	37612	Horizontrör 22 mm, 15x15 mm fäste, med ratt	1
10	HW303	Rörsvep 22 mm	6
11	FS134	Bandlås med lock	2
12	37604	Stolpe 15x15 mm, längd 45 cm	1
13	37621	Minnesring	1
14	37611	Bricka, 2-håls för stolpfäste	1

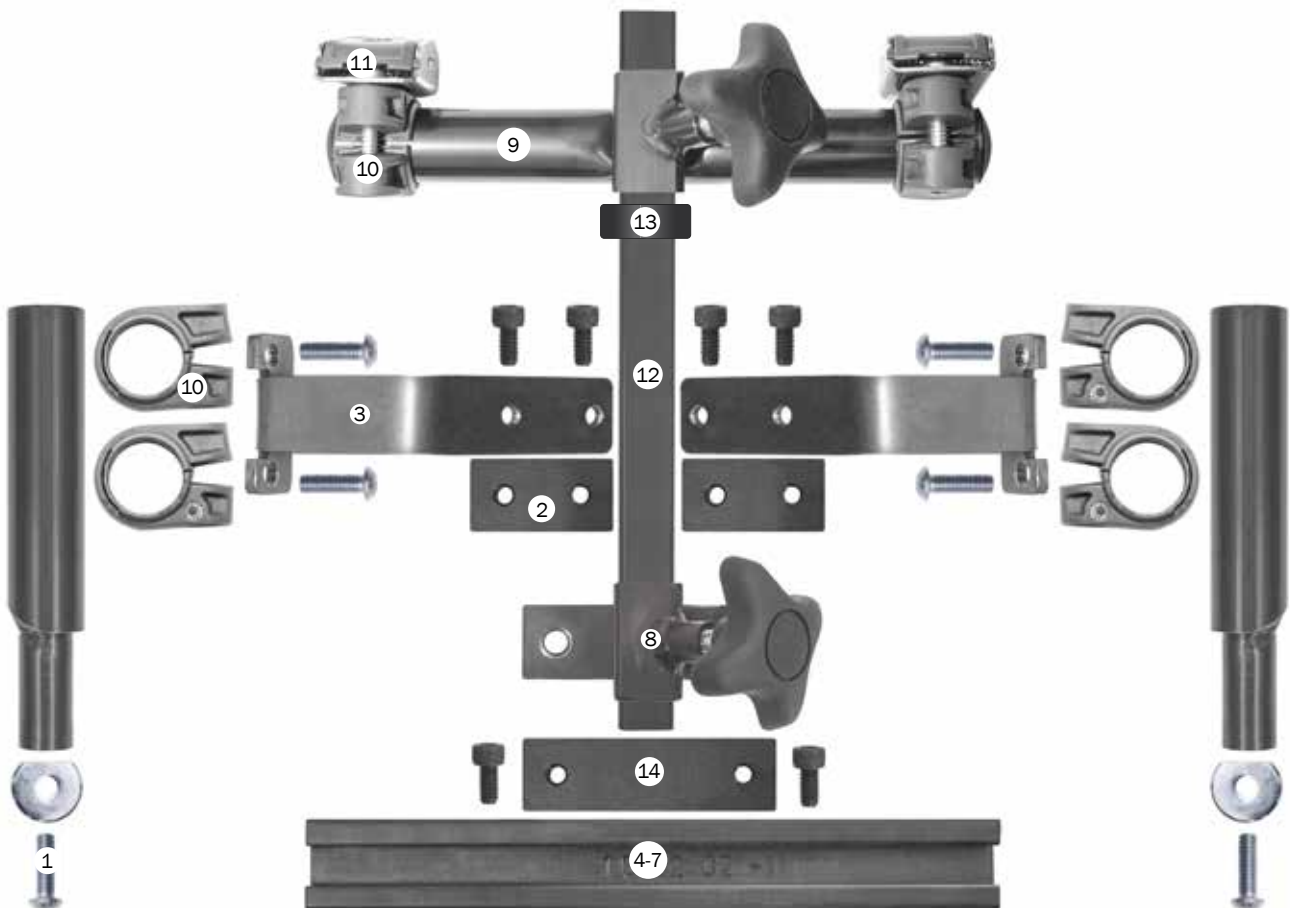

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se



ETT BÄTTRE LIV