



HEA Mjuktoasits - Bruksanvisning

Art.nr 6850OV, 6850RD

ba_he_a_mjuktoasits_2022_11

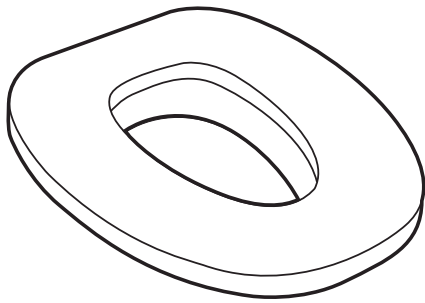

HEA Mjuktoasits Oval

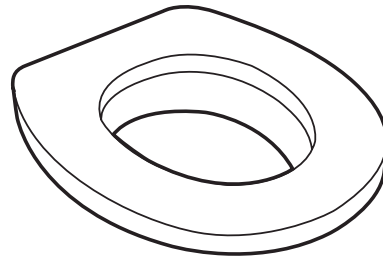

HEA Mjuktoasits Rund

Förpackningens innehåll:

(Någon av nedanstående i ett exemplar)

- Art.nr 6850OV - HEA Mjuktoasits Oval
- Art.nr 6850RD - HEA Mjuktoasits Rund

Avsedd Användning

Mjuktoasitsen är avsedd att användas för toalettbesök för personer med känslig hud. Produkten skall ligga fast, efter montering i den ordinarie sittringen och belastas av användaren med tryck uppifrån. Var aktsam när mjuktoasitsen tas av för rengöring. Produkten är inte avsedd att tas av och på toalettstolen flera gånger dagligen.

Material

Mjuktoasitsen är tillverkad av polyuretanskum med täta celler som inte suger upp vätska. Ytan har ett vinylöverdrag och en reduceringsring gör att produkten passar de flesta toaletteringar i Sverige. Sitsens yta består av ett segt och starkt skikt av vinyl som är slätt och lätt att rengöra. Urin och bakterier får inte fästa.

VARNING!

Det är viktigt att professionell expertis rådfrågas. Kontrollera att mjuktoasitsen sitter fast i ringen innan användaren sätter sig på den. Användaren eller hjälpare skall förstå monteringen. Liksom den ordinarie toaletteringen blir mjuktoasitsen något glattare när den är våt. Brukaren/hjälparen skall känna till detta faktum.

VARNING!

Även om vinylskiktet är starkt, är det känsligt vid i- och ur-montering av mjuktoasitsen. Var aktsam när mjuktoasitsen tas av för rengöring. Produkten är inte avsedd att tas av och på toalettstolen flera gånger dagligen.

VARNING!

Om användarens fysiska eller kognitiva förmågor hindrar hen från att använda denna produkt på ett säkert sätt, måste en vårdgivare alltid vara närvarande under användningen.

VARNING!

Om en allvarlig incident inträffar relaterad till användningen av denna produkt, bör den rapporteras till tillverkaren och till den lokala behöriga myndigheten.

Max Brukarvikt

150 kg

Regelbundna säkerhets- och funktionskontroller

För att säkerställa användarens säkerhet måste denna produkt kontrolleras regelbundet för funktion och tecken på slitage. Kontrollera regelbundet slitage på materialet: Att produkten inte är kraftigt missfärgad (gul eller brun av ålder). Att produkten inte har bristningar eller revor. Att produkten inte är ostadigt monterad på toalettens sittring. Att stödytan vänd mot toalettens sittring inte är sprucken. I dessa fall bör sitsen ersättas med ny. Om sitsen är skadad eller sliten får den inte användas.

Rengöring

Tvättas regelbundet med varmt vatten och mild tvål eller diskmedel. Kan doppas i vatten. Lufttorkas. Får ej autoklaveras.

Skrotning/Kassation


Produkten är gjord av material som kan kasseras på ett säkert sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder vid slutet av dess livslängd. Kan lämnas till kommunal avfallshantering.

Garanti

Ett år. Mot defekter i material eller utförande. Spara originalförpackning och bruksanvisning. Vid retur skall originalförpackningen vara oskadd.

Medicintekniskt hjälpmedel, klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU



**Danmar Products, Inc.**
221 Jackson Industrial Dr.
Ann Arbor, MI 48103, USA
P. 800-783-1998


Danmar Products


EC REP

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

HEA
MEDICAL AB

Montering



Monteras genom att mjuktoasitsen trycks in i den ordinarie sittringen. Kontrollera att mjuktoasitsen sitter väl i ringen. Sitsen tas av genom att den försiktigt dras ut ur den ordinarie sittringen. Det elastiska materialet fjädrar och låser mjuktoasitsen under sittringen.

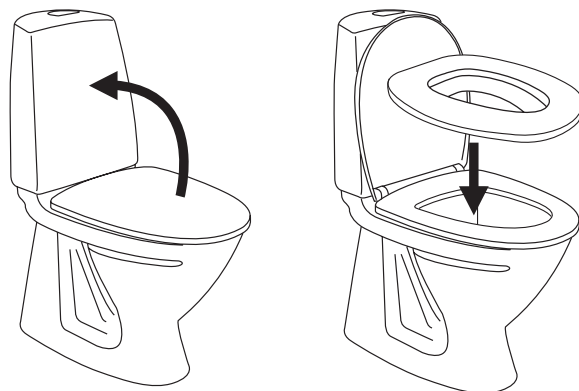

1. Lyft locket på toalettstolen
2. Tryck ner mjuktoasitsen

Måttskisser



Mjuktoasits - Rund

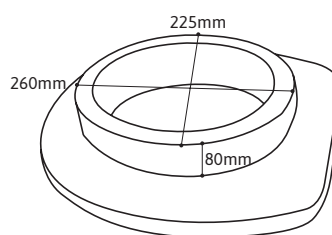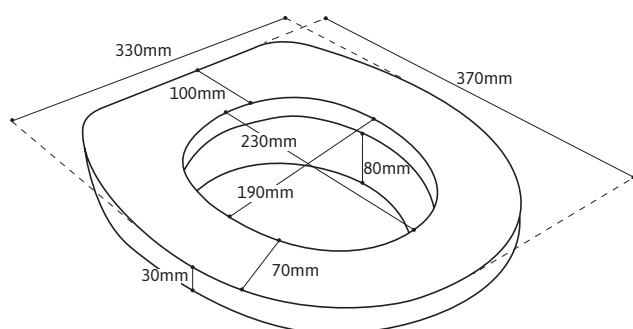

Undersida

Det yttre måttet på reduceringsringen ska passa i toalettstolen

Mjuktoasits - Oval

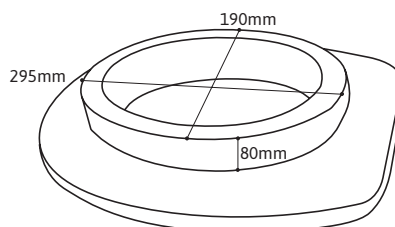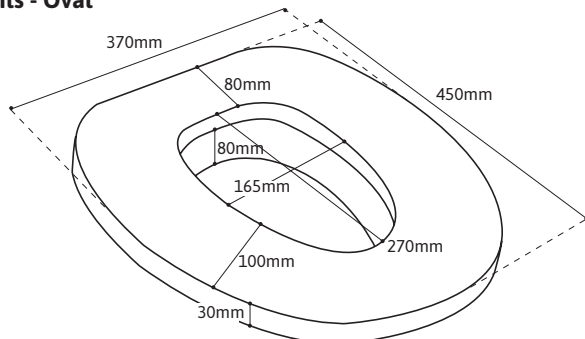

Undersida

Det yttre måttet på reduceringsringen ska passa i toalettstolen