


Roll-a-Ramp

Anvisningar för montering och bruk

ba_roll_a_ramp_2021_01

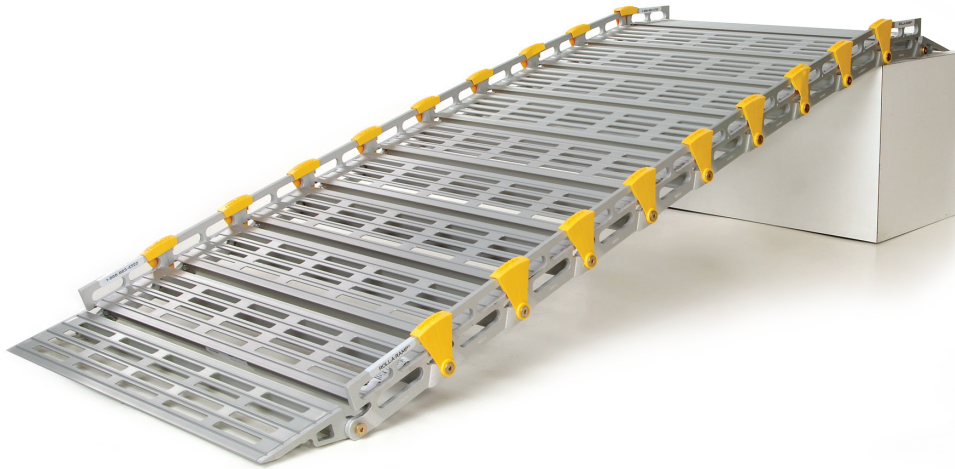

Roll-a-Ramp är lätt, hållbar och mångsidig. Tillverkad av anodiserad aluminium av flygkvalitet som ger underhållsfri funktion under många år.

Några begrepp

En ramp består av en rad sammanfogade sektioner eller delar, som kallas länkar.

Lastbärande länkar är länkarna som rampen i huvudsak består av.

Påkörnings- och avkörnings-länkar har speciell form och är den nedersta och översta länken.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- 1) Greppa aldrig mellan elementen – klämrisk. Greppa i stället i länkarnas sidohål.
- 2) Greppa inte där det sitter gula skyddskåpor.
- 3) Använd alltid Roll-a-ramp enligt anvisningarna.
- 4) Rampen skall stå upp när den rullas ut. Lägg sedan ner den.
- 5) Trampa aldrig på kanterna. Spring eller hoppa inte på rampen.
- 6) När rampen läggs på plats skall minst ett lastbärande länk vila på den övre nivån.
- 7) Använd rampen bara när underlaget är fast och säkert. Kontrollera att rampen låses med lämpliga tillbehör.

VIKTIGT - Säkerhetsföreskrifter

Följande instruktioner och råd är nödvändiga att följa för att garantera säkerheten. Vissa av instruktionerna upprepas i den här användarmanualen och vi rekommenderar att du läser och förstår manualen innan du använder din ramp.

Lyft och montering

Om rampen du använder är mer än 1,5 meter i längd, väger mer än 15 kg bör du inte försöka lyfta eller manövrera rampen själv. Använd handskar vid montering.

Att ställa in/montera rampen

Ställ den rullade rampen på ena sidan, avlägsna bandet, håll rampen på ena sidan. Rulla ut rampen i full längd innan den sätts på plats. För att rulla ut rampen, gör om processen omvänd och fäst bandet. På så vis är rampens vikt alltid på marken vid monteringsprocessen.

Klämskydd

Rampen är försedd med gula skyddskåpor för att förhindra att man klämmer fingrarna när man rullar ut och ihop rampen. Håll alltid händer och fingrar borta från sidospåren när de är utsträckta samt från hålrummen emellan de individuella delarna för att undvika skador. Använd handskar vid montering.

Ställbara benstöd

Vid användning av en ramp som är längre än 274 cm vid lastbärandet, måste ett par ställbara benstöd användas. Benstöden kan behöva efterjusteras.

Vinkel och lutning

Den bästa vinkeln är i proportion 1:16. Längden bör vara 16 gånger höjden mät vertikalt från topp/höjd till marken. När det inte är möjligt att använda denna vinkel, så bör rullstolsbrukaren söka assistans. De flesta scooters och elektriska rullstolar kan hantera lutningar upp till 1:5. Maxgrader = 30° (för industriell transport och teknisk användning.)

Underhåll


Det är nödvändigt att man kontrollerar rampens eventuella slitage åtminstone var sjätte månad. Extra uppmärksamhet bör riktas mot de anslutande bultarna och klämskydden. Att de sitter på plats och är ordentligt åtskruvade. Rengör alla ytor med mildt rengöringsmedel för att avlägsna olja och smuts.

Hala golv

När man använder rampen på ett polerat eller halt golv (t ex marmor), placera då en tunn gummimatta under båda ändar för att förhindra att den halkar. En badrumsmatta med gummiproppar är idealt för detta syfte. Använd aldrig rampen om trappan/stegen som rampen vilar mot är smalare än rampen själv.

Montering och bruk av Roll-a-ramp

Verktyg: Fast nyckel 13 mm, insex 3/16"

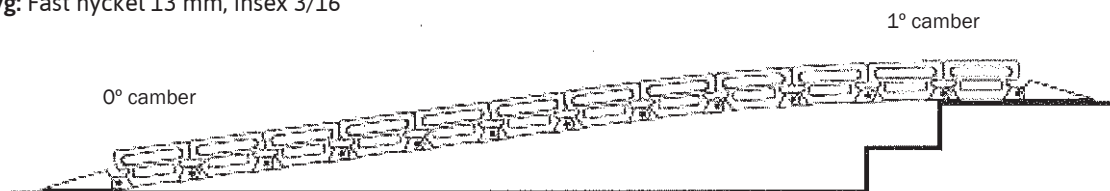


Ställ den hoprullade rampen på en sida (som en stående trådulle), tag bort bandet, och rulla sedan ut den helt och placera därefter rampen på plats. Rulla ihop rampen på samma sätt men i omvänd ordning, fäst bandet.

De gula plastskydden som är monterade på bultarna som täcker mellanrummen mellan länkarna skyddar fingrar att klämmas. Plastskydden får aldrig avlägsnas eller förstöras.


OBS! Den ända av rampen som har en etikett med texten "Upper End" skall vara uppåt, eftersom den övre delen av rampen är något vinklad medan den nedre är plan. Länkarna i den övre delen har en 1° camber-vinkel och den nedre delen är helt plan och har 0° camber-vinkel.

Om rampen är felvänd blir det både svårare att komma upp på rampen nerifrån och svårare att köra av när man är uppe.

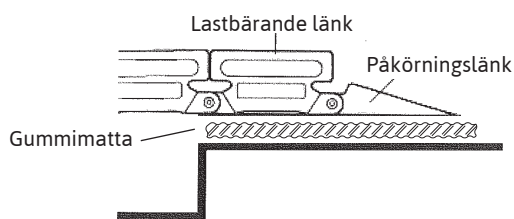

VIKTIGT

Den första lastbärande länken i den övre delen måste vila på det övre golvplanet. Påkörningslänken är inte en lastbärande länk. Använd en gummimatta mellan rampen och underlaget.

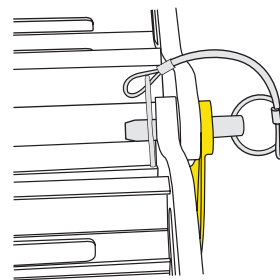

Snabbkoppling

Snabbkoppling är tillbehör som gör det enklare att snabbt dela en ramp. Ta bort bultarna som vanligen binder ihop två länkar. Tryck in låsknappen och sätt in pinnen.

OBS! Kontrollera att låset sitter fast innan rampen används!