


E-rör, fäste för bröstsele på rullstol -Bruksanvisning

Art. nr: 37612K, 37619K

ba_HEA_37612K_37612K_2025_01

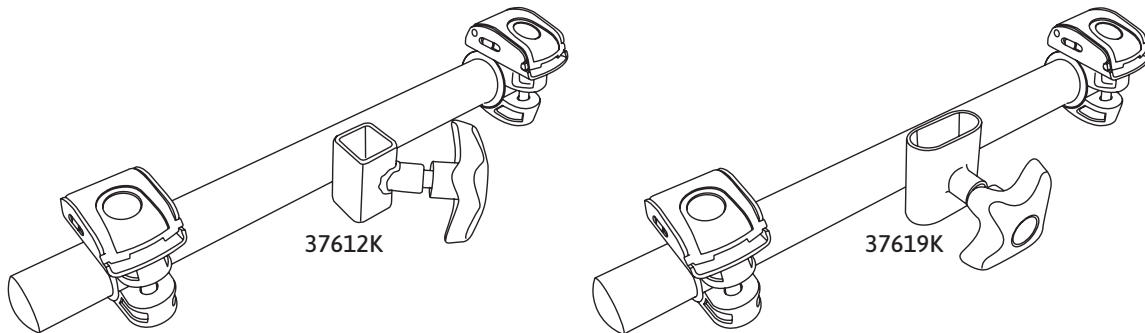

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: (Någon av nedanstående, i ett exemplar)

Art. nr	Passar
37612K	Nackstödstolpe med 15x15 mm-profil: ETAC Cross, ETAC Kudu, ETAC Xact, ETAC Prio, ETAC Panther. COBI Kamille
37619K	Nackstödstolpe med plattoval-profil: Rea: Azalea, Assist, Bellis, Comfort, Dahlia, Focus, Spirea2 och Spirea4NG HD: Balance 16, Balance 24, 500, 600, 650, Humlan 500 & 650, 500 & 600 Barn. Handicare: Emineo & Cirrus

Avsedd användning

Produktens syfte är att möjliggöra infästning av bröstselars axelband på rullstolar med låga ryggstöd eller som på annat sätt saknar lämpliga fästpunkter.

Anvisningar för montering


Delarna är hopmonterade vid leverans. Slutmontering skall utföras av sakkunnig personal.

1. Kontrollera att stolens rygg är hel och rätt monterad.
2. Montera E-röret på nackstödsstolpen
3. Kontrollera att alla skruvförband har dragits åt väl.
4. Kontrollera att produkten inte stör övriga funktioner.

Anvisningar för anpassning

Utprovnigen tillsammans med användaren skall göras av en fackutbildad person. Användaren skall vara bekant med stolen och ha sittdyna och eventuell ryggdyna som skall användas med bröstselen och E-röret.

- 1 E-röret ska monteras så högt att selbanden löper i höjd med axlarna.
- 2 E-röret ska vara så nära användarens rygg som möjligt. – ju kortare band mellan skuldrens överdel och bandläset på E-röret desto större stabilitet i sidled.
- 3 Avståndet mellan förlängningsbanden skall anpassas så att de varken skaver mot användarens hals eller glider av axlarna. Använd insexnyckel 4 för att lossa och dra åt skruvarna.

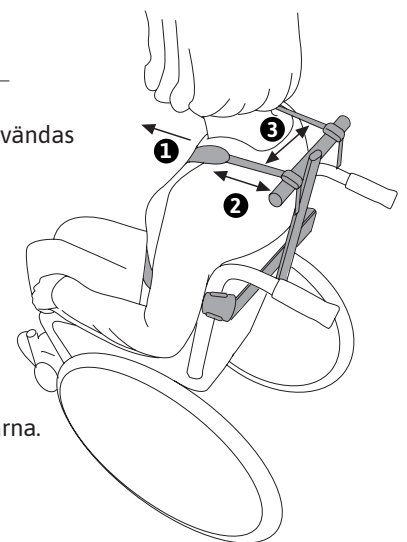

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se



WARNING! Av hållfasthetsskäl skall de medlevererade bandläsen av metall inte ersättas med plastlås, fixklämmor.

WARNING! Ett höftbälte skall alltid användas tillsammans med ett bröstbälte av säkerhetsskäl.

OBS! Stolpe ingår ej. Använd den plattovala nackstödsstolpen. Rea: Azalea, Assist, Bellis, Comfort, Dahlia, Focus Spirea2 och Spirea4NG. HD: Balance 16, Balance 24, 500, 600, 650, Humlan 500 & 650, 500 & 600 Barn. Handicare: Emineo & Cirrus

OBS! Stolpe ingår ej. Använd nackstödsstolpen, 15x15 mm (ETAC Cross och ETAC Panther).