

HEA Ramptejp Bruksanvisning

Art.nr: RT-4, RT-8, RT-R

ba_HEA_ramptejp_2023_3

Förpackningens innehåll

Ramptejp består av en dubbelhäftande tejp, framtagen av 3M som består av bitar som är 50 mm x 100 mm.

RT-4 innehåller fyra tejpbitar

RT-8 innehåller åtta tejpbitar

RT-R är en rulle som innehåller motsvarande cirka femhundra tejpbitar.

Avsedd användning

Tröskelramper av gummi

Ramptejp är primärt avsedd att användas på undersidan av HEA Tröskelramper utan lim för att förhindra att rampen glider på underlaget. Används också vid rekonditionering av tröskelramper av gummi.

Avsedd användning

dynor och anpassningsmattor med gel

Ramptejp är sekundärt avsedd att fästa dynor med gel i form av plana mattor och mattor med kuber som kan vikas över kanter vid alla ytor där man vill förhindra skjuvning och trycksår.


Montering Tröskelramper

Se till att båda ytorna där ramptejp skall fästa är rena. Tejp fäster bäst med tryck. Du kan ställa dig på rampen på de ställen där det finns tejpbitar, ca 10 sekunder räcker.

Rekommenderad placering av tejp



För höjd 6-20 mm, använd 4 bitar tejp.

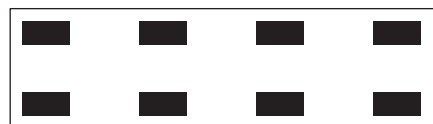

För höjd 24-60 mm, använd 8 bitar tejp.

Destruktion

Kan lämnas till kommunal avfallshantering

Avlägsna och rengöra

Prova först med att rulla ihop tejpen till en "boll". Eventuella tejprester tas bort med varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp. Beroende på underlag kan även ren bensin eller T-röd sprit användas.

Medicintekniskt hjälpmedel, klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se



HEA Ramptejp Bruksanvisning

Art.nr: RT-4, RT-8, RT-R

ba_HEA_ramptejp_2023_3

Förpackningens innehåll

Ramptejp består av en dubbelhäftande tejp, framtagen av 3M som består av bitar som är 50 mm x 100 mm.

RT-4 innehåller fyra tejpbitar

RT-8 innehåller åtta tejpbitar

RT-R är en rulle som innehåller motsvarande cirka femhundra tejpbitar.

Avsedd användning

Tröskelramper av gummi

Ramptejp är primärt avsedd att användas på undersidan av HEA Tröskelramper utan lim för att förhindra att rampen glider på underlaget. Används också vid rekonditionering av tröskelramper av gummi.

Avsedd användning

dynor och anpassningsmattor med gel

Ramptejp är sekundärt avsedd att fästa dynor med gel i form av plana mattor och mattor med kuber som kan vikas över kanter vid alla ytor där man vill förhindra skjuvning och trycksår.

Medicintekniskt hjälpmedel, klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

