

Anvisningar för att fästa HEA tröskelramper med tejp

Förpackningens innehåll

Art.nr RT-4 eller Art.nr RT-8

Avsedd användning

För att fästa HEA Tröskelramper av gummi mot underlag, utomhus och inomhus.

Detta kuvert innehåller bitar av dubbelhäftande tejp.

Storlek: 5x10 cm

Fabrikat: 3M

Antalet bitar är avpassat för rampens djup.
(djup = måttet från tröskeln till rampens lägsta punkt)

Rampdjup	Tejpbitar	Placering
60 - 100 mm	4	
200 - 250 mm	8	

Rekommenderad placering av tejp för maximal säkerhet. Färre antal bitar kan användas, men skall bedömas av ansvarig på plats.
För bästa effekt bör både underlagets och rampens undersida vara rena. Lämpliga medel är; kemiskt ren bensin, sprit, T-röd. Diskmedel i varmt vatten; skölj rent och låt torka.

Allt lim fäster bäst med tryck. Därför är det bra om du ställer dig på rampen på de ställen där det finns tejp; 10 sekunder räcker. Skall rampen tas bort kan både golv och ramp rengöras från rester av tejp med kemiskt ren bensin eller T-röd.



HEA Medical AB