


Lock för Tryckspännen

ART NOS. FS018C, FS019C, FS018D, FS019D,
FS018E & FS019E

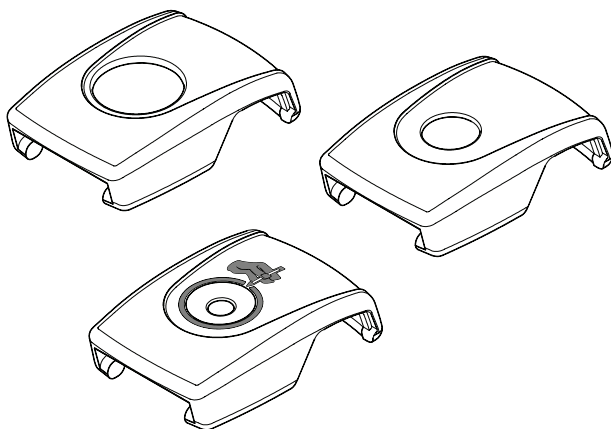

⚠ VARNING! Om höftbältet frigörs av misstag kan användaren glida ner och falla ur rullstolen. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigörning, måste en vårdare alltid vara närvarande när det används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden.

SKROTNING/KASSATION: Produkten lämnas till kommunal avfallshandtering.

För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även på www.bodypoint.com.

com som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.

FS918C & FS019C SÄKERHETSLOCK 6 MM HÅL


⚠ VARNING! Denna produkt är avsedd att förhindra att ett bälte läses upp oavsiktligt av användaren. Felaktig användning av denna produkt kan leda till att användaren fastnar i rullstolen i ett nödläge. En vårdare med ett upplåsningsverktyg skall alltid vara närvarande vid användning av denna produkt. Undvik att använda denna produkt för fastspänning om inte en läkare har bedömt riskerna och konstaterat att detta ökar användarens säkerhet.

⚠ VARNING! Använd inte verktyg som kan brytas sönder inuti spännet. Tag av spännets lock med jämna mellanrum för att se om något hindrande föremål finns.




Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 27
7396 PD Tenwolde
The Netherlands



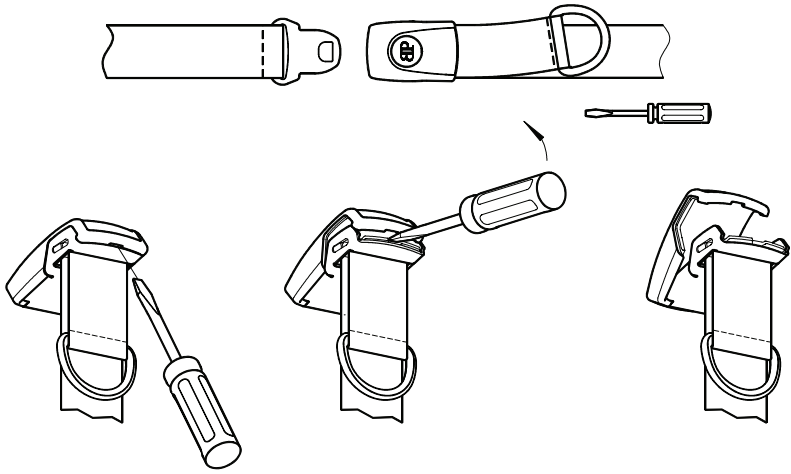

Tag bort lock

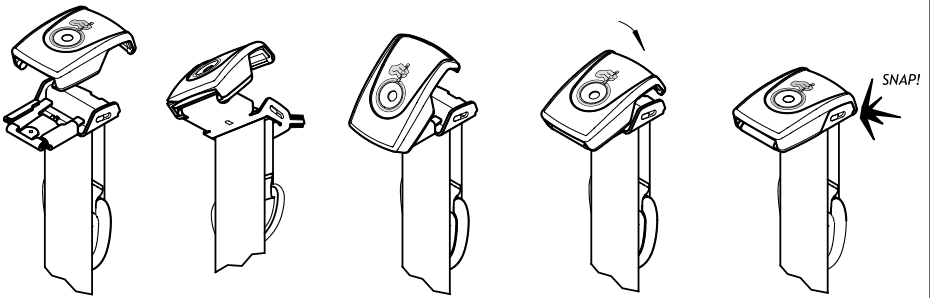

Montera nytt lock

