

# Lock för Tryckspännen


## INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING




Art. nr: FS018C, FS019C, FS018D, FS019D, FS018E, FS019E

BP1091-fi 2011.2

### Ta bort lock

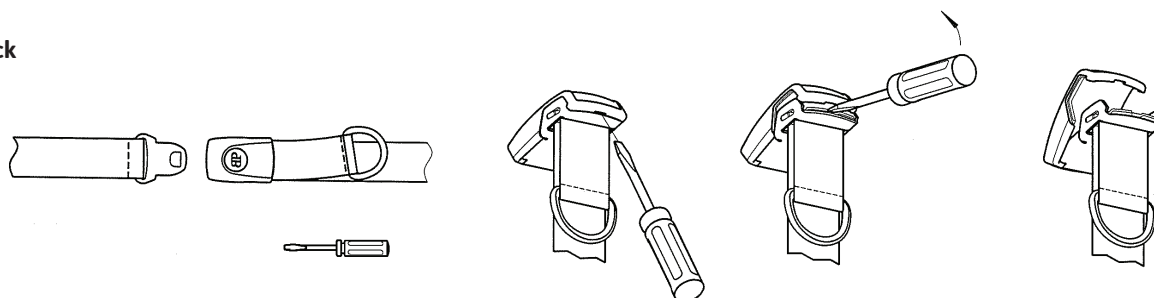


### Montera nytt lock

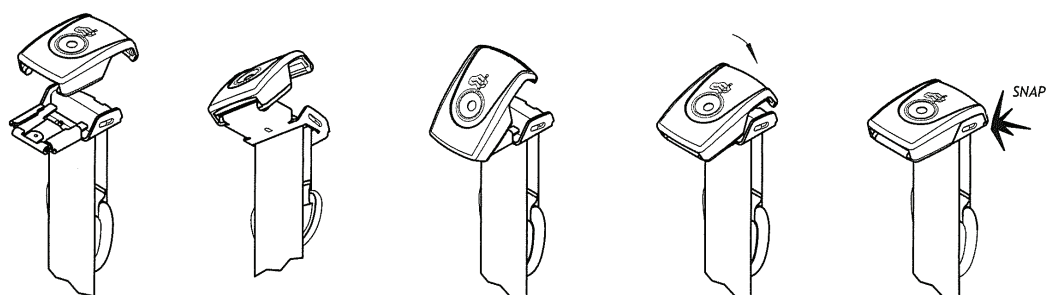

### FS018C & FS019C Säkerhetslock 6 mm hål

Varning! Denna produkt är avsedd att förhindra att ett bälte låses upp oavsiktligt av användaren. Felaktig användning av denna produkt kan leda till att användaren fastnar i rullstolen i ett nödläge. En vårdare med ett upplåsningsverktyg skall alltid vara närvarande vid användning av denna produkt. Undvik att använda denna produkt för fastspänning om inte en läkare har bedömt riskerna och konstaterat att detta ökar användarens säkerhet.

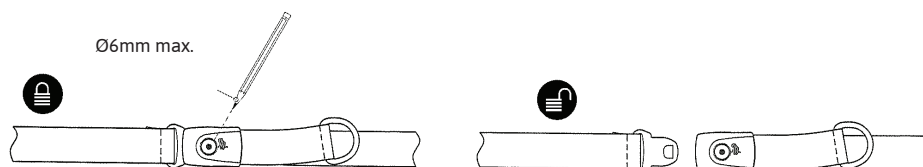

### Varning!

Om höftbältet frigörs av misstag kan användaren glida ner och falla ur rullstolen. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigöring, måste vårdare alltid närvara när det används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

### Garanti:

Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden.