



Måttguide - Bodypoints bälten & selar

Hur man mäter för ett vadderat höftbälte

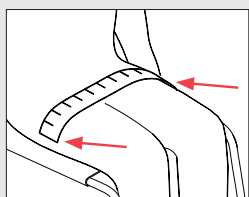


1. Bestäm en bekväm sittposition.
2. Mät hur lång den vadderade ytan bör vara med ett måttband (ytan som kommer att vara i kontakt med brukaren).
3. Välj bälte.

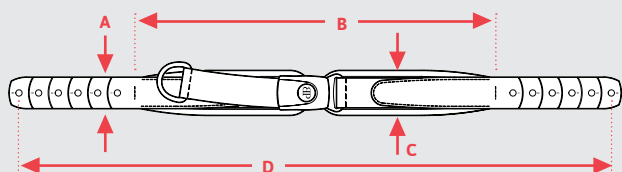


Evoflex Höftbälte

Storlek	A	B	C	D
S38	25 mm	38 cm	5 cm	63 cm
M46	38 mm	46 cm	5,5 cm	76 cm
L62	50 mm	62 cm	7cm	96 cm

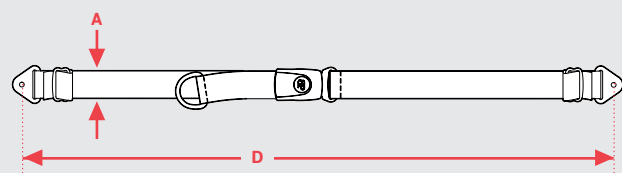


Ovadderade höftbälten

Storlek	A	D
S	25 mm	117 cm
M	38 mm	142 cm
L	50 mm	155 cm
L-EXT	50 mm	206 cm

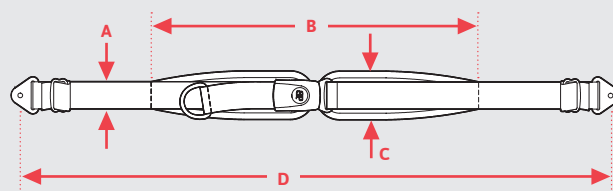

Bälten med åtdrag från mitten

Storlek	A	B	C	D
S32	25 mm	32 cm	4,5 cm	117 cm
S38	25 mm	38 cm	5 cm	117 cm
M36	38 mm	36 cm	5,5 cm	130 cm
M46	38 mm	46 cm	5,5cm	142 cm
L62	50 mm	62 cm	7 cm	155 cm
L82	50 mm	82 cm	9 cm	206 cm
L92	50 mm	92 cm	10 cm	206 cm

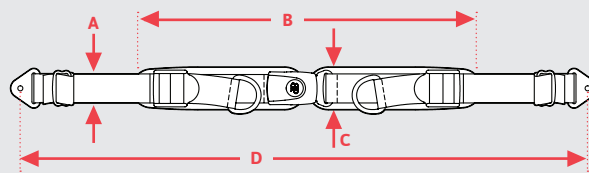


Bälten med åtdrag från sidorna

Storlek	A	B	C	D
S38	25 mm	38 cm	5 cm	117 cm
M40	38 mm	40 cm	5,5 cm	142 cm
M46	38 mm	46 cm	5,5 cm	142 cm

Stayflex, PivotFit och Trimline Bröstselar


Mät från axel till axel.

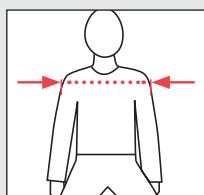

Storlek	Axelbredd
XS	24-28 cm
S	28-33 cm
M	33-41 cm
L	41-48 cm
XL	48-56 cm
Endast PivotFit:	
XXS	21-24 cm

Monoflex Brösthälte


Mät över bröstkorgen där bröstbältet är tänkt att sitta.

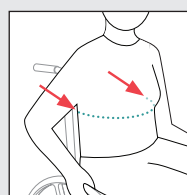

Storlek	Min/Max längd
XS	36-45 cm
S	46-55 cm
M	56-65 cm
L	66-75 cm
XL	76-85 cm

Vadband och vadmattor


Mät från fotstödsrör till fotstödsrör som bilden visar.

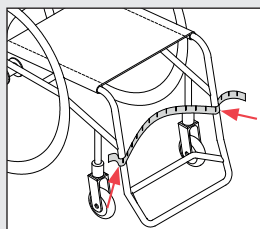

Storlek	Längd
S	35-40 cm
M	40-50 cm
L	50-61 cm

Vristselar

Mät ovanför ankl.

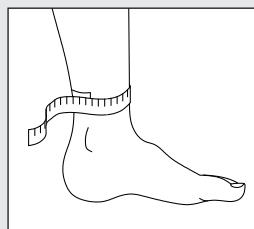

Storlek	Omkrets
XS	14-17 cm
S	17-20 cm
M	19-23 cm
L	22-29 cm
XL	28-33 cm