


# Handtag för manöverboxar

## INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Art. nr: PC101, PC102, PC103, PC104, PC107, PC110

BP1025 2018.8

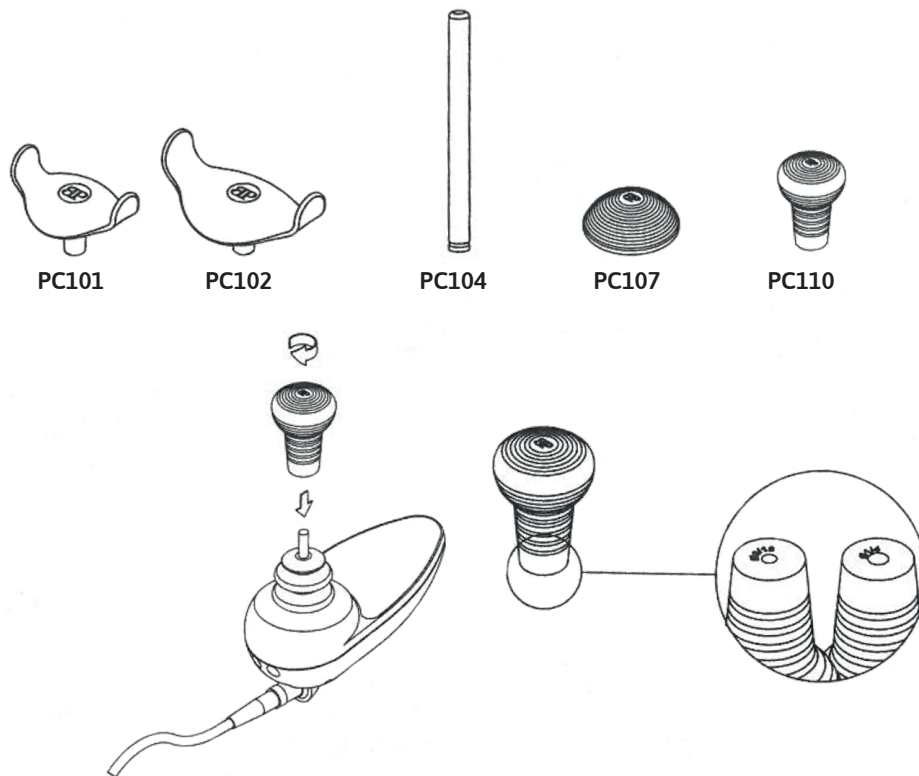

### FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 1 st Joystickhandtag

Handtagen från Bodypoint är böjbara (lätt fjädrande) och lossnar från manöverboxens handtagsaxel (boxens metallpinne) om de dras uppåt med för stor kraft. Det U-formade (Klykan) handtaget kan också rotera. Dessa egenskaper är till för att undvika skador på körboxen och vi rekommenderar att de inte ändras.

Alla handtag finns för två diametrar på körboxens stålpinne: 5 mm och 6 mm

### Monteringsanvisning:

1. Rengör manöverboxens axel från smuts och olja.
2. Fukta axeln för att underlätta monteringen av handtaget.
3. Håll fast körboxens axel vid dess bas med en tång så att den inte kan tryckas ner i körboxens känsliga delar.
4. Tryck fast körhandtaget på spaken med en roterande rörelse.
5. För att fästa ett körhandtag permanent lägg 2-3 droppar cyanoakrylatlim (superlim) i handtagets hål och tryck det genast på plats.

### Garanti

Alla Bodypoints produkter har en villkorslös garanti mot fel i tillverkning och material. Information finns även på [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com) som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.

### Kassation

Produkten lämnas till kommunal avfallshantering.



HEA Medical AB  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
[info@heamedical.se](mailto:info@heamedical.se)  
[www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

