
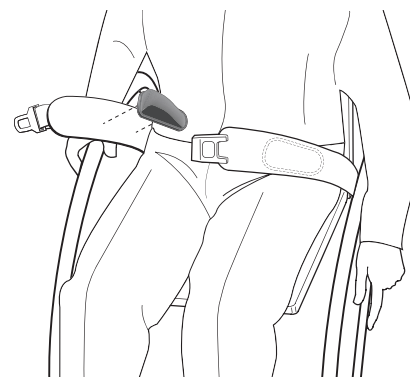


Stöddynor

BRUKSANVISNING

Art. nr: PD401-1, PD402-2

BP1073_rev3

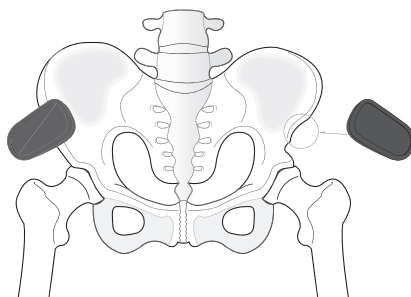

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 2 Dynor för placering under höftbenskammen.

Ge anvisningarna till användaren eller assistenten/vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.

Den här produkten är avsedd för användning med: Art. nr: LB205-, LB225-, LB405-, LB416-, LB425-, LB435-

VARNING! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

VARNING! Aom alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användaren måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära tryckytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, t ex trycksår.

UNDERHÅLL

Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, band och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person - hälsa och säkerhet står på spel!

RENGÖRING

Maskintvätt 60C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller dropptorka.

Får ej strykas. (Om produkten placeras i en tvättpåse undviker man skador på produkten och maskinen.)

GARANTI

Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör i garantiärenden.

För mer information om Bodypoint produkter kontakta leverantören. Information finns även på www.bodypoint.com som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

