

# Monteringsguide

## för bälten och selar från Bodypoint

### Hygienstolar

Detta är ett komplement till bruksanvisningen som medföljer produkten och visar monteringsförslag på manuella rullstolar, elrullstolar, arbetsstolar och hygienstolar som HEA Medical testat och som faller inom ramen för vad tillverkarna anvisar. Vad en viss brukare behöver för god säkerhet, stabilitet och komfort kan kräva andra lösningar med hänsyn till förmåga, förväntningar och miljö.


Monteringsguiden fokuserar på fästdetaljer som används för montering på stolen. Placeringen av fästdetaljer är vägledande. Vad som är rätt position för varje individ måste provas ut av kvalificerad personal.



## Monteringsförslag av bälten och selar från Bodypoint

Positioneringshjälpmedel kan endast tillhandahålla funktion och säkerhet när de har monterats i enlighet med användarens individuella behov, baserat på en klinisk bedömning.

Höftbälten för bäckenpositionering. Vanligaste sittpositionen är bakåttippat bäcken. Bältet ska då placeras över låren och dras nedåt, som bilderna visar, för att förhindra att låren eller baken glider över sitsen, under förutsättning att detta är kliniskt korrekt och tolereras av rullstolsanvändaren.

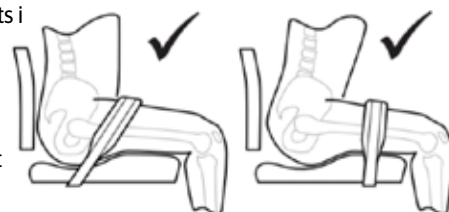


- ⚠ Ett felaktigt placerat höftbälte eller ett för löst fastsatt bälte kan leda till att användaren glider framåt och under bältet med risk för strypning. Den korrekta placeringen av bältet måste alltid verifieras av erfaren professionell personal som utbildar användaren och vårdpersonal för att säkerställa korrekt daglig användning.
- ⚠ En bröstsele eller bröstbälte ska alltid användas tillsammans med ett höftbälte eller liknande stöd för bäckenet.

HEA Medical och Bodypoint erbjuder ett stort sortiment av fästdetaljer för vanliga rullstolar. I stolen/bältets/selens bruksanvisning finns de generella anvisningarna från tillverkaren, CE-rättsinnehavarna. Här är förslag som HEA testat och som faller inom ramen för vad tillverkarna anvisar. Bodypoints positioneringshjälpmedel är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet MDR. Om de provas ut och monteras av sakkunnig personal som följer rullstolens bruksanvisning och dessa förslag, som faller inom ramarna för Bodypoints bruksanvisningar, blir kombinationen inte en specialanpassning och all CE-märkning kvarstår.

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Förteckning över beslag och fästdetaljer	4
Etac Clean	5
Etac Mobil	6
Etac Mobilette	7
Etac Heron	8
Invacare Aquatec Ocean, VIP, 2, XL, Dual Vip, Ergo, Ergo Vip, Ergo dual Vip, Ergo XL	9
HMN Mini, M2, M2 smal, M2 200kg, M2 300kg	10
Minicrosser Swing	11
Anatomic Sitt Zitzi Sharky Pro & Zitzi Delphi Pro	12-13

### Så trär du bandet genom Trekanten och söljan

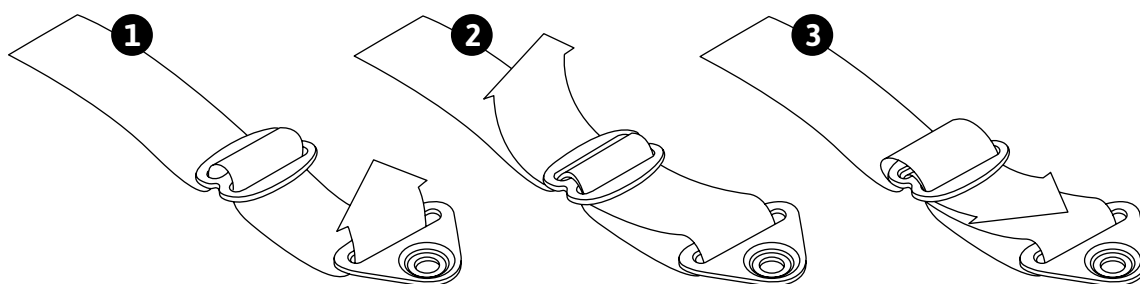

1 Trä först bandet genom söljan, därefter genom trekanten.

2 Trä sedan bandet tillbaka genom söljan.

3 Lås bandet genom att åter igen trå bandet genom söljan.



## Hygienbälten med öljetterade band

Rekommenderade beslag för fäste runt rör



Rörklämma Ø22 mm  
Art.nr HW310-22



Rörklämma Ø25 mm  
Art.nr HW310-25



Rörsvep 22mm av rostfritt stål  
Art.nr HW320-22



Rörsvep 25mm av rostfritt stål  
Art.nr HW320-25



Art.nr HWH70

För montering av band



## Hygienbälten med släta band

Rekommenderade beslag för fäste runt rör



Rörklämma Ø22 mm  
Art.nr HW310-22



Rörklämma Ø25 mm  
Art.nr HW310-25



Rörsvep 22mm av rostfritt stål  
Art.nr HW320-22



Rörsvep 25mm av rostfritt stål  
Art.nr HW320-25



Montering för band följer med bältet

# Montering av Bodypoints Hygienbälte

Etac Clean

## Montering av Hygienbälte i brösthöjd



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25



2x Art.nr HWH70

## Montering av Hygienbälte i bäckenhöjd



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25



2x Art.nr HWH70

## Montering under sits



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW320-25



2x Art.nr HWH70

## Montering under sits sedd underifrån



# Montering av Bodypoints Hygienbälte

Etac Mobil

## Montering av Hygienbälte i brösthöjd



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25



2x Art.nr HWH70

Fäst det öljetterade bandet med en ratt i en Rörklämma för 25 mm rör runt stolens ryggstödsrör. Om hygienbältet har släta bandändar så fäster man bandet med trekant och sölja i ovan nämnda Rörklämma.

## montering av Hygienbälte under sits



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW320-25



2x Art.nr HWH70

Fäst det öljetterade bandet med en ratt i ett rörsvep för 25mm rör runt sitsens rör. Om hygienbältet har släta bandändar så fäster man bandet med trekant och sölja i ovan nämnda Rörsvep.

## Montering av Hygienbälte i bäckenhöjd



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25



2x Art.nr HWH70

Fäst det öljetterade bandet med en ratt i en Rörklämma för 25mm rör runt stolens benrör. Om hygienbältet har släta bandändar så fäster man bandet med trekant och sölja i ovan nämnda Rörklämma.

# Montering av Bodypoints Hygienbälte

Etac Mobilette

## Montering av Hygienbälte i brösthöjd



Fäst det öljetterade bandet med en ratt i en Rörklämma för 25mm rör runt stolens ryggstödsrör. Om hygienbältet har släta bandändat så fäster man bandet med trekant och sölja i ovan nämnda Rörklämma.

### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25



2x Art.nr HWH70

## Alternativ montering av Hygienbälte i brösthöjd



Fäst det öljetterade bandet med en ratt i en Rörklämma för 25mm rör runt stolens ryggstödsrör bakom ryggstödet. Om hygienbältet har släta bandändar så fäster man bandet med trekant och sölja i ovan nämnda Rörklämma.

### Fästdetaljer



2x Art.nr HW320-25



2x Art.nr HWH70

## Montering av Hygienbälte i bäckenhöjd



Fäst det öljetterade bandet med en ratt i en Rörklämma för 25mm rör runt stolens benrör. Om hygienbältet har släta bandändat så fäster man bandet med trekant och sölja i ovan nämnda Rörklämma.

### Fästdetaljer



2x Art.nr HW320-25



2x Art.nr HWH70

# Montering av Bodypoints Hygienbälte

ETAC Heron

## Montering av bröstsele - övre band



## Montering av bröstsele - nedre band



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25



Medföljer selen

## Montering av Hygienbälte i brösthöjd



### Fästdetaljer



Medföljer selen

## Montering av Hygienbälte i bäckenhöjd - sedd underifrån



### Fästdetaljer



Medföljer selen



# Montering av Bodypoints Hygienbälte

Invacare Aquatec Ocean, VIP, 2, XL, Dual Vip, Ergo, Ergo Vip, Ergo dual Vip, Ergo XL

## Montering av Hygienbälte i bäckenhöjd



2x Art.nr HW310-25

2x Art.nr HWH70

## Montering av Hygienbälte i brösthöjd



2x Art.nr HW310-25

2x Art.nr HWH70

# Montering av Bodypoints Hygienbälte

HMN Mini, M2, M2 smal, M2 200kg, M2 300kg

## Montering av Hygienbälte i bäckenhöjd



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25 Medföljer selen

## Montering av Hygienbälte i brösthöjd



### Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25 Medföljer selen

# Montering av Bodypoints Hygienbälte

## Minicrosser Swing

---

Montering av Hygienbälte i brösthöjd



Fästdetaljer



2x Art.nr HW310-25



2x Art.nr HWH70

# Montering av Bodypoints Hygienbälte

Anatomic Sitt - Zitzi Sharky Pro, Zitzi Delphi Pro, Zitzi Starfish, Zitzi Starfish Pro

## 2-Punkts höftbälte



Använd Anatomic Sitts fäste för höftbälten.



Medföljer bältet

## Evoflex



Använd 22 mm rörklämma av aluminium och medföljande fläsmutter för infästning av Evoflex.



2x Art.nr HW310-22



Medföljer bältet

## 4-Punkts höftbälte



**Bakre band:** Använd Anatomic Sitts fäste för höftbälten.  
**Framre band:** Använd Anatomic Sitts fäste för höftbälten.



Medföljer bältet

# Montering av Bodypoints Hygienbälte

Anatomic Sitt - Zitzi Sharky Pro, Zitzi Delphi Pro, Zitzi Starfish, Zitzi Starfish Pro

## Bröstsele - övre band



Använd Anatomic Sitts fäste för bröstselar.

## Bröstsele - nedre band



Använd Anatomic Sitts fäste för bröstselar.



Medföljer bältet

## Monoflex



Fäst trekanten i ryggprofilens skena med befintlig skruv.



Medföljer bältet







ETT BÄTTRE LIV