


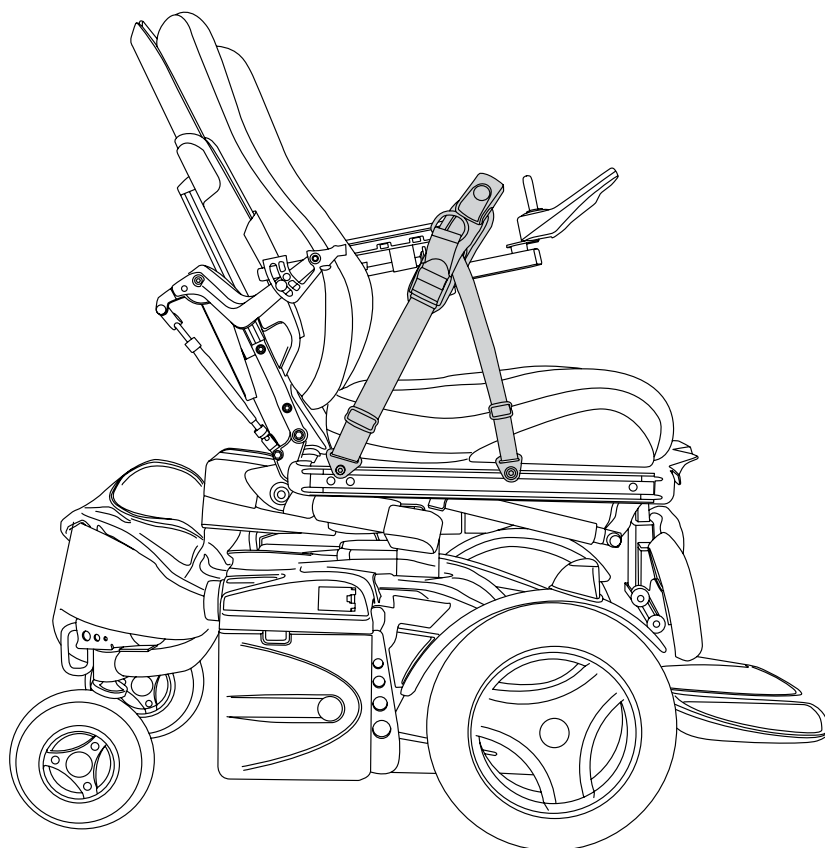

Monteringsguide

för bälten och selar från Bodypoint

Elrullstolar & arbetsstolar

Detta är ett komplement till bruksanvisningen som medföljer produkten och visar monteringsförslag på manuella rullstolar, elrullstolar, arbetsstolar och hygienstolar som HEA Medical testat och som faller inom ramen för vad tillverkarna anvisar. Vad en viss brukare behöver för god säkerhet, stabilitet och komfort kan kräva andra lösningar med hänsyn till förmåga, förväntningar och miljö.

Monteringsguiden fokuserar på fästdetaljer som används för montering på stolen. Placeringen av fästdetaljer är vägledande. Vad som är rätt position för varje individ måste provas ut av kvalificerad personal.

Monteringsförlag av bälten och selar från Bodypoint

Positioneringshjälpmedel kan endast tillhandahålla funktion och säkerhet när de har monterats i enlighet med användarens individuella behov, baserat på en klinisk bedömning.

Höftbälten för bäckenpositionering. Vanligaste sittpositionen är bakåttippat bäcken. Bältet ska då placeras över låren och dras nedåt, som bilderna visar, för att förhindra att låren eller baken glider över sitsen, under förutsättning att detta är kliniskt korrekt och tolereras av rullstolsanvändaren.

OBS! Ett felaktigt placerat höftbälte eller ett för löst fastsatt bälte kan leda till att användaren glider framåt och under bältet med risk för strypning. Den

korrekta placeringen av bältet måste alltid verifieras av erfaren professionell personal som utbildar användaren och vårdpersonal för att säkerställa korrekt daglig användning.

OBS! En bröstsele eller bröstbälte ska alltid användas tillsammans med ett höftbälte eller liknande stöd för bäckenet.

HEA Medical och Bodypoint erbjuder ett stort sortiment av fästdetaljer för vanliga rullstolar. I stolen/ bältets/ selens bruksanvisning finns de generella anvisningarna från tillverkaren, CE-rättsinnehavarna. Här är förslag som HEA testat och som faller inom ramen för vad tillverkarna anvisar. Bodypoints positioneringshjälpmedel är




CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet MDR. Om de provas ut och monteras av sakkunnig personal som följer rullstolens bruksanvisning och dessa förslag, som faller inom ramarna för Bodypoints bruksanvisningar, blir kombinationen inte en specialanpassning och all CE-märkning kvarstår.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Beslag och fästdetaljer	3
Eurovema DX Compact, DX Compact Junior	4
Eurovema Sitrite, Sitrite ABC, Miniflex Classic	5
Invacare Orion	6
Permobil Koala	7
Invacare Kite modulite, modulite Flex 3, Bora modulite, Aviva, TDX SP2	8-9
Mercado Real 6100 barn & vuxen, Vuxen plus 9000/9100, Barn plus 9000/9300/9400	10-11
Permobil C400, C500, K300, M400 PSJR, Corpus HD, X850, X850 TS, X850 TS Junior, F3, F5, F5 VS, M3, M5	12-13
Invacare Orion Metro	15
LB Medical Ichair mc2, Ichair mcS	16-17
LB Medical Ortocar	18
Minicrosser M1 Ergo 2	18
Minicrosser M1 Ergo comfort, X2	19
Sunrise Q300M Mini Kids/Teens, Q300R Kids/Teens	20-21
Sunrise Q300M Mini Q300R Q400F	22-23
Sunrise Quickie Q300M Mini Q300R Q400F med Sedeo Lite	22-24
Sunrise Medical Sterling Opal, Elite	25
Sunrise Quickie Q700 M HD	26-27

Så trär du bandet genom Trekanten och söljan



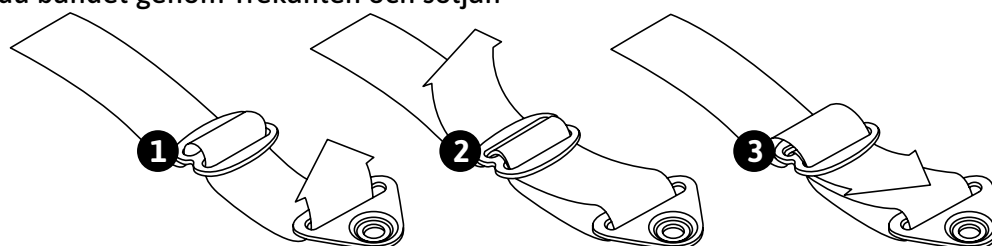


Trä först bandet genom söljan, därefter genom trekanten.

Trä sedan bandet tillbaka genom söljan.

Lås bandet genom att åter igen trä bandet genom söljan.

Beslag & Fästdetaljer som använts i denna guide.

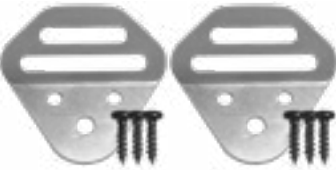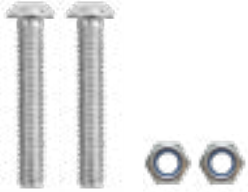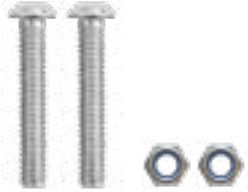 Trekant, 6 mm hål, 25 mm Art.nr FS112 37 mm Art.nr FS113 50 mm Art.nr FS114	 Sölja, 25 mm Art.nr FS122 37 mm Art.nr FS123 50 mm Art.nr FS124	 Trehåls bandfäste Art.nr 3702	 Monteringssats M8x20 Art.nr C115
 Monteringssats M6x30 skruv, låsmutter & bricka Art.nr C117	 Monteringssats M6x35 skruv & låsmutter Art.nr C118	 Monteringssats M8x35 skruv & låsmutter Art.nr C120	 Monteringssats M6x12 skruv, låsmutter & bricka Art.nr C121
 Monteringssats M6x16 skruv, låsmutter & bricka Art.nr C122	 Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd Art.nr HKA10	 Rörsvep Ø15 mm rör Art.nr HKH31	

Monteringssatser för Etac Cross

För bälte Small  Trekant, 8mm hål, 25 mm Art.nr FS112-8  	För bälte Medium  Trekant, 8 mm hål, 37 mm Art.nr FS113-8  	För bälte Large  Trekant, 8 mm hål, 50 mm Art.nr FS114-8  
Monteringssats för Cross, 25 mm Art.nr C112	Monteringssats för Cross, 37 mm Art.nr C113	Monteringssats för Cross, 50 mm Art.nr C114

2-Punkts höftbälte



Fäst den medföljande trekanten med befintlig skruv som bilden visar. Lås med söljan.

Detta behöver du



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte




Fäst Trehåls bandfäste med M6-bult i de gängade hålen under sitsen. Se Nedersta bilden på sidan.

Detta behöver du



Art.nr 3702

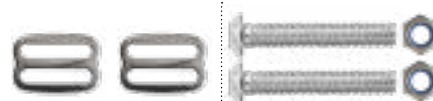

Medföljer bältet

Art.nr C118

4-Punkts höftbälte




Fäst Trehåls bandfäste med M6 bult i de gängade hålen under sitsen. Se Nedersta bilden på sidan.

Detta behöver du



2x Art.nr 3702

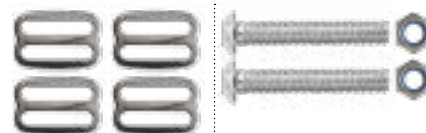

Medföljer bältet

2x Art.nr C118

4-Punkts höftbälte sedd underifrån



2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med armstödsfästets befintliga skruv. Lås med söljan.

Detta behöver du



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten med armstödsfästets befintliga skruv. Lås med söljan.
Främre band: Fäst Trehåls bandfäste med de medföljande träskruvarna under sitsen.
Se Nedersta bilden på sidan.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr 3702

Montering sedd underifrån



2-Punktsmontering



Trekanten (art.nr C112, ingår ej) fästs i stolens befintliga hål med insex M8x16-bult.

Detta behöver du



Art.Nr C112

Evoflex



Evoflex fästs i ryggens infästning hål med insex M8x16-bult.

Detta behöver du




Art.nr C123

4-Punktsmontering



Bakre band: Trekanten (art.nr C112) fästs i stolens befintliga hål med insex M8x16-bult.
Främre band: Trekanten fästs i stolens befintliga hål med insex M6x16 och mutter.

Detta behöver du

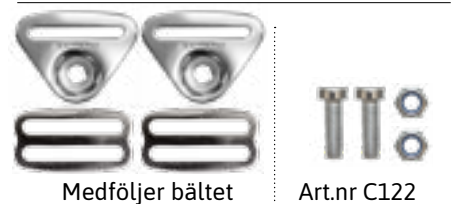

Medföljer bältet

Art.nr C122



Art.Nr C112

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKA10

Evoflex



Fäst Evoflex med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena. Använd monteringsatsens bricka.

Detta behöver du



Art.nr HKA10

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena.

Främre band: Fäst trekanten med Fästsats för profilskena med 10 mm öppningsvidd (Art.nr HKA10) i rullstolens profilskena.

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HKA10

Bröstsele - övre band



För stolar nackstöd så kan ett E-rör monteras.

Detta behöver du



Art.nr 37619K

Bröstsele - nedre band



Fästs trekanten i ryggstödsrörets gängade hål med M8- bult (medföljer ej).

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C120

Monoflex



Lossa plattan på ryggens framsida. Fäst därefter trekanten med genomgående M6 bult och mutter i ryggens slits. Använd brickor för att distansera trekanten.

Detta behöver du



Art.nr C117



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte



Fäst bandet med trehåls bandfäste på träsitsens undersida. Observera att endast bälten med 25mm och 37mm bandbredd passar i beslaget.

Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte sedd underifrån



Fäst både bakre och främre band på valfritt avstånd med trehåls bandfäste på träsitsens undersida. Observera att endast bälten med 25mm och 37mm bandbredd passar i beslaget.

Detta behöver du



2x Art.nr 3702



Medföljer bältet

Evoflex



Fäst med rörsvep runt armstödsfästets rör.

Detta behöver du



Art.nr HKH31



Medföljer bältet

Bröstsele - övre band



Använd Fäste för H-sele (Art.nr 804184). Beställs styckvis av Mercado Medic.
Obs! Bilden visar bara hur ett av två fästen är monterat.

Detta behöver du



Art.nr 804184

Bröstsele - nedre band



Fäst bandet med trehåls bandfäste på tråryggens baksida.

Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet

Monoflex



Fäst bandet med trehåls bandfäste på tråryggens baksida.

Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte



Trekanten fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult (medföljer ej).

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C121

Evoflex



Evoflex fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult, mutter och bricka (medföljer ej).

Detta behöver du



Art.nr C121

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Trekanten fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult (medföljer ej).

Främre band: Trekanten fästs i sitsens profilskena med M6x12-bult (medföljer ej).

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr C121

Bröstsele - övre band



Använd Bodypoints monteringsfäste för bröstselars övre band.

Detta behöver du



Monteringsfäste bröstselar
Längd 150 mm Art.nr HW100-150-2
Längd 200 mm Art.nr HW100-200-2



Adapter med fäst detaljer
Small Art.nr HW105S-1
Large Art.nr HW105L-1

..... +



Bandlås med lock Art.nr FS134

← eller →



Bandlås av plast Art.nr FS137

Bröstsele - nedre band



Fästs trekanten i ryggplattans befintliga skruv.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Monoflex



Fäst trekanten i ryggplattans befintliga skruv.

Detta behöver du



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i hålet med M8 bult och mutter.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

Evoflex



Fäst trekanten i hålet med M8x20 bult och mutter.

Detta behöver du



Art.Nr C115

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med M8 bult och mutter.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

4-Punkts höftbälte




Fäst trekanten med M8 bult och mutter. Fäst den främre trekanten med M6 bult på sitsramens undersida.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

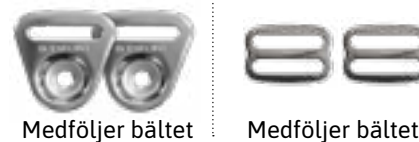

Medföljer bältet

Medföljer bältet

Evoflex



Fäst bältet med M8x20 bult och mutter.

Detta behöver du



Art.Nr C115

Bröstsele - övre band



Montera ett E-rör med fäste för sexkantsrör på huvudstödsstolpen.

Detta behöver du



Art.Nr 37612M

Bröstsele - nedre band



Fäst trekanten med M6x10 mm bult i det nedersta av hålen i ryggstödsrören.

Detta behöver du



Art.Nr C122



Medföljer selen

Monoflex



Fäst trekanten med M6x10 mm bult i det näst översta hålet i ryggstödsrören.

Detta behöver du



Art.Nr C122



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i hålet med M8 bult.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

Minicrosser M1 Ergo 2

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med den främre av armstödet bultar.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i sitsens befintliga bult. Val av monteringsats är beroende av bältets storlek.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten i sitsens befintliga bult. Val av monteringsats är beroende av bältets storlek.

Främre band: Använd Minicrossers C-skenebeslag (Art.nr SR-00022) och en M8-bult för att fästa trekanten i sitsens profilskena.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114



Art.nr SR-00022



Medföljer bältet

Evoflex



Fäst Evoflex i sitsens befintliga bult.

Detta behöver du

2-Punkts höftbälte



Fäst trekant och sölja i ramens befintliga hål.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

4-Punkts höftbälte



Fäst trekant och sölja i ramens befintliga hål.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114



Passar de främre banden Art.Nr C112

Evoflex



Fäst Evoflex med M8x35 bult och mutter, använd bältets medföljande bricka.

Detta behöver du



Art.nr C120

Bröstsele - övre band



Bröstsele - övre band. Använd nackstödsdistans från Sunrise (Art.nr 22809015) Distansen monteras enligt bild, men på insidan på KIDS.
+ FS137 Bandlås med lock av plast.

Detta behöver du



Art.nr HW105S-SUN



Art.nr 22809015



Art.nr FS137

Bröstsele - nedre band



Trä bandet runt ryggstödsröret i bältets medföljande sölja. Alternativt i något av hålen med C112/C113/C114.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Monoflex



Trä bandet runt ryggstödsröret i bältets medföljande sölja.

Detta behöver du



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte



Fäst trekant och sölja i ramens befintliga hål.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C121

4-Punkts höftbälte




Fäst trekant och sölja i ramens befintliga hål med M6x16 skruv och mutter..
För tillbehörsskena behövs Bältesfäste för tillbehörsskena, beställas från Sunrise,
Art.nr 22809095

Detta behöver du



Medföljer bältet

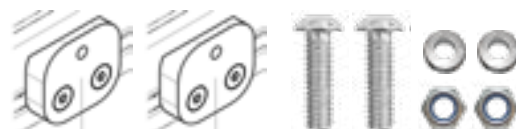

2x Art.nr 22809095

2x Art.nr C121

Evoflex



Fäst Evoflex med M6x12 bult och mutter, använd bältets medföljande bricka.

Detta behöver du



Art.nr C121

4-Punkts höftbälte Alternativ montering




Fäst trekant och sölja i ramens befintliga hål med M6x16 skruv och mutter..

Detta behöver du



Medföljer bältet

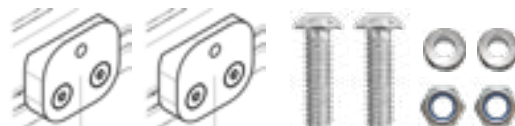

4x Art.nr 22809095

2x Art.nr C121

Evoflex Alternativ montering




Fäst Evoflex med M6x12 bult och mutter, använd bältets medföljande bricka.

Detta behöver du



Art.nr C121

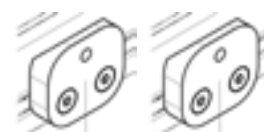

2x Art.nr 22809095

Bröstsele - övre band



Fäst bröstselens övre band med Bodypoints monteringsfäste för bröstselar (Art.nr HW105S-SUN). Använd nackstödsdistans från Sunrise (Art. nr 22809015) Distansen monteras enligt bild på insidan.
+ FS137 Bandlås med lock av plast.

Detta behöver du



Art.nr HW105S-SUN



Art.nr 22809015



Art.nr FS137

Bröstsele -nedre band



Trä bandet runt ryggstödsröret i bältets medföljande sälja.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Monoflex



Fäst bröstbältets medföljande trekanten på ryggstödsröret med ett rörsvep.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HW303

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

Detta behöver du



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Montering sedd underifrån



Bakre band: Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

Främre band: Fäst trekanten i befintlig skruv under sitsen.

Detta behöver du

2-Punkts höftbälte



Fäst trekant och sölja i ramens befintliga hål.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C122

4-Punkts höftbälte



Fäst trekant och sölja i ramens befintliga hål med M6x16 skruv och mutter..

Detta behöver du



Medföljer bältet

Evoflex



Fäst Evoflex med M6x12 bult och mutter, använd bältets medföljande bricka.

Detta behöver du



Art.nr C121

Monoflex



Detta behöver du



Medföljer bältet



ETT BÄTTRE LIV