


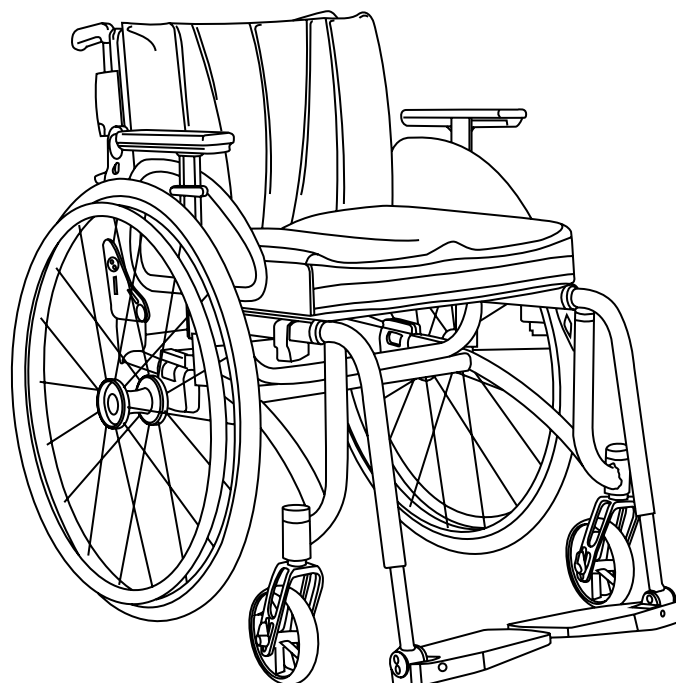

Monteringsguide


för bälten och selar från Bodypoint

Manuella rullstolar

Detta är ett komplement till bruksanvisningen som medföljer produkten och visar monteringsförslag på manuella rullstolar, elrullstolar, arbetsstolar och hygienstolar som HEA Medical testat och som faller inom ramen för vad tillverkarna anvisar. Vad en viss brukare behöver för god säkerhet, stabilitet och komfort kan kräva andra lösningar med hänsyn till förmåga, förväntningar och miljö.

Monteringsguiden fokuserar på fästdetaljer som används för montering på stolen. Placeringen av fästdetaljer är vägledande. Vad som är rätt position för varje individ måste provas ut av kvalificerad personal.

Monteringsförlag av bälten och selar från Bodypoint

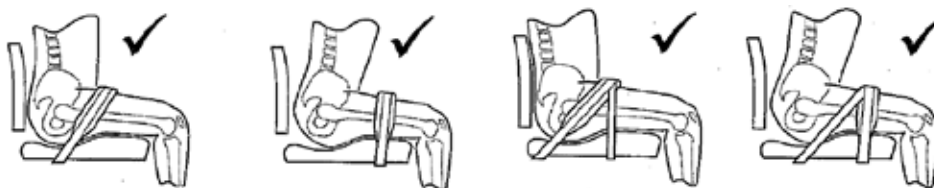

Positioneringshjälpmedel kan endast tillhandahålla funktion och säkerhet när de har monterats i enlighet med användarens individuella behov, baserat på en klinisk bedömning. Höftbälten för bäckenpositionering. Vanligaste sittpositionen är bakåttippat bäcken. Bältet ska då placeras över låren och dras nedåt, som bilderna visar, för att förhindra att låren eller baken glider över sitsen, under förutsättning att detta är kliniskt korrekt och tolereras av rullstolsanvändaren.

OBS! Ett felaktigt placerat höftbälte eller ett för löst fastsatt bälte kan leda till att användaren glider framåt och under bältet med risk för strypning. Den korrekta placeringen av bältet måste alltid verifieras av erfaren professionell personal som utbildar användaren och vårdpersonal för att säkerställa korrekt daglig användning.

OBS! En bröstsele eller bröstbälte ska alltid användas tillsammans med ett höftbälte eller liknande stöd för bäckenet.

HEA Medical och Bodypoint erbjuder ett stort sortiment av fästdetaljer för vanliga rullstolar. I stolen/ bältets/ selens bruksanvisning finns de generella anvisningarna från tillverkaren, CE-rättsinnehavarna. Här är förslag som HEA testat och som faller inom ramen för vad tillverkarna anvisar. Bodypoints positioneringshjälpmedel är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet MDR. Om de provas ut och monteras av sakkunnig personal som följer rullstolens bruksanvisning och dessa förslag, som faller inom ramarna för Bodypoints bruksanvisningar, blir kombinationen inte en specialanpassning och all CE-märkning kvarstår.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Monteringsfäste för Bröstselar	3
Beslag och fästdetaljer	4-5
Anatomic Sitt Seabass, Flipper Pro FLex, Guppy (Zitzi Sharky Pro & Zitzi Delphi Pro)	6-7
Cobi Rehab Kamille	8-9
Etac Cross 5, Cross 5 XL	10-11
Etac Cross 6	12-13
Etac Prio	14-15
Etac Xact	16-17
Etac Kudu	18-19
HD Rehab Balance	20-21
HD Rehab Motion	22-23
Invacare Azalea Flex 3	24-25
Invacare Azalea Max & Minor	26-27
Invacare XLT, XLT Max	28-29
Panthera Bambino 3	30-31
Panthera S3, U3	32-33
R82 Multiframe X-panda	34-35
Ottobock Kimba neo	36-37
Ottobock Start junior	38-39
Ottobock Avantgarde Teen	40-41
Ottobock Avantgarde XXL2	42-43
Mercado Real 6100 barn & vuxen, Vuxen plus 9000/9100, Barn plus 9000/9300/9400	44-45
Invacare Action junior	46
Küshall	47
Quickie Helium, Nitrum	48
Quickie M6	49
Quickie QS5X	50
Quickie Xenon, Xenon 2	51

Monteringsfäste för bröstselar med åtdrag framifrån



E-rör för Cross

Gör det möjligt att fästa bröstselars övre axelband på rullstolar som saknar lämpliga fästpunkter och som har ett 15x15 mm fyrkantsrör som nackstödsfäste.

Passar rullstolsmodeller: ETAC Cross · ETAC Panther

Art.nr 37612K



E-rör för REA & HD

Gör det möjligt att fästa bröstselars övre axelband på rullstolar som saknar lämpliga fästpunkter och som har ett plattovalt nackstödsfäste.

Passar rullstolsmodeller: HD Balance 16, Balance 24 · HD 500, 600 & 650 · HD Humlan 500 & 650 · HD 500 & 600 Barn · Handicare Emineo & Cirrus · REA Azalea, Assist, Bellis, Comfort & Dahlia

Art.nr 37619K

Beslag & Fästdetaljer som använts i denna guide.



Trekant, 6 mm hål, 25 mm
Art.nr FS112



Trekant, 6 mm hål, 37 mm
Art.nr FS113



Trekant, 6 mm hål, 50 mm
Art.nr FS114



Sölja, 25 mm
Art.nr FS122



Sölja, 37 mm
Art.nr FS123



Sölja, 50 mm
Art.nr FS124



Fäste för Panthera
Art.nr 37630

Monteringssatser för Azalea



Beslag för Azalea 25 mm
Art.nr HKH21



Beslag för Azalea 37 mm
Art.nr HKH22



Beslag för Azalea 50 mm
Art.nr HKH23

Monteringssatser för Etac Cross

För bälte Small



Trekant, 8 mm hål, 25 mm
Art.nr FS112-8



Monteringssats för Cross, 25 mm
Art.nr C112

För bälte Medium



Trekant, 8 mm hål, 37 mm
Art.nr FS113-8



Monteringssats för Cross, 37 mm
Art.nr C113

För bälte Large




Trekant, 8 mm hål, 50 mm
Art.nr FS114-8



Monteringssats för Cross, 50 mm
Art.nr C114

Så trär du bandet genom Trekanten och söljan

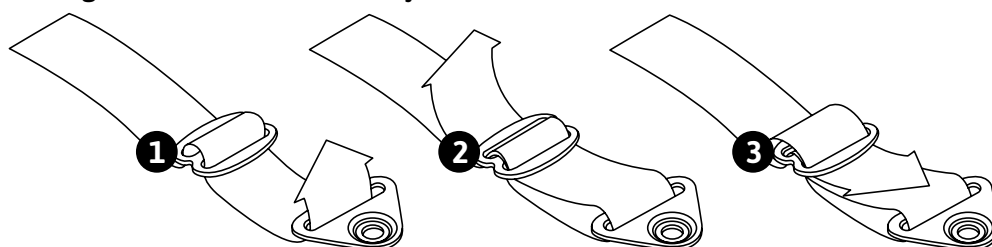

Trä först bandet genom söljan, därefter genom trekanten.

Trä sedan bandet tillbaka genom söljan.

Lås bandet genom att åter igen trä bandet genom söljan.


Beslag & Fästdetaljer som använts i denna guide.



Rörklämma för 22 mm rör
Art.nr HW310-22



Rörklämma för 25 mm rör
Art.nr HW310-25

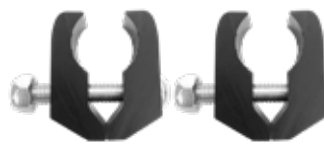

Rörklämma för 19 mm rör
Art.nr HKH30



Rörsvep för 22 & 25 mm rör
Art.nr HW303



Rörsvep Ø15 mm rör
M8x16 skruv och mutter
Art.nr HKH31



Rörsvep för Ø28 mm rör
M8x16 skruv och mutter
Art.nr HKH32



Rörsvep 27-33 mm, rostfritt stål
Art.nr HW320-27-33



Rörsvep 32 mm av rostfritt stål
Art.nr HW320-32



Monteringssats M6x16
2x (skruv, låsmutter & bricka)
Art.nr C122



Monteringssats M6x25
2x (skruv, låsmutter & bricka)
Art.nr C125



Monteringssats M6x30
2x (skruv, låsmutter & bricka)
Art.nr C117



Monteringssats M6x35
2x (skruv & låsmutter)
Art.nr C118



Monteringssats M8x20
Art.nr C115




Monteringssats M5
Art.nr C124



**Fästsats för profilskena med
10 mm öppningsvidd**
Art.nr HKA10



T-skruv med mutter
Art.nr HKH10

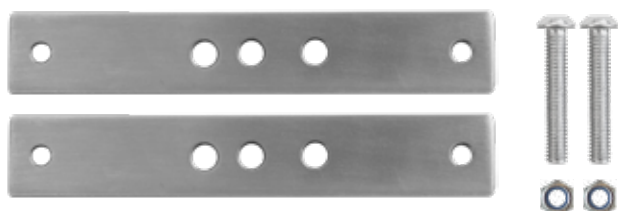

Beslag för Invacare XLT
Art.nr C116



Trehåls bandfäste
Art.nr 3702



Beslag för Cross 5 profilskena
Art.nr 37602C3A

2-Punkts höftbälte



Använd Anatomic Sitts fäste för höftbälten.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Evoflex



Använd 22 mm rörklämma av aluminium och medföljande flänsmutter för infästning av Evoflex.

Detta behöver du



2x Art.nr HW310-22



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Använd Anatomic Sitts fäste för höftbälten.
Främre band: Använd Anatomic Sitts fäste för höftbälten.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Bröstsele - övre band



Använd Anatomic Sitts fäste för bröstselar.

Detta behöver du

Bröstsele - nedre band



Använd Anatomic Sitts fäste för bröstselar.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Monoflex



Fäst trekanten i ryggprofilens skena med befintlig skruv.

Detta behöver du



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte



Använd Cobi fäste för positioneringssele. Finns två varianter, liten och stor. (Beställs separat i par av Cobi)

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr 0350-999090

Art.nr 0350-999091

4-Punkts höftbälte



Använd dubbla Cobi fäste för positioneringssele. Finns två varianter, liten och stor. (Beställs separat i par av Cobi)

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr 0350-999090

Art.nr 0350-999091

Bröstsele - övre band



Använd Cobi fäste för positioneringssele. Finns två varianter, liten och stor. (Beställs separat i par av Cobi)

Detta behöver du



Medföljer selen



2x Art.nr 0350-999090

Bröstsele - nedre band



Använd Cobi fäste för positioneringssele. Finns två varianter, liten och stor. (Beställs separat i par av Cobi)

Detta behöver du



Medföljer selen



2x Art.nr 0350-999090

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i det förborrade hålet för transportfästet. Val av monteringssats är beroende av bältets storlek (beställs separat).

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

Evoflex



Vår rekommendation är att Evoflex fästs enligt bilden, dvs. i det förborrade hålet för transportfästet. M8x20 bult och låsmuttrar behövs (beställs separat).

Detta behöver du



Art.Nr C115

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten i det förborrade hålet för transportfästet. Val av monteringssats är beroende av bältets storlek.


Främre band: Använd bältets medföljande trekant och fäst i slitsen för bromsen med M6x30 bult, bricka och låsmutter (beställs separat)

För montering med de smala banden bakåt.
Beställ art.nr C112 och art.nr C117. Gäller alla bältesstorlekar.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114

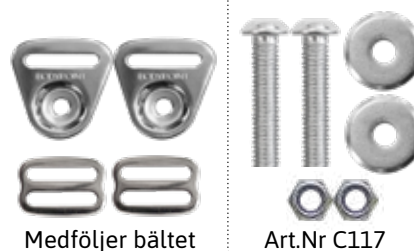

Art.Nr C117

Bröstsele - övre band



För stolar med Crossrygg 3 används Monteringsfäste för bröstselar. Om nackstöd finns så räcker det med ett E-rör (Art.nr 37612K).

Detta behöver du



Art.nr
3760C3-32
3760C3-37
3760C3-42
3760C3-47

För stolsbredd
35–37,5cm
40–42,5cm
45–47,5cm
50–52,5cm

Bröstsele - nedre band



Fäst den medföljande trekanten med T-skruv och mutter (ingår ej) i ryggstödsrörets profilskena.

Detta behöver du



Medföljer selen



Art.nr HKH10

Monoflex




Använd Monteringssats (Art.nr 37602C3A) i ryggstödsrörets profilskena.

Detta behöver du



Medföljer selen

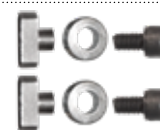

Art.nr 37602C3A

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med en M6x16 bult och mutter (C122) i ramens slits. Använd inte brickan. (beställs separat).

Detta behöver du



Art.nr C122



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Fäst den bakre trekanten med en M6x16 bult och mutter (C122) i ramens slits. Använd inte brickan. (beställs separat).

Den främre trekanten fäst med en M6x25 bult, bricka och mutter (C125) i spåret för bromsen. Använd brickan mellan muttern och ramen. (beställs separat).

Detta behöver du



Art.nr C122

Art.nr C125



Medföljer bältet

Evoflex



Fäst Evoflex med C125 och bältets medföljande bricka i ramens slits. Använd den stora brickan mellan Evoflex och stolen. (beställs separat).

Detta behöver du



Art.nr C125



Medföljer bältet

Bröstsele - övre band



För stolar med Crossrygg 3A används Monteringsfäste för bröstselar. Om nackstöd finns så räcker det med ett E-rör (Art.nr 37612K).

Detta behöver du



Art.nr
3760C3-32
3760C3-37
3760C3-42
3760C3-47

För stolsbredd
35-37,5cm
40-42,5cm
45-47,5cm
50-52,5cm

Bröstsele - nedre band



Fäst den medföljande trekanten med T-skruv och mutter (ingår ej) i ryggstödsrörets profilskena.

Detta behöver du



Medföljer selen



Art.nr HKH10

Monoflex




Använd Monteringssats (Art.nr 37602C3A) i ryggstödsrörets profilskena.

Detta behöver du



Medföljer selen

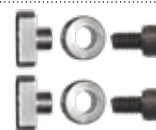

Art.nr 37602C3A

2-Punkts höftbälte



För bälten small och medium - Använd stolens befintliga slits.
För large-bälten - Fäst den medföljande trekanten med Monteringssats M6x16 (Art.nr C122) i stolens slits.

Detta behöver du




Medföljer bältet



Art.nr C122

Evoflex

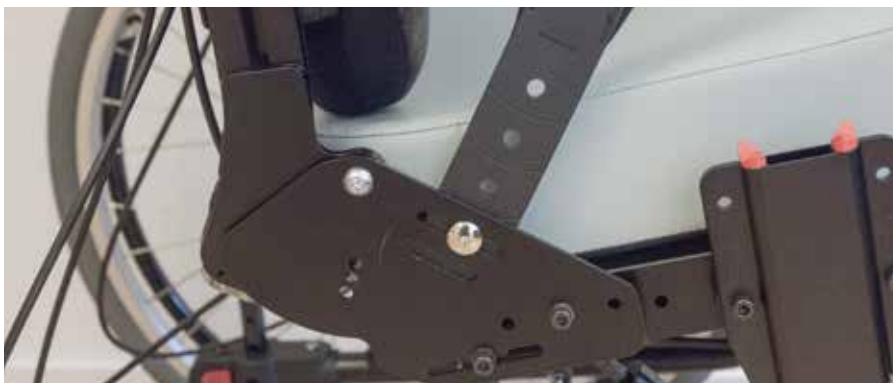

Använd medföljande skruv och mutter. Fäst i stolens slits.

Detta behöver du



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Trä bandet runt stolens ram och fäst med den medföljande söljan.
För bakre band - Se Tvåpunktsmontering.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Bröstsele - övre band



För stolar med Crossrygg 3A och nackstöd, monter med ett E-rör (Art.nr 37612K).

Detta behöver du



Art.nr 37612K

Bröstsele - nedre band



Använd Monteringssats (Art.nr HKH10) i ryggstödsrörets profilskena.

Detta behöver du



Medföljer selen



Art.nr HKH10

Monoflex




Använd Monteringssats (Art.nr 37602C3A) i ryggstödsrörets profilskena.

Detta behöver du



Medföljer selen

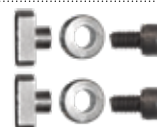


Art.nr 37602C3A

2-Punkts höftbälte



Montera trekanten med M6-skruv i Etacs *Fäste positioneringsbälte* (art.nr 28933). Alternativt montering kan göras i slitsen/hålet på plåten som håller ihop sits och rygg.

Detta behöver du

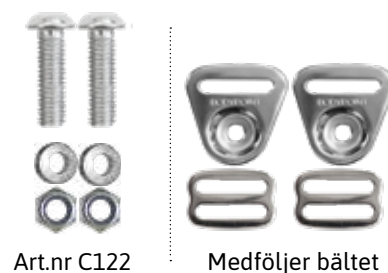


4-Punkts höftbälte



Montera trekanten med M6-skruv i Etacs *Fäste positioneringsbälte* (art.nr 28933). Alternativt montering för det bakre bandet kan göras i slitsen/hålet på plåten som håller ihop sits och rygg.

Detta behöver du

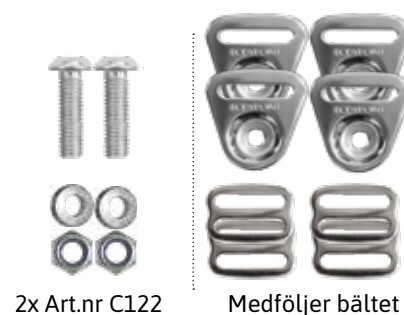

Evoflex



Montera bältet med M6-skruv i Etacs *Fäste positioneringsbälte* (art.nr 28933). Byt ut skruven som medföljer bältet med C122.

Detta behöver du



Monoflex




Använd Monteringssats (Art.nr 37602C3A) i ryggstödsrörets profilskena.

Detta behöver du




Medföljer selen

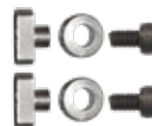


Art.nr 37602C3A

Stolens sits sedd underifrån

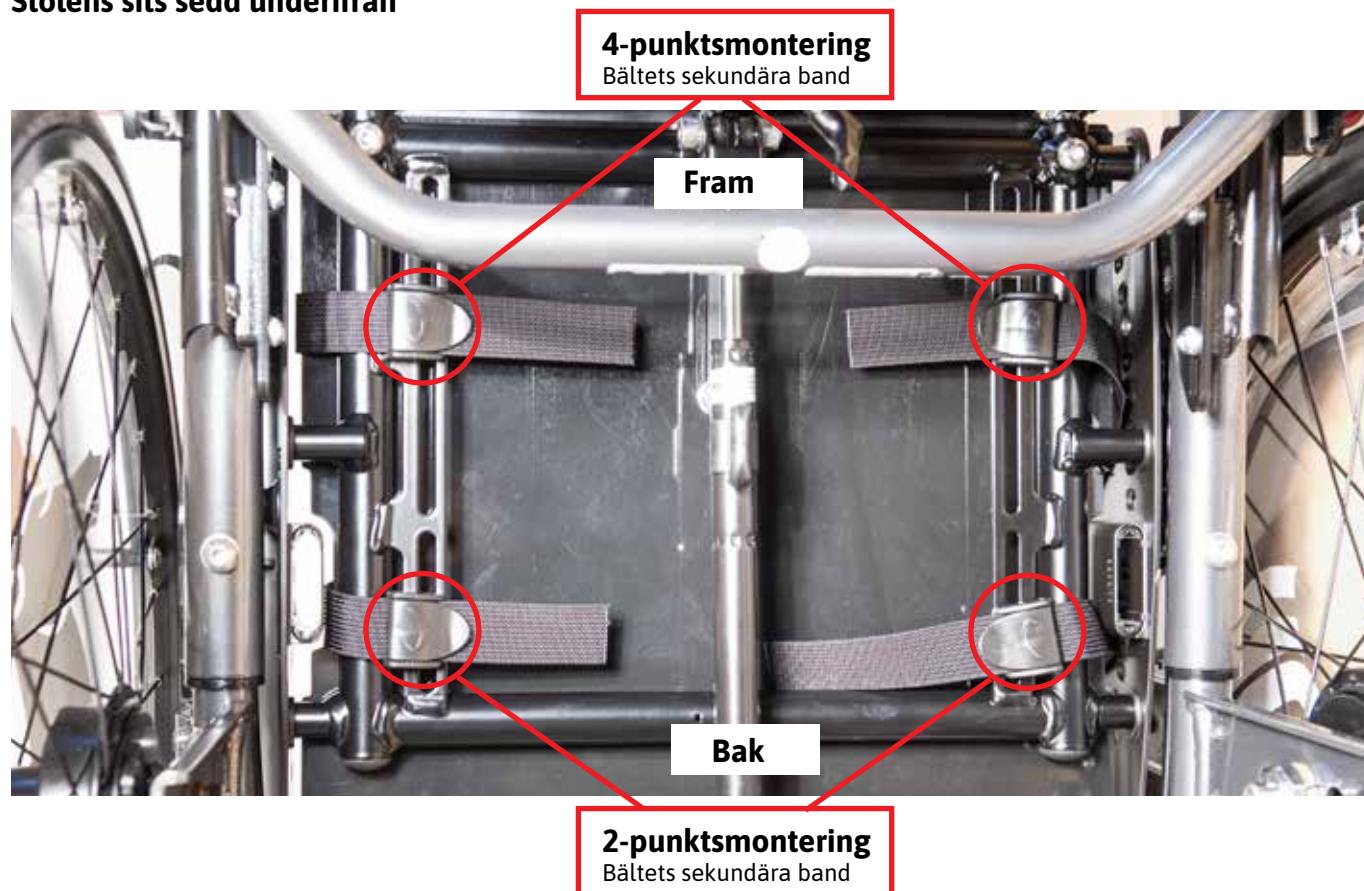

Bröstselen - övre och nedre band

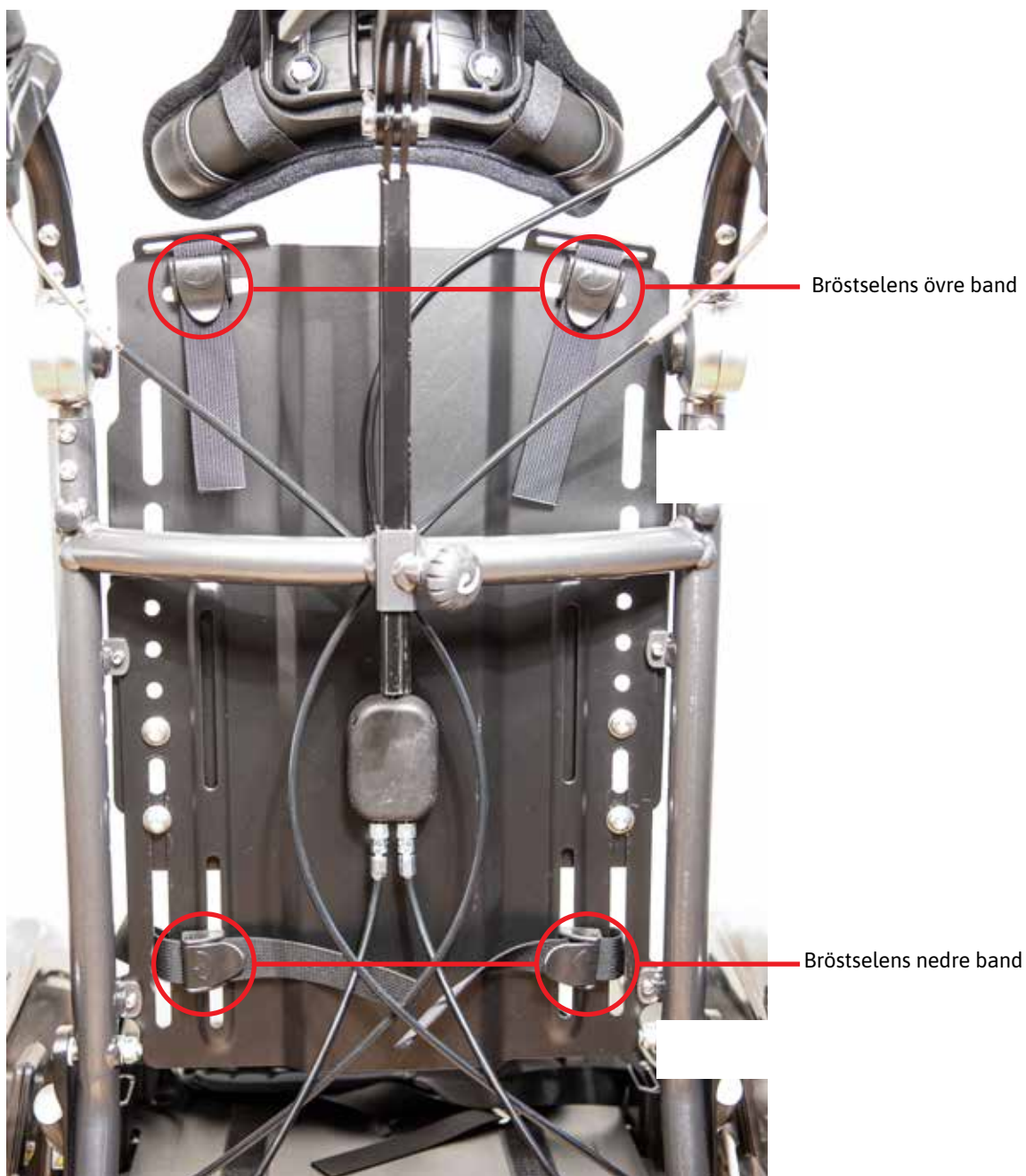

Montera selen så att åtdraget hamnar framför ryggen. Använd ryggens befintliga bandlås.

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten på röret med Ø28mm Rörsvép.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr C112
Passar bälte Medium	Art.Nr C113
Passar bälte Large	Art.Nr C114



Art.Nr HKH32

Evoflex



Fäst Evoflex på röret med Ø28mm Rörsvép.

Detta behöver du



Art.Nr HKH32

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten på röret med Ø28mm Rörsvép.

Främre band: Fäst trekanten på röret med Ø28mm Rörsvép.

OBS! Du kommer att behöva art.nr C112 för det främre 25 mm bandet.

Detta behöver du



2x Passar bälte Small	Art.Nr C112
2x Passar bälte Medium	Art.Nr C113
2x Passar bälte Large	Art.Nr C114



2x Art.Nr HKH32

Bröstselemontering **Alternativ 1**

Beställs från HD Rehab



Övre band

Bröstselesfäste för flexirygge Art.nr 69720-5
Bröstselesfäste för planrygge Art.nr 69730-5
Båda inkluderar fästen för nedre band



Nedre band

HD rehabs fäste för övre band inkluderar fäste för de nedre band.

Bröstselemontering **Alternativ 2**

Beställs från HEA Medical



Övre band

För stolar nackstöd så kan ett E-rör monterats
Art.nr 37619K.



Detta behöver du



Nedre band

Använd medföljande Trekant och sölja.
Beställ Rörsväp Art.nr HW303



Monoflex



Fäst trekanten runt ryggstödsröret med Ø25mm rörklämma, trekant och sölja.

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.Nr HW310-25

2-Punkts höftbälte



Använd Bältesbeslag komplett sats (Beställ av HD Rehab art.nr. 39710) + Bältets medföljande söljor

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr. 39710

4-Punkts höftbälte



Använd Bältesbeslag komplett sats (Beställ av HD Rehab art.nr. 39710) + Bältets medföljande söljor

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr. 39710

Evoflex



Använd medföljande skruv och bricka + HW310-25

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HW310-25

Bröstsele - övre band



Detta behöver du



Art.nr 39750-1

Använd HD rehabs Bröstselefäste komplett sats som innehåller delar för både de övre och nedre banden. (Beställs av HD rehab AB art.nr 39750-1)

Bröstsele - nedre band



Använd HD rehabs Bröstselefäste komplett sats (Beställs av HD rehab AB art.nr 39750-1)

Monoflex



Detta behöver du



Art.nr 39750-1

Använd HD rehabs Bröstselefäste komplett sats (Beställs av HD rehab AB art.nr 39750-1)

2-Punkts höftbälte




Fäst beslaget för Azalea i det förbörade hålet för transportfästet. Val av monterings-sats är beroende bältets bandbredd.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr HKH21
Passar bälte Medium	Art.Nr HKH22
Passar bälte Large	Art.Nr HKH23

Evoflex

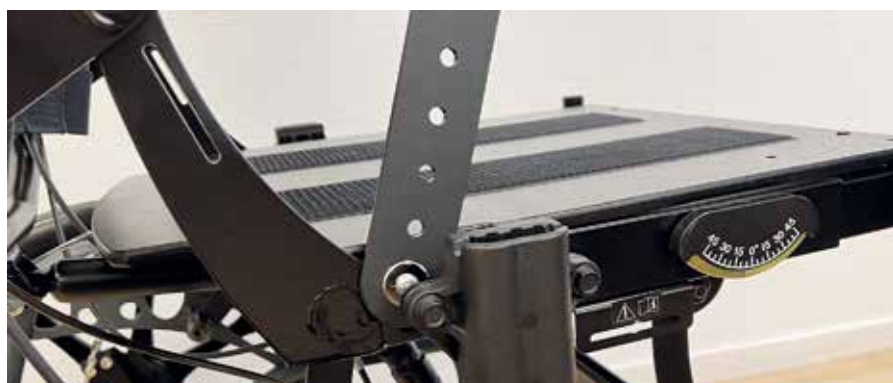

Evoflex fästs i hålet för specialarmstöd. Fäst bältet med M6x35 bult genom medföljande fläsmutter och lås med gummibricka och låsmutter (observera att endast fläsmuttern medföljer). Monteringen är en smidig lösning som bygger minimalt på djupet.

Detta behöver du



Medföljer bältet	Art.Nr C118
------------------	-------------

4-Punkts höftbälte




Bakre band: Fäst beslaget för Azalea i det förbörade hålet för transportfästet. Val av monterings-sats är beroende bältets bandbredd.

Främre band: Använd den medföljande trekanten, fästs i slitsen för bromsen med M6 x 30 bult och låsmutter M6 (ingår ej)

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr HKH21
Passar bälte Medium	Art.Nr HKH22
Passar bälte Large	Art.Nr HKH23

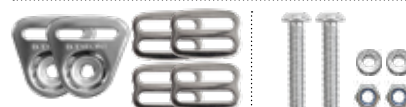

Medföljer bältet	Art.nr C117
------------------	-------------

Bröstsele - övre band



För stolar med nackstöd så kan ett E-rör monteras.

Detta behöver du



Art.nr 37619K

Bröstsele - nedre band



Fästs trekanten runt ryggstödsröret med Ø25mm rörsvep, trekant och sölja.

Detta behöver du



Medföljer selen



Art.Nr HW303

Monoflex




Fästs bandet genom slitsen på ryggrörets baksida med sölja.
Obs! Monteringen kräver att ryggstödet är inställt till en viss höjd.

Detta behöver du



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte

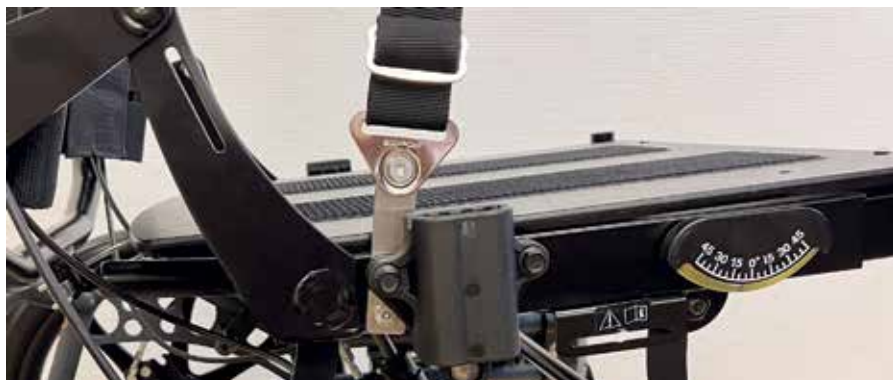


Fäst beslaget för Azalea i det förborrade hålet för transportfästet. Val av monterings-sats är beroende bältets bandbredd.

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr HKH21
Passar bälte Medium	Art.Nr HKH22
Passar bälte Large	Art.Nr HKH23

Evoflex

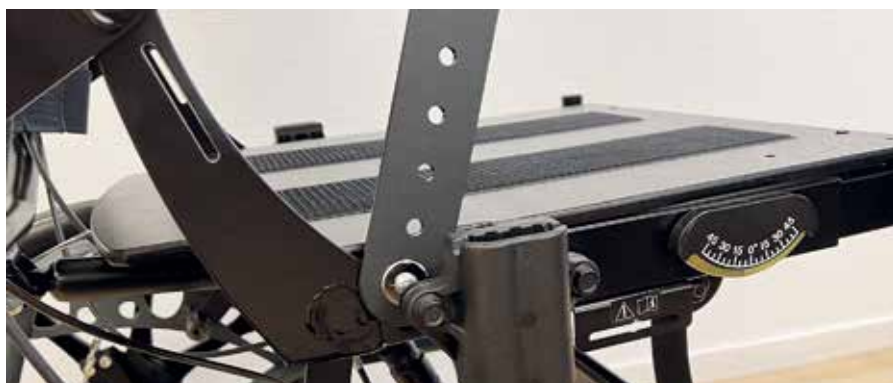

Evoflex fästs i hålet för specialarmstöd. Fäst bältet med M6x35 bult genom medföljande flänsmutter och låsmutter (observera att endast flänsmuttern medföljer). Monteringen är en smidig lösning som bygger minimalt på djupet.

Detta behöver du



Medföljer bältet	Art.Nr C118
------------------	-------------

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst beslaget för Azalea i det förborrade hålet för transportfästet. Val av monterings-sats är beroende bältets bandbredd.

Främre band: Använd den medföljande trekanten, fästs i slitsen för bromsen med M6 x 30 bult och låsmutter M6 (ingår ej)

Detta behöver du



Passar bälte Small	Art.Nr HKH21
Passar bälte Medium	Art.Nr HKH22
Passar bälte Large	Art.Nr HKH23



Medföljer bältet	Art.nr C117
------------------	-------------

Bröstsele - övre band



För stolar nackstöd så kan ett E-rör monteras.

Detta behöver du



Art.nr 37619K

Bröstsele - nedre band



Fästs trekanten runt nedre delen av ryggstödsröret med rörsvep för Ø22 mm rör.

Detta behöver du



Medföljer selen



Art.nr HW303

Monoflex



Fästs trekanten runt ryggstödsröret med rörklämma för Ø19 mm rör.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKH30

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med genomgående bult och mutter på ett tvärgående beslag som skruvas i hjulramen med M6x35 bult och låsmutter. Med beslaget kan höjd och vinkel justeras.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.Nr C116

Evoflex



Evoflex bäckenstöd fästs med ett tvärgående beslag som skruvas i hjulramen med M6x35 bult och låsmutter. Med beslaget kan höjd och vinkel justeras. För montering av bäckenstödet används M8x20 bult, bricka och låsmutter (ingår ej).

Detta behöver du



Art.Nr C116



Art.Nr C115

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst trekanten med genomgående bult och mutter på ett tvärgående beslag som skruvas i hjulramen med M6x35 bult och låsmutter (Medföljer ej).

Främre band: Medföljande trekant fästs i Rörklämma för 22mm rör.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.Nr C116



2x Art.Nr HW310-25

Monoflex



Fästs trekanten runt ryggstödsröret med Ø25mm rörklämma, trekant och sölja.

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.Nr HW310-25

2-Punkts höftbälte



Använd fästplåt för höftbälte av (Beställ Panthera AB Art.nr 9900247)

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr 9900247

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Använd fästplåt för höftbälte av (Beställ Panthera AB Art.nr 9900247)
Främre band: HKH30+medföljande sölja och trekant

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKH30

Art.nr 9900247

Evoflex



Använd HKH30 + M6 45mm skruv och bältets medföljande bricka

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKH30

4-Punkts höftbälte - bakre band



Bakre band: Använd Pantheras klämma (Art.nr 9900250). Beställs av Panthera.

Detta behöver du



2x Art.nr 9900250

4-Punkts höftbälte - Främre band



Främre band: Använd Pantheras klämma (Art.nr 9900250). Beställs av Panthera.



Medföljer bältet

Monoflex



Om körhandtag ej används monteras Monoflex med HKH30 direkt på ryggbågen. När körhandtag används på Bambino, fungerar montering på ryggbåge fortfarande, då man använder ett mittmonterat körhandtag.

2-Punkts höftbälte



Fäst den medföljande trekanten i Använd Pantheras rörklämma för Ø19 mm rör (art.nr 4600008) med genomgående bult och mutter.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKH30

Evoflex



Fäst den medföljande Evoflex i rörklämma för Ø19mm rör med genomgående bult och mutter.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKH30

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst den medföljande trekanten i rörklämma för Ø19mm rör med genomgående bult och mutter.

Främre band: Fäst den medföljande trekanten i ett rörsvep för Ø22 mm rör.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HKH30



Art.nr HW303

Monoflex



När två körhandtag används monteras Monoflex med distans Art.nr C127 med M6x30 Art. nr C117 i hålet i förstärkningstrekanten.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C127



Art.nr C117

Monoflex - alternativ montering



Art.nr HKH30



Medföljer bältet

Om körhandtag ej används monteras Monoflex direkt på ryggbåge med HKH30.

Alternativ montering 4-punktsbälte

4-Punkts höftbälte - bakre band



Bakre band: Använd Pantheras klämma (Art.nr 9900250). Beställs av Panthera.



2x Art.nr 9900250

4-Punkts höftbälte - Främre band



Främre band: Använd Pantheras klämma (Art.nr 9900250). Beställs av Panthera.



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte



Använd stolens befintliga 25mm Fix-lock

4-Punkts höftbälte



Använd stolens befintliga 25mm Fix-lock

Bröstsele - övre band



Använd stolens befintliga 25mm Fix-lock

Bröstsele - nedre band



Använd stolens befintliga 25mm Fix-lock

2-Punkts höftbälte



Fäst bandet med bältets medföljande sölja i det befintliga fästet baktill på stolen.

Detta behöver du



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Fäst det sekundära bandet med bältets medföljande sölja runt stolramens rör.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Bröstselsens övre och undre band




Bröstselsens övre band

Bröstselsens nedre band

Montera selen så att åtdraget hamnar bakom ryggen. Använd ryggens befintliga bandlås.

Monoflex

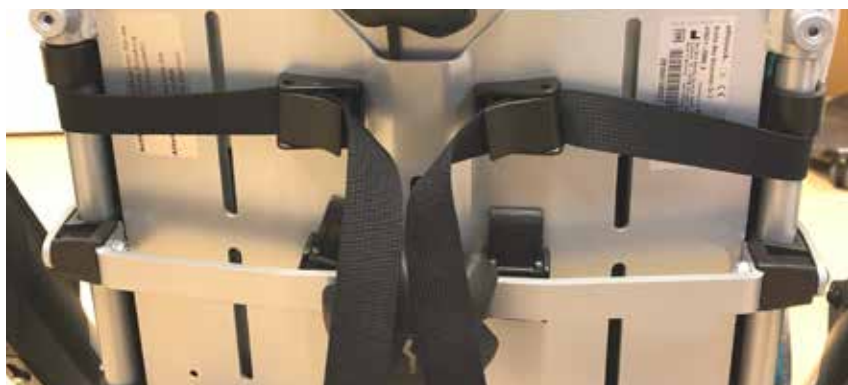

Använd ryggens befintliga bandlås.

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med stolens befintliga skruv, mutter och bricka.

Detta behöver du



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Den bakre trekanten fästs med stolens befintliga skruv, mutter och bricka.
Den främre trekanten fäst med stolens befintliga skruv, mutter och bricka.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Evoflex



Fäst Evoflex med stolens befintliga skruv, mutter och den medföljande brickan.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Monoflex



Fäst trekanten i Ø25 mm rörsvep.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HW303

2-Punkts höftbälte




Fäst trekanten i stolens bakre rör med M6x40 bult och mutter.

Detta behöver du



Medföljer bältet

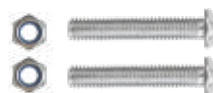

Art.nr C126

4-Punkts höftbälte




Fäst den bakre trekanten i stolens bakre rör med M6x40 bult och mutter.
Fäst det främre bandet runt ramen med endast sölja.

Detta behöver du



Medföljer bältet

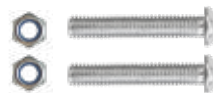


2x Art.nr C126

Evoflex



Fäst Evoflex i stolens bakre rör med M6x40 bult och mutter.

Detta behöver du

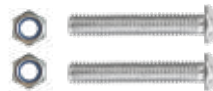

Art.nr C126

Monoflex



Fäst trekanten i stolens bakre rör med befintlig skruv.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Detta behöver du


Detta behöver du

2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten i stolens bakre rör med M6x40 bult och mutter.

Detta behöver du

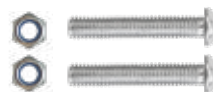

Art.nr C126




Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Fäst den bakre trekanten i stolens bakre rör med M6x40 bult och mutter.
Fäst det främre bandet runt ramen med endast sölja.

Detta behöver du

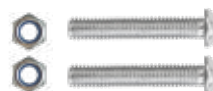

2x Art.nr C1126



Medföljer bältet

Evoflex



Fäst Evoflex i stolens bakre rör med M6x40 bult och mutter.

Detta behöver du

Monoflex



Fäst trekanten i stolens bakre rör med befintlig skruv.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Detta behöver du

Detta behöver du

2-Punkts höftbälte



Fäst bandet med trehåls bandfäste på träsitsens undersida. Observera att endast bälten med 25mm och 37mm bandbredd passar i beslaget.

Detta behöver du



Art.nr 3702




Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte sedd underifrån



Fäst både bakre och främre band på valfritt avstånd med trehåls bandfäste på träsitsens undersida. Observera att endast bälten med 25mm och 37mm bandbredd passar i beslaget.

Detta behöver du

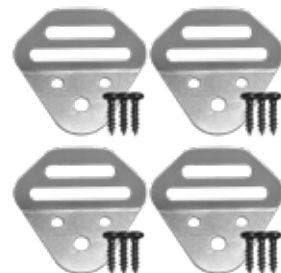

2x Art.nr 3702

Evoflex



Fäst med rörsvep runt armstödsfästets rör.

Detta behöver du



Art.nr HKH31



Medföljer bältet

Bröstsele - övre band



Använd Fäste för H-sele (Art.nr 804184). Beställs styckvis av Mercado Medic.
Obs! Bilden visar bara hur ett av två fästen är monterat.

Detta behöver du



Art.nr 804184

Bröstsele - nedre band



Fäst bandet med trehåls bandfäste på träryggens baksida.

Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet

Monoflex



Fäst bandet med trehåls bandfäste på träryggens baksida.

Detta behöver du



Art.nr 3702



Medföljer bältet

2-Punkts höftbälte




Detta behöver du



4-Punkts höftbälte



Detta behöver du

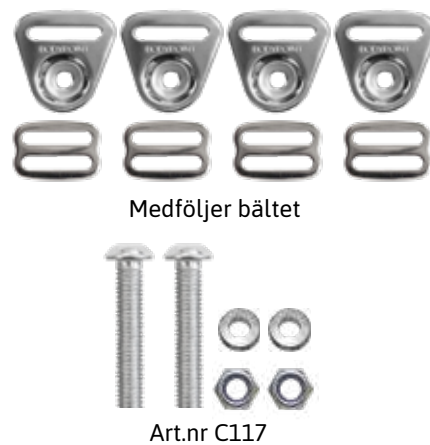

Detta behöver du

2-Punkts höftbälte



Trekanten fästs i stolens befintliga bult och mutter.

Detta behöver du



Medföljer bältet

4-Punkts höftbälte



Trekanten fästs i stolens befintliga bult och mutter.

Detta behöver du



Medföljer bältet

Montering av bakre band sedd underifrån



Trekanten fästs i stolens befintliga bult och mutter.

2-Punkts höftbälte



Fäst den medföljande trekanten på sitsröret med ett rörsvep för ovalt rör (medföljer ej).

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HW320-27-33

Evoflex



Fäst bältet på sitsröret med ett rörsvep av för ovalt rör (medföljer ej). Använd bältets medföljande fläsmutter som bilden visar

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HW320-27-33

4-Punkts höftbälte



Bakre band: Fäst den medföljande trekanten på sitsröret med ett rörsvep för ovalt rör.
Främre band: Fäst den medföljande trekanten på sitsröret med ett rörsvep för ovalt rör.

Detta behöver du



Medföljer bältet



4x Art.nr HW320-27-33

2-Punkts höftbälte



Trekanten fästs i runt stolens rör med Art.nr HW303.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HW303

4-Punkts höftbälte



Den bakre trekanten fästs i runt stolens rör med Art.nr HW303.
Den främre trekanten fästs i runt stolens rör med Art.nr HW303.

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HW303

Evoflex



Fäst HW310-25 runt stolens rör.

Detta behöver du



2x Art.nr HW310-25

2-Punkts höftbälte



Trekanten fästs i runt stolens rör med Art.nr HW303.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr HW303

4-Punkts höftbälte



Den bakre trekanten fästs i runt stolens rör med Art.nr HW303.
Den främre trekanten fästs i runt stolens rör med Art.nr HW303.

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HW303

Evoflex



Fäst HW310-25 runt stolens rör.

Detta behöver du



2x Art.nr HW310-25

2-Punkts höftbälte



Trekanten fästs i stolens befintliga hål med en M5x20 bult och mutter.

Detta behöver du



Medföljer bältet



Art.nr C124

4-Punkts höftbälte



Den bakre trekanten fästs i stolens befintliga hål med en M5x20 bult och mutter.
Den främre trekanten fäst i ett rörsvep på ovala rör.

Detta behöver du



Medföljer bältet



2x Art.nr HW320-27-33



Art.nr C124

Evoflex



Fäst i stolens befintliga hål med en M5x20 bult, mutter och bricka.

Detta behöver du



Art.nr C124



M5 bricka



*HEA Grundades 1929 och vår idé är att
erbjuda människor med funktionsvariationer
möjligheten till ett bättre liv med smarta
hjälpmedel från hela världen.*



ETT BÄTTRE LIV