

Danmar skyddshjälm - Comfy mjuk

Bruksanvisning



Tillverkad av Danmar Products, Inc. USA

Art. nr: 9708-XS, 9708-S, 9708-M, 9708-L

9708_2020_01

INNEHÅLL:

1 x Skyddshjälm Comfy med mjukt skal

Hjälmen skall passa bekvämt utan att sitta för hårt eller för löst. Hjälmens framsida skall inte gå under ögonbrynen. Anpassa hakbandets längd med hjälp av plastspännet. Vid användning skall alltid hakbandet vara stängt.

TVÄTTRÅD

Tvätta ofta i varmt vatten med diskmedel. Kan doppas i vatten. Lufttorkas. Får ej autoklaveras.

VARNING!

Fast vi anser att en hjälm väsentligt kan minska risken för huvudskador vill vi understryka att det inte finns någon känd metod att helt undvika skador. Endast ni som ordinator/ vårdnadshavare etc. kan utvärdera behoven i de olika fallen. Vi anser att det är viktigt att professionell expertis rådfrågas.

VARNING!

Produkten får inte modifieras.

Underhåll

Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på materialet; skalet, mjuka delar och hakbandets sömmar. I samband med fall måste hjälmen kontrolleras. Om betydande slitage eller skada upptäcks på skalet skall hjälmen kasseras. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person – hälsa och säkerhet står på spel.

Skrotning/Kassation

Produkten lämnas till kommunal avfallshantering.

HEA Medical AB

Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

