

# Tips för användning av Elastiskt Band från Bodypoint

Detta är ett komplement till bruksanvisningen som medföljer produkten och beskriver monteringsförslag och tips för hur Elastiskt band från Bodypoint kan användas.


Elastiskt band från Bodypoint är ett medicintekniskt hjälpmedel, klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU som används av brukare på manuella rullstolar, elrullstolar, arbetsstolar, hygienstolar, modulära sittsystem, ståhjälpmiddel, möbler och under transporter som bil, buss, tåg, flyg och motsvarande.

Vad en viss brukare behöver för god säkerhet, stabilitet och komfort kan kräva andra lösningar med hänsyn till förmåga, förväntningar och miljö. Vad som är rätt position för varje individ måste provas ut av kvalificerad personal. Positioneringshjälpmedel kan endast tillhandahålla funktion och säkerhet när de har monterats i enlighet med användarens individuella behov, baserat på en klinisk bedömning.

## Om bruksanvisningen

I produktens bruksanvisning finns de generella anvisningarna från tillverkaren, CE-rättsinnehavaren. Dessa förslag från HEA Medical faller inom ramen för vad tillverkaren anvisar, där vi tolkar ordet rullstol som rullande stolar.

Bodypoints positioneringshjälpmedel är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet MDR. Om de provas ut och monteras av sakkunnig personal som följer rullstolens bruksanvisning och dessa förslag, som faller inom ramen för Bodypoints bruksanvisning, blir kombinationen inte specialanpassning.

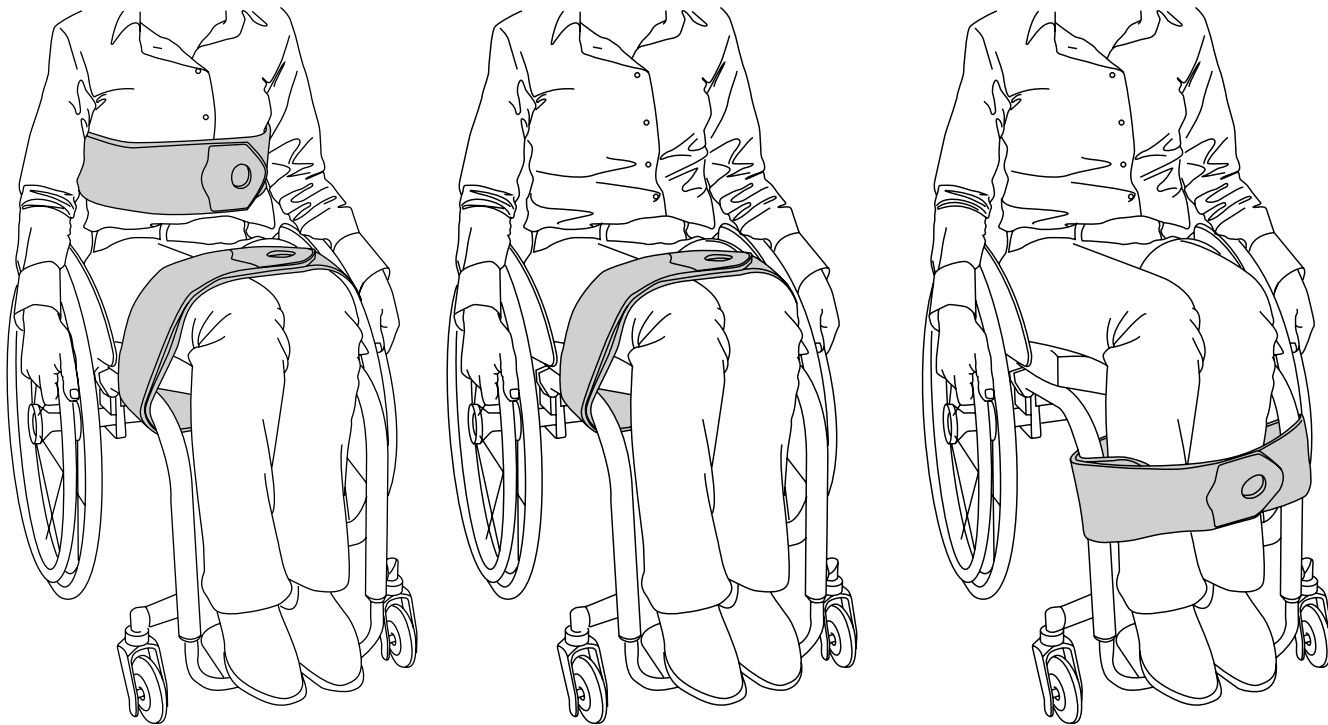


## Om avsedd användning i bruksanvisningen

Bodypoints bälten och selar är testade och godkända enligt ISO-standard. Då måste alltid det svåraste och mest riskfyllda användningsområdet testas, vilket blir det primära området för avsedd användning även om det kan finnas flera avsedda användningsområden, som alla är godkända.

Elastiskt band är ISO-testad och godkänd som bröstbälte som ger stöd för bål eller torso som primär avsedd användning, där bruksanvisningen anger att produkten alltid skall användas med ett höftbälte.

Som sekundär avsedd användning kan produkten även användas som stöd för övre ben, underben eller stöd för höften. Elastiskt band från Bodypoint är ett tillfälligt positioneringsstöd som är flexibelt att positioneras över flera områden beroende på vad användaren kräver, vilket också framgår av bruksanvisningen.

Under MDR är kombinationen inte en specialanpassning enligt artikel 22 utan en kombination av två CE-märkta produkter. Produkten är inte avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport.

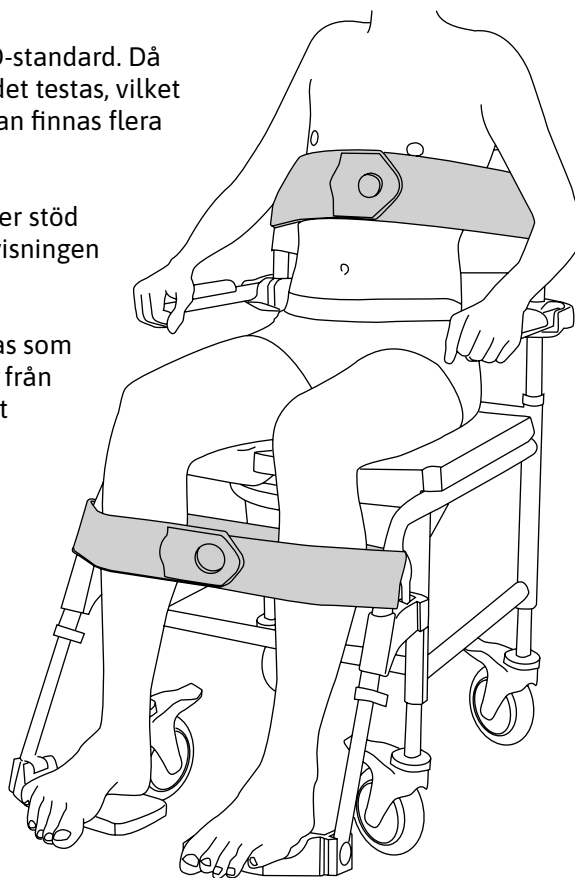

*Exempel på hur man kan använd det elastiska bandet på en hygienstol.*



## Elastiskt band från Bodypoint

Ett mångsidigt band som har så många användningsområden att brukare och förskrivare ibland kallar det "fantastiskt universalband". Används som stöd för bröstet, över magen, runt höften, låren eller benen. Ett elastiskt och starkt band med kardborrlås som fäster steglöst. Kan kapas steglöst eller förlängas. Praktiskt grepp med stort hål för tumme eller fingrar. Materialet är mjukt och har en kontrollerad elasticitet som ger stöd och komfort för temporär positionering.

Används för positionering vid otaliga situationer i vardagen och på fritiden. På jobbet och i hemmet. Vid korta transporter eller på långa resor. I rullstolen, på släden, på snowracern, i båten, i bilen, i flygplanet eller vid poolkanten. Vid lek och spel. På sjukgymnastiken eller på gymmet. I samband med olika typer av utprovningar. Endast kreativiteten sätter begränsningar för hur man kan använda Elastiskt band från Bodypoint.



Här använder Gunilla bandet över låren för att kunna utföra en pull-up, där hon lyfter sig själv och stolen.



Här använder Gunilla bandet över smalbenen i kabelmaskinen

Greppet är praktiskt. Ett stort hål för tummen eller fingrarna gör att även den med nedsatt handfunktion kan hantera det elastiska bandet. Materialet är förstärkt runt hålet.

Tillverkat av starkt neopren-tyg med unikt kardborrelås. Det har fyra gånger så lång livslängd och är sex gånger så starkt i dragriktningen jämfört med ett traditionellt kardborrlås. Dessutom lättare att hålla rent och fastnar inte lika lätt i textilier.



Förlängningsband ger bandet ytterligare 72 cm.

Bandets totala längd är 148 cm och kardborren fäster steglöst på 128 cm av dessa. Bandets omkrets kan anpassas fritt från några decimeter upp till 128 cm. Är bandet för långt kan det klippas var som helst utan att det fransar sig. Det kan också förlängas.

Finns i tre utföranden med tre bandbredder, 8 cm, 11 cm och 15 cm. Alla är 148 cm långa och 4 mm tjocka. Det bredaste bandet är fastare och låser extra effektivt eftersom kardborrytan är större. Längden kan utökas 72 cm med ett förlängningsband som finns i tre matchande bandbredder. En lösning för att exempelvis passa runt flygplanssätet eller en bilstol.

