

# Tillbehör för Danmar skyddshjälm - Bruksanvisning


ba\_tillbehör\_danmar\_hjälm\_2023\_11

## Avsedd användning

Tillbehör för justering av storlek. För att få en bättre passform eller för att fylla ut en för stor hjälm.

**Förpackningens innehåll:** (Någon av nedanstående, i ett exemplar)


Benämning	Art.nr
Hjässdyna 6mm (1st)	7633-6
Hjässdyna 13mm (1st)	7633-13
Ovala dynor (4st)	7634
Inläggsband 6mm (1st)	7635-6
Inläggsband 13mm (1st)	7635-13

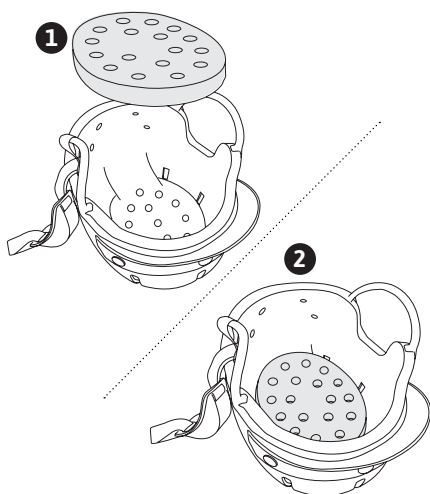

### Hjässdyna - 6mm/ 13mm

En ovalformad dyna. Ventilering och tvättbar. Används också för att hindra hjälmen att falla ner över brukarens ögon. Placera Hjässdyna i hjälmens insida. Den kan sitta bra utan tejp, vilket förenklar såväl justering som rengöring. Fäst annars med dubbelhäftande tejp (ingår ej).


Art.nr	Tjocklek
7633-6	6 mm
7633-13	13 mm

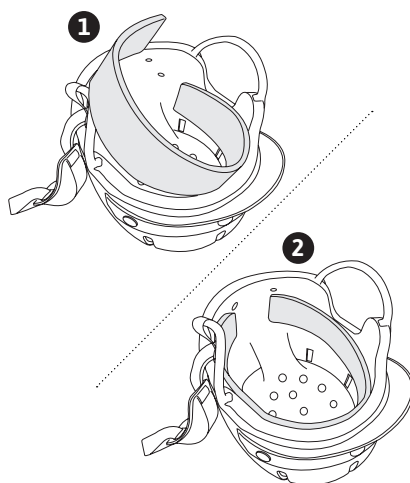

### Inläggsband - 6mm/ 13mm

Inläggsbandet hjälper till att minska hjälmens inre omkrets. Kan också användas när brukaren är mellan två storlekar. Inläggsbandet har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.

Art.nr	Tjocklek
7635-6	6 mm
7635-13	13 mm

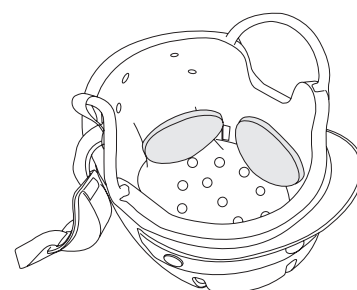

### Ovala dynor

Fyra stycken ovala dynor. Ovala dynor har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.

Art.nr	Tjocklek
7634	6 mm

## OBS!

För bästa resultat, använd maskeringstejp eller liknande för att testa fram rätt position av dynan innan den tejpas fast.

## OBS!

Hjälmarna Comfy Hård och Comfy Mjuk har ett känsligare innermaterial än övriga hjälmar, bestående av kompressionsformat skum. Det är av yttersta vikt att rätt position testas innan dynor och inläggsband tejpas fast, eftersom innermaterialet kan skadas på Comfy-hjälmarna vid justering av position för dynor eller inläggsband.

## Material

Dynorna och inläggsbandet är tillverkade av vinylöverdragat stötabsorberande EVA-skum med slutna celler som är lätt att skära/klippa till och rengörs enkelt eftersom snittytorna inte släpper in fukt eller lukt.

## Rengöring

Tvättas regelbundet med varmt vatten och mild tvål eller diskmedel. Kan doppas i vatten. Lufttorkas. Får ej autoklaveras.

Medicintekniskt hjälpmedel, klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU

CE MD Medical Device



Danmar Products, Inc.  
221 Jackson Industrial Dr.  
Ann Arbor, MI 48103, USA  
P. 800-783-1998



Danmar Products

EC REP

HEA Medical AB  
Norra Ågatan 10  
416 64 Göteborg  
031-15 73 20  
info@heamedical.se  
www.heamedical.se

HEA  
MEDICAL AB