


Huvudstöd fram - Bruksanvisning

Art.nr: 6826-XS, 6826-S, 6826-M, 6826-L

ba_huvudstöd_fram_2023_11

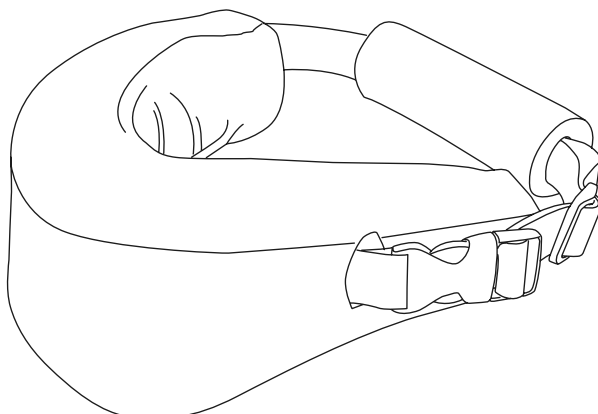

Avsedd användning

För att ge ett skonsamt lyft av hakan och sidostöd av huvudet samt att förhindra att hakan faller.

Ett mjukt tygöverdrag täcker stödet som är tillverkad av vinylöverdragen polyuretanskum. Runt den bakre remmen finns en vadderad rulle. Öppnas i sidan med fixspänne av plast och justeras med sölja av plast. Huvudstöd fram kan användas med en bröstsele.

WARNING! Det är viktigt att professionell expertis rådfrågas, även om Huvudstöd fram kan vara ett viktigt alternativ för att möta positioneringsbehoven för dem som behöver lite extra stöd.

Om användarens fysiska eller kognitiva förmågor hindrar hen från att använda denna produkt på ett säkert sätt, måste en vårdgivare alltid vara närvarande under användningen.

Om en allvarlig incident inträffar relaterad till användningen av denna produkt, bör den rapporteras till tillverkaren och till den lokala behöriga myndigheten.


WARNING! Spänn INTE den bakre remmen på huvudstödet till en position som skulle störa andningen eller ätandet.

Montera INTE Huvudstöd fram på någon sittenhets eller nackstöds eftersom detta kan störa andning och sväljning.

Måttagning

A Omkrets hals

B Örsnibb till axel. Huvud och halsformer varierar. Tillåt cirka 2-3 cm mellan örsnibb och huvudstödet ovasida.

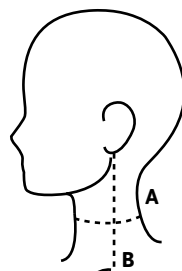

Storlekar	A (cm)	B (cm)
X-small	20-25	4-6
Small	23-30	5-8
Medium	28-36	6-10
Large	33-43	9-13

Rengöring Tvätta rent med tvål och vatten, inga starka kemikalier ska användas. Överdrag är enkla att ta på och av och kan tvättas i maskin. Får ej autoklaveras.

Skrotning/Kassation

Produkten är gjord av material som kan kasseras på ett säkert sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder vid slutet av dess livslängd. Kan lämnas till kommunal avfallshantering.

Garanti Ett år. Spara alltid produktens bruksanvisning.



Danmar Products, Inc.
221 Jackson Industrial Dr.
Ann Arbor, MI 48103, USA
P. 800-783-1998



Danmar Products



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

