


Flexcap skyddshjälm från Danmar - Bruksanvisning

ba_danmar_flexcap_2026

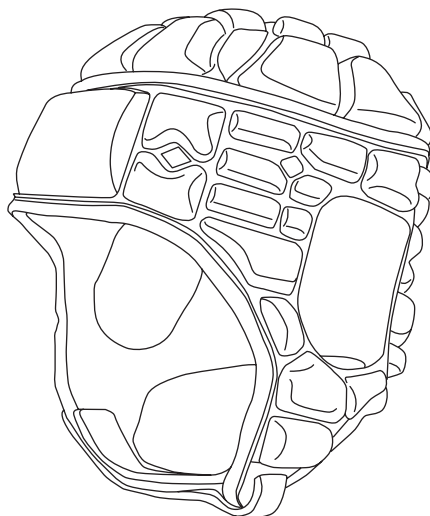

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

(Någon av nedanstående, i ett exemplar)

Skyddshjälm	Storlek	Art.nr
FlexCap	X-Small	9710-XS
FlexCap	Small	9710-S
FlexCap	Medium	9710-M
FlexCap	Large	9710-L

Avsedd Användning

Hjälmen är avsedd att användas för personer som behöver skydd för huvudet. FlexCap är den lättaste hjälmen som ger minst skydd, av hjälmarna från Danmar, tillverkad av EVA-skum.

FlexCap är skraddarsydd för personer med autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom och andra funktionsvariationer, och tillhandahåller en skyddande lösning som inte kompromissar med komforten. Dess lätta design säkerställer att användaren kan utföra dagliga aktiviteter, medan den vadderade strukturen absorberar stötar, med ventilationshål och öronöppningar som håller brukaren sval, vilket gör den lämplig för de som är benägna att falla.

Hjälmarna från Danmar kan, beroende på modell, användas för personer med osäker gång, personer som lätt faller, personer med epilepsi eller för personer som är självdestruktiva. Hjälmen skall passa bekvämt utan att sitta för hårt eller för löst. Hjälmens framsida skall inte gå under ögonbrynen. Anpassa hakbandets längd med hjälp av plastspännet. Vid användning skall alltid hakbandet vara stängt. För att säkerställa bästa kliniska resultat bör användaren rådgöra med kvalificerad sjukvårdspersonal innan produkten används.

VARNING!

Det är viktigt att professionell expertis rådfrågas. Även om en hjälm väsentligt kan minska risken för huvudskador finns det inte någon känd metod att helt undvika skador. Endast ordinator/vårdgivare kan utvärdera behoven i de olika fallen.

VARNING!

Om användarens fysiska eller kognitiva förmågor hindrar hen från att använda denna produkt på ett säkert sätt, måste en vårdgivare alltid vara närvarande under användningen.

VARNING!

Om en allvarlig incident inträffar relaterad till användningen av denna produkt, bör den rapporteras till tillverkaren och till den lokala behöriga myndigheten.

Regelbundna säkerhets- och funktionskontroller

För att säkerställa användarens säkerhet måste denna produkt kontrolleras regelbundet för funktion och tecken på slitage. Kontrollera regelbundet slitage på materialet; skalet, mjuka delar och hakbandets sömmar. I samband med fall måste hjälmen kontrolleras. Om slitage eller skada upptäcks på skalet skall hjälmen kasseras. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person.

Rengöring

Tvättas regelbundet med varmt vatten och mild tvål eller diskmedel. Kan doppas i vatten. Lufttorkas. Får ej autoklaveras.

Skrotning/Kassation


Produkten är gjord av material som kan kasseras på ett säkert sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder vid slutet av dess livslängd. Kan lämnas till kommunal avfallshantering.

Garanti

Ett år. Spara alltid hjälmens originalförpackning och bruksanvisning. Vid returer skall originalförpackningen vara oskadd.

Medicintekniskt hjälpmedel, klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU

CE MD Medical Device

 Danmar Products, Inc.
221 Jackson Industrial Dr.
Ann Arbor, MI 48103, USA
P. 800-783-1998



Danmar Products

EC REP

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

 HEA
MEDICAL AB